



Vad gör Thermanol® unik? / Hva gjør Thermanol® unik?

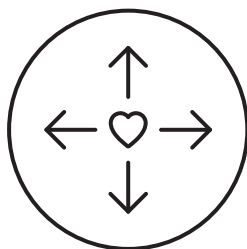


**EFFEKTIV
SMÄRTLINDRING**

**EFFEKTIV
SMERTELINDRING**

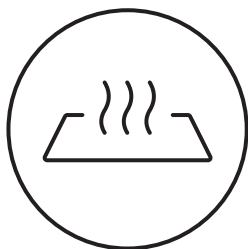


**LÅNGVARIG
VÄRME**

**LANGVARIG
VARME**

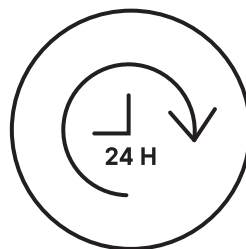

**SMÄRTLINDRANDE
EFFEKT I 24 H**

**SMERTELINDRENDE
EFFEKT I 24 T**

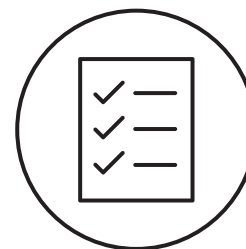

**DOFTFRI, TUNN
OCH DISKRET**

**DUFTFRI, TYNN
OG DISKRET**

Thermanol® smärtlindrande värmeplåster är avsedd för att lindra muskelsmärta och ledsmärta, olika typer av kramper, såsom reumatisk smärta, idrottsskador, stel/stiv nacke/nakke, ryggsmärta/ryggsmerte och mensvärk/mens-
truasjonssmerte. Den speciella tekniken garanterar att plåstren/plastrene verkar i 24 timmar, även/selv om
värmeeffekten klingar av/avtar efter några/noen timmer/timer. Thermanol® innehåller inte/ikke läkemedel/legemidler,
är dermatologiskt testad och färgar/farger inte/ikke av sig.

Användning/bruk: Vuxna/voksne över 16 år.

1. Öppna förpackningspåsen och ta ut plåstret. /
Åpne forpakningen og ta ut plasteret.
2. Ta bort den transparenta skyddsfilm. /
Ta bort den transparente beskyttelsesfilmen.
3. Placera plåstret i området där besvären sitter. /
Plasser plasteret i området hvor plagene sitter.



Se till att det fäster sig ordentligt/Se til at det fester seg ordentlig.

Det tar 10 till 5 minuter innan värmeeffekten kommer/

Det tar 10 til 15 minutter før varmeeffekten oppstår.

Låt plåstret sitta i 24 timmar/La plasteret sitte i 24 timer.

Ersätt det sedan med ett nytt/Erstatt det deretter med et nytt.

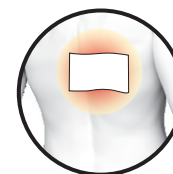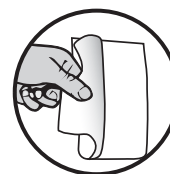

Plåstret kan klippas till med sax om en mindre storlek/størrelse behövs/er nødvendig.

Tvätta/vask händerna efter applicering/påsetting av plåstret.

Intensiteten och varaktigheten/varigheten av värmeeffekten kan skilja sig/variere från/fra person till person beroende/avhengig av:

- Temperaturförhållanden/temperaturforhold
- Hudens känslighet/følsomhet och
- Fysisk aktivitet (med fysisk träning/trening, ökar värmeeffekten).

Plåstrets smärtstillande/smertestillende och lindrande verkan/virkning beror/avhenger inte på/av värmeeffektens intensitet. Effekten av arnika, pilbark/pilebark och harpagoört/djevelklo varar i 24 timmar efter att plåstret er applicerats/påsat. Läs bruksanvisningen före användning/bruk. Används/brukes inte för barn under 16 år.

Förvaring/oppbevaring: Förvaras/oppbevares utom räckhåll/utilgjengelig för barn.

Ingredienser: Akrylsampolymer, glycerin, vanillylbutyleter, djävulsklo/djevelklo, arnikablomextrakt, kamfer, boswellia serrataextrakt, polysorbat 60, pilbarkextrakt/ekstrakt av pilebark.

Varningar/advarslar:

- Endast/kun för utvärtes bruk.
- Applicera/påføres endast/kun på oskadad, ren och torr hud.
- Tvätta/vask händerna efter användning/bruk.
- Applicera/påføres inte över ögonen/øynene, på slemhinnor/slimhinner eller områden som omger slemhinnor/slimhinner.
- Används/brukes inte samtidigt med andra lokala behandlingar.
- Sluta med behandlingen vid synbar/synlig irritation eller överkänslighet/overømfintlighet mot produkten.
- Använd/bruk inte mer än/enn ett plåster i taget/av gangen på samma del av kroppen.
- Används/brukes inte under graviditet eller amning, rådfråga/rådfør deg med läkare/lege före användning/bruk.
- Produktens funktionalitet och säkerhet garanteras av att förpackningspåsen/pakningen är hel.
- Används/brukes inte om förpackningspåsen/posen är skadad eller har hål/hull.
- Används/brukes inte mer än/enn 4 dagar i följd/sammenhengende för att/å undvika/unngå hudutslag/hudutslett.
- Allvarliga/Alvorlige incidenter/hendelser ska rapporteras till tillverkaren/tilvirkeren och -behörig/kompetent myndighet.