



TORNIQUETE ANFIBIO

Características do Gen 2

- Portátil, Robusto, Leve e Compacto
- Concebido para Água do Mar, segundo especificações marítimas
- Com Autobloqueio e Antiderrapante
- Faixa para morder, auxiliando aplicações a uma mão
- Instruções de Utilização (IU) no Exterior
- Local para Registo da Hora de Aplicação do TQ Garrote
- TOTALMENTE em aço inox lacado Carga Máx. do Garrote 250 Kgs
- Concebido para Uso em Treino Repetitivo com Mínimo Desgaste

LEGENDA SÍMBOLOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO



FABRICANTE: Indica o fabricante do dispositivo médico.



ATENÇÃO: Indica a necessidade de consultar as instruções de utilização, as quais alertam para informações tais como avisos e precauções que não podem, por uma série de razões, ser apresentadas no próprio dispositivo.



NÃO REUTILIZAR: Indica que o dispositivo médico se destina a apenas uma utilização num único paciente durante um único procedimento.



MARCA CE: Significa conformidade técnica europeia.



REPRESENTANTE EUROPEU AUTORIZADO: Os requisitos para a acreditação e vigilância de mercados relativamente à comercialização dos produtos; Diretiva relativa a Dispositivos Médicos.



CÓDIGO DE LOTE: Indica o código de lote do fabricante para que o lote possa ser identificado.



Manutenção preventiva:

- Lavagem de água doce após cada uso ou exposição a água salgada
- Inspeção e Teste de componentes devem ser realizados regularmente
- Familiarização deve ser realizada regularmente e antes da aplicação real para reduzir os efeitos do estresse

Contra-indicações:

- Não use para pequenas hemorragias
- Não aplique em uma junta
- Não aplique sobre itens nos bolsos



Para registrar seu Tourniquet Leash e validar sua garantia, inicie sessão em www.omnainc.com/pages/contact

Fabricado para:

Manufacturer Symbol

OMNA Inc.

1400 63rd Ave S

St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com

Patentes: www.omnainc.com

EC	REP	Patrocinador Australiano
EMERGO EUROPE Prinsessgracht 20 The Hague, 2514 AP, The Netherlands		EMERGO AUSTRALIA Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex St Sydney, NSW, 2000, AU

Hemorragia Severa no Braço ou Perna:

Aplicar o Torniquete OMNA

Aplicação a Duas Mãos

1. **PUXAR** - remover a faixa armazenada
2. **Posicionar Acima e Firme - ENFAIXAR** à volta do membro
3. **Passar a faixa pelo anel vermelho**
4. **Puxar Para Baixo Apertado** - removendo toda a folga
5. **ERGUER** a alavanca do garrote até que a hemorragia pare e a palpitação distal seja eliminada



Aplicação a Uma Mão



1. **Posicionar Acima e Firme.** O torniquete também pode ser aplicado 5 - 8 cm acima do ferimento
2. **Morder - morder a faixa. Puxar Para Baixo Apertado** - removendo toda a folga



3. **Fechar Velcro**
4. **Confirmar que a Folga foi Removida; Voltar a Apertar se necessário**
5. **ERGUER a Alavanca do Garrote** até parar a hemorragia e não se sinta a pulsação por baixo. Se não conseguir controlar a hemorragia ou a pulsação distal estiver presente, aumente a compressão ou aplique outro torniquete por cima e/ou ao lado do primeiro
6. **Registe a hora da aplicação. Procure um médico**

