

# LACCIO EMOSTATICO MARINO

## Caratteristiche 2 Gen

- Resistente, leggero, e compatto
- Classificazione marina, 100% grado marino
- Autobloccaggio e antiscivolo
- Cinghietta a morso per applicazioni di soccorso a una mano
- Istruzioni per l'uso (IFU) visibili all'esterno
- Placca per registrare l'ora di applicazione di TQ
- Fibbia a cricchetto marina - Acciaio inossidabile
- Carico massimo del noddolino 550 lbs 250 Kg
- Progettato per l'uso ripetitivo sull'oceano / allenamento

### LEGENDA DEI SIMBOLI DEL PRESIDIO MEDICO

#### SIMBOLO

#### DESCRIZIONE



**PRODUTTORE:** Indica l'azienda produttrice del presidio medico.



**AVVERTENZE:** indica l'obbligo, per l'utente, di consultare le istruzioni per l'uso, per accedere a importanti informazioni cautelative che non possono, per vari motivi, essere presenti sul presidio medico stesso.



**NON RIUTILIZZARE:** indica un presidio medico destinato ad un unico uso o su un singolo paziente, durante un singolo trattamento.



**MARCHIO CE:** indica la conformità tecnica europea.



**RAPPRESENTANTE EUROPEO AUTORIZZATO:** requisiti per il controllo suaccreditamento e mercato relativi al marketing dei prodotti, Direttiva sui Presidi Medici.



**CODICE LOTTO:** Indica il codice del lotto del produttore in modo che il lotto o la partita possono essere identificati.



### Manutenzione preventiva:

- Risciacquo con acqua dolce dopo ogni utilizzo o esposizione all'acqua salata
- Ispezione e test dei componenti devono essere eseguiti regolarmente
- La familiarizzazione deve essere eseguita regolarmente e prima dell'applicazione effettiva per ridurre gli effetti dello stress

### Controindicazioni:

- Non usare per sanguinamento minore
- Non applicare su un giunto
- Non applicare sugli oggetti nelle tasche



Per registrare il tuo guinzaglio Tourniquet e confermare la tua garanzia su [www.omnainc.com/pages/contact](http://www.omnainc.com/pages/contact)

#### Prodotto per:

Manufacturer Symbol

**OMNA Inc.**

1400 63rd Ave S

St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: [sales@omnainc.com](mailto:sales@omnainc.com)

Brevetti: [www.omnainc.com](http://www.omnainc.com)


EC	REP	Sponsor Australiano
EMERGO EUROPE Prinsessgracht 20 The Hague, 2514 AP, The Netherlands		EMERGO AUSTRALIA Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex St Sydney, NSW, 2000, AU

# Emorragia grave alla gamba o al braccio: applicare OMNA Laccio Emostatico

applicare OMNA Laccio Emostatico

## Applicazione a Due Mani

1. **TIRARE** - rimuovendo la cinghia fornita
2. **Posizionare in alto e saldamente e AVVOLGERE** attorno all'arto
3. **Inserire la cinghia attraverso l'anello**
4. **TIRARE verso il basso** - rimuovendo tutta la parte allentata
5. **SOLLEVARE** - la leva del nottolino, finché l'emorragia non si fermerà e le pulsazioni distali non termineranno

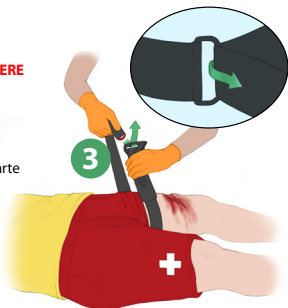

## Applicazione a Una Mano



1. **Posizionare in alto e saldamente.** Il laccio emostatico può essere applicato anche a 2" - 3" (5 - 8 cm) al di sopra della ferita



2. **Mordere la cinghietta a morso.** **TIRARE verso il basso** - rimuovendo tutta la parte allentata



3. **Velcro**



4. **Confermare la rimozione della parte allentata (Stringere nuovamente se necessario)**

5. **SOLLEVARE la leva del nottolino** finché l'emorragia non si arresterà e le pulsazioni sotto il laccio emostatico non si fermeranno. Se l'emorragia non è controllata o le pulsazioni distali sono presenti, aggiungere più compressione, o applicare un altro laccio sopra o a fianco del primo.

6. **Notez l'heure d'application du garrot et consultez un médecin**



**Per rilasciare / ripristinare il laccio emostatico per l'allenamento.**

Tirare il pulsante rosso verso l'alto.

