

# OMNA TORNIQUETE MARINHO

## Características do Gen 2

- Portátil, Robusto, Leve e Compacto
- Concebido para Água do Mar, segundo especificações marítimas
- Com Autobloqueio e Antiderrapante
- Faixa para morder, auxiliando aplicações a uma mão
- Instruções de Utilização (IU) no Exterior
- Local para Registo da Hora de Aplicação do TQ Garrote
- TOTALMENTE em aço inox lacado Carga Máx. do Garrote 250 Kgs
- Concebido para Uso em Treino Repetitivo com Mínimo Desgaste

### LEGENDA SÍMBOLOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

#### SÍMBOLO

#### DESCRIÇÃO



**FABRICANTE:** Indica o fabricante do dispositivo médico.



**ATENÇÃO:** Indica a necessidade de consultar as instruções de utilização, as quais alertam para informações tais como avisos e precauções que não podem, por uma série de razões, ser apresentadas no próprio dispositivo.



**NÃO REUTILIZAR:** Indica que o dispositivo médico se destina a apenas uma utilização num único paciente durante um único procedimento.



**MARCA CE:** Significa conformidade técnica europeia.



**REPRESENTANTE EUROPEU AUTORIZADO:** Os requisitos para a acreditação e vigilância de mercados relativamente à comercialização dos produtos; Diretiva relativa a Dispositivos Médicos.



**CÓDIGO DE LOTE:** Indica o código de lote do fabricante para que o lote possa ser identificado.



#### Manutenção preventiva:

- Lavagem de água doce após cada uso ou exposição a água salgada
- Inspeção e Teste de componentes devem ser realizados regularmente
- Familiarização deve ser realizada regularmente e antes da aplicação real para reduzir os efeitos do estresse

#### Contra-indicações:

- Não use para pequenas hemorragias
- Não aplique em uma junta
- Não aplique sobre itens nos bolsos



Para registrar seu Tourniquet Leash e validar sua garantia, inicie sessão em [www.omnainc.com/pages/contact](http://www.omnainc.com/pages/contact)

#### Fabricado para:

Manufacturer Symbol

**OMNA Inc.**

1400 63rd Ave S

St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: [sales@omnainc.com](mailto:sales@omnainc.com)

Patentes: [www.omnainc.com](http://www.omnainc.com)


EC	REP	Patrocinador Australiano
EMERGO EUROPE Prinsessgracht 20 The Hague, 2514 AP, The Netherlands		EMERGO AUSTRALIA Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex St Sydney, NSW, 2000, AU

# Hemorragia Severa no Braço ou Perna:

## Aplicar o Torniquete OMNA

### Aplicação a Duas Mãos

1. **TIRARE** - rimuovendo la cinghia fornita
2. **Posizionare in alto e saldamente e AVVOLGERE** attorno all'arto
3. **Inserire la cinghia attraverso l'anello**
4. **TIRARE verso il basso** - rimuovendo tutta la parte allentata
5. **SOLLEVARE** - la leva del noddolino, finché l'emorragia non si fermerà e le pulsazioni distali non termineranno

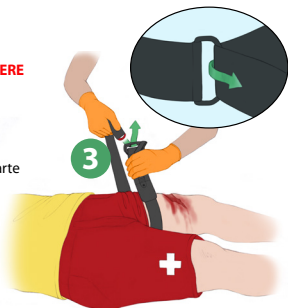

### Aplicação a Uma Mão



1. **Posicionar Acima e Firme.**  
O torniquete também pode ser aplicado 5 - 8 cm acima do ferimento



2. **Morder - morder a faixa. Puxar Para Baixo Apertado** - removendo toda a folga



3. **Fechar Velcro**



4. **Confirmar que a Folga foi Removida; Voltar a Apertar se necessário**

5. **ERGUER a Alavanca do Garrote até parar a hemorragia** e não se sinta a pulsação por baixo. Se não conseguir controlar a hemorragia ou a pulsação distal estiver presente, aumente a compressão ou aplique outro torniquete por cima e/ou ao lado do primeiro

6. **Registe a hora da aplicação. Procure um médico**



### Para liberar / redefinir o torniquete para treinamento.

Puxe o botão vermelho para cima.

