

# FitKit® Anleitung

10 Längen. 10 Breiten. Eine perfekte Passform für Sie.

Bestellen Sie MyONE® Custom Fit™ unter [myonecondoms.de](http://myonecondoms.de)

**SCHRITT 1: Drucken Sie Ihr FitKit® aus.** Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Maße erhalten, legen Sie eine Kreditkarte auf das unten vorgesehene Feld. Wenn sie passt, dann haben Sie den passenden Maßstab. Wenn Sie Probleme haben, achten Sie darauf, dass die „Druckerskalierung“ deaktiviert ist, und stellen Sie sicher, dass das Dokument in 100 % iger Größe gedruckt wird.

**SCHRITT 2: Schneiden Sie die beiden Messwerkzeuge aus.** In diesem Set sind zwei Messwerkzeuge enthalten: eins für den Umfang und eins für die Länge.

**SCHRITT 3: Messen Sie den Umfang.** Platzieren Sie den quadratischen Teil des mehrfarbigen Messwerkzeugs auf der breitesten Stelle Ihrer Erektion, wie in Abbildung (A) dargestellt. Legen Sie dieses FitKit-Tool wie einen Gürtel um, bis die beiden Pfeile mit einem farbigen Band übereinstimmen. Das Band zeigt Ihre BREITE.

**SCHRITT 4: Messen Sie die Penislänge.** Legen Sie das andere FitKit-Tool auf Ihre Erektion (Abbildung B). Messen Sie von der Basis bis zur Eichelspitze. Der Buchstabe, an dem Ihre Eichel anliegt, bezeichnet Ihre LÄNGE. Krumm? Messen Sie an der längsten Seite.

**SCHRITT 5: Holen Sie sich Ihren FitCode und bestellen Sie.** Kombinieren Sie Ihre BREITE mit Ihrer LÄNGE, um Ihren FitCode zu ermitteln (z.B. 49F). Besuchen Sie [myonecondoms.de](http://myonecondoms.de), um Ihre Bestellung aufzugeben.


**Wie sollte ein Kondom sitzen?** Ein Kondom, das richtig sitzt, ist sowohl bequem als auch gut anliegend. Die MyONE®-Empfehlungen basieren auf einer Formel für den richtigen Sitz, die Folgendes empfiehlt:

- Ein Kondom, das etwas länger ist als der Penis, damit er vom Ansatz bis zur Eichel gut bedeckt ist.
- Ein Kondom, das etwas enger ist als der Penisumfang, damit das Kondom an Ort und Stelle bleibt.

Vielleicht möchten Sie je nach Ihren persönlichen Vorlieben eine etwas andere Größe wählen. Sollte Ihre Wunschgröße nicht angezeigt werden, wählen Sie die nächstgelegene Größe, um die bestmögliche Wahl zu treffen. Scheuen Sie sich nicht, mehr als eine Code-Kombination auszuprobieren!

**KREDITKARTE  
HIER PLATZIEREN**

©2023. ONE® Condoms. Alle Rechte vorbehalten. FitKit® & MyONE® Vertrieb ausschließlich durch autorisierte Vertreter. BESUCHEN SIE [MYONECONDOMS.DE](http://MYONECONDOMS.DE) FÜR WEITERE INFORMATIONEN. DE-R2.

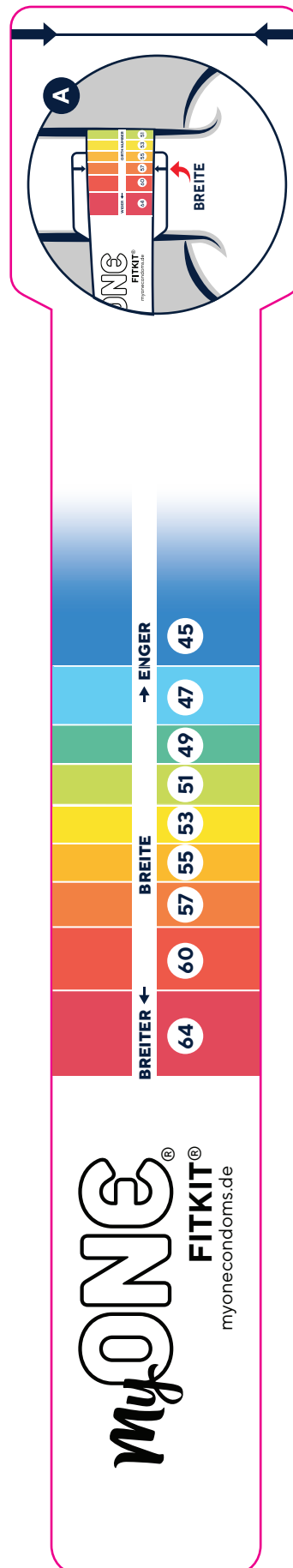

LÄNGE

M

L

K

J

H

G

F

E

D

C

B

LÄNGE

AM AUSGANGSPUNKT DER  
EREKTION PLATZIEREN