


Ergebnis lesen und verstehen

Was wird gemessen?



Die Anzahl der schwimmfähigen Spermien

Wie wird das Ergebnis interpretiert?

So wie es auf der Farbtabelle angezeigt: Je dunkler desto besser

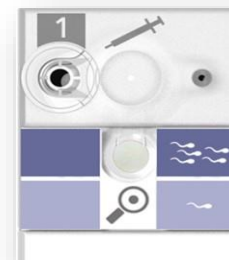

- Das Ergebnis gibt keine "Ja" oder "Nein" Antwort
- ***Es wird lediglich eine Spermazelle benötigt, um eine Eizelle zu befruchten***
- Eine normale Spermienqualität bedeutet: 5 mio Spermien pro ml
- Die Farbe im Ergebnisfenster wird mit der Referenzfarbe auf der Farbtabelle verglichen.

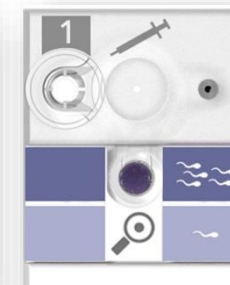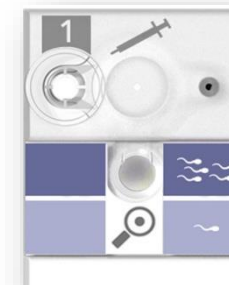

**Das Ergebnis kann unter verschiedenen Lichtverhältnissen unterschiedlich wirken.
Bei dunkleren Verhältnissen kann es blau erscheinen.**

