

Étapes à suivre: Appareil servant à vider d'un seul copu le sac de stomie

<ol style="list-style-type: none"> 1. Prendre l'appareil. Détacher les rouleaux et les ouvrir en forme de V. 2. Placer un contenant sous l'ouverture du sac. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Placer l'appareil sur le sac au-dessous de la stomie. <p>Note: Le rouleau avec attaché devrait être placé en avant du sac et le rouleau sans attache à l'arrière de sac</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Attacher l'appareil et s'assurer qu'il soit bien fermé sur le sac. 5. Préparer l'ouverture de sac: enlever (ou ouvrir) l'attache afin d'ouvrir l'extrémité du sac. 	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Déplier le bout scelle du sac pour exposer l'ouverture et faciliter la vidange. 	
<ol style="list-style-type: none"> 7. Faire descendre l'appareil et arrêter juste avant l'extrémité du sac. Pour éviter de toucher aux déchets, il faut s'arrêter avant l'ouverture du sac. 	
<ol style="list-style-type: none"> 8. Détacher l'appareil et le retirer du sac. 9. Essuyer le bout de sac. 	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Replier le bout du sac à sa position originale. 11. Remettre (ou rattacher) l'attache. 	
<p>Merci.</p>	