

Instrucciones: dispositivo para pasar drenaje del osteoma

<ol style="list-style-type: none"> 1. Tome el dispositivo, desenganche y abra los rodillos en forma de V. 2. Situe un recipiente cerca de la abertura de la bolsa de ileostomía. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Coloque el OPODD a través de la bolsa (inmediatamente bajo la abertura estoma) <p>Nota: Un rodillo con clip debe estar en la parte frontal de la bolsa y el otro rodillo sin clip en la parte trasera de la bolsa.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Cierre de Nuevo el OPODD y firme el OPODD a través la bolsa 5. Para preparar la abertura de bolsa, quite el clip de la bolsa o deshaz el cierre para abrir donde vaciar la bolsa. 	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Doble la parte que se sella hacia atrás exponiendo la apertura. Esto permitira que se drene. 	
<ol style="list-style-type: none"> 7. Pase por completo el OPODD en la bolsa; dejalo antes del extremo de la bolsa. <p>No pasar el OPODD en el extremo de la bolsa para evitar el contacto con materials fecales.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 8. Despegue el OPODD y quitelo de la bolsa. 9. Limpie el exceso del extremo de la bolsa. 	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Boble el extremo a su posicion original. 11. Enganche el clip o haz el cierre de la bolsa. 	
<p>Gracias.</p>	