

Hoho Medical – Model#MLF999

1、適用範圍： 該產品適用於狹窄的門廳、過道、迴廊或多平台樓梯間等難以進入的有限區域。

2、材質： 鋁合金。



3、技術參數： 折疊尺寸：(50±1)×(21±1)×(93±2) 展開成輪椅後：靠背高：91 cm 寬：50 cm 座位高：49 cm 寬：50 cm 淨重：A款 8 kg B款 9kg 毛重：A款 10kg B款 11kg 擔架承重：≤159kg

二、使用說明

- 1、本擔架採用高強度鋁合金材料和 PVC 防水布製成，配有保險帶。（運送時病員時安全）。
- 2、打開椅式擔架：拉開坐凳，將其向下按，定位後，再將可伸縮前抬把手按下，到位後，自動鎖定。
- 3、按下可伸縮前抬把手上的按鈕，可自由伸縮手柄長度。按下後抬把手，可將背部手柄折疊。
- 4、折疊椅式擔架時，將折疊開關提起，踩住腳輪前的一根橫桿，同時也將坐凳向上提起，便可折疊擔架。

三、維護保養： 1、經常保持整潔（包括消毒）。 2、經常檢查是否有部件鬆動（螺絲鬆動不屬於產品質量問題）。

四、特別警示： 運送病人時，必須將保險帶係好，確認各方面都在保險狀態，確保病人安全。

五、存貯及運輸： 1、該產品應在防潮、無腐蝕的環境中存貯。 2、該產品可用一般運輸工具運輸。

Distributor: Hoho Medical 好好醫療用品
Unit L, 4/F, Golden Dragon Ind. Center, Blk 2, Tai Lin Pak Rd 162-170, Kwai Fong, Hong Kong
Tel.: +852 57170820 / +852 35680755
Fax: +852 30145799
info@hohomedical.com