



DiTonos

eufar
LíneaDental

Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

• **Descripción y uso**

Solución colorante reveladora de placa bacteriana.

La placa antigua se pigmenta de color azul oscuro y la placa nueva se pigmenta de color rosado intenso.

Aplicar 3 - 5 gotas en la boca y esparcir con la lengua por los dientes.

Dejar actuar por 10 segundos.

Enjuagar y verificar.

Esta presentación rinde para 50 aplicaciones.

• **Aspecto físico**

Líquido de color azul oscuro violáceo, inodoro, libre de partículas extrañas.

• **Ingrediente activo**

Eritrosina Sódica y Azul Brillante.

• **Presentación**

Gotero x 10 mL.

• **Vida útil**

3 años.

• **Riesgo**

I

• **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

• **Observaciones**

Uso por el higienista u odontólogo.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2021 DM-0006601-R1

Reg. (PER.) DM5602E

Reg. (ECU.) DM-1331-03-07

Reg. (BOL.) DI-46777/2017

Reg. (MEX.) 1633C2011 SSA

Reg. (NIC.) I04-270921-8979

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO
Fuente: Método Interno Eufar.