

TISSU-TRANS ® FILTRON 500cc, 1000cc, 2000cc

Steril Yağ Toplama ve Filtrasyon


3-TT-FILTRON 500, 1000, 2000

[STERİL] Dahil Olan Steril Ürünler:


- ◆ Filtreli Toplama Bidonu ve Atık Çıkarma Yeri
- ◆ Toplama Borusu 183 cm (6 fit) (tıbbi sınıf, sarı çizgili)
- ◆ Luer Lock uçlu 15 cm (6 inç) (tıbbi sınıf) Aktarım Tüpü

Ayrıca Gereken Standart Maddeler:

- ◆ Evrensel kenetli uzun bidon standı
- ◆ Bidon standını örtmek için steril Mayo stand örtüsü veya eşdeğer örtü
- ◆ Standart emme borusu
(0.65 cm veya 0.70 cm çaplı (1/4 ya da 5/16 inç)
- ◆ Atık bidonu
- ◆ Emme kaynağını yaklaşık 15 inç Hg.
(380 mm) veya % 50 güce ayarlayın
- ◆ 3 mm Toplama Kanülü
- ◆ Re-enjeksiyon Kanülü
- ◆ Aktarım ve re-enjeksiyon için Luer Lock şırıngaları

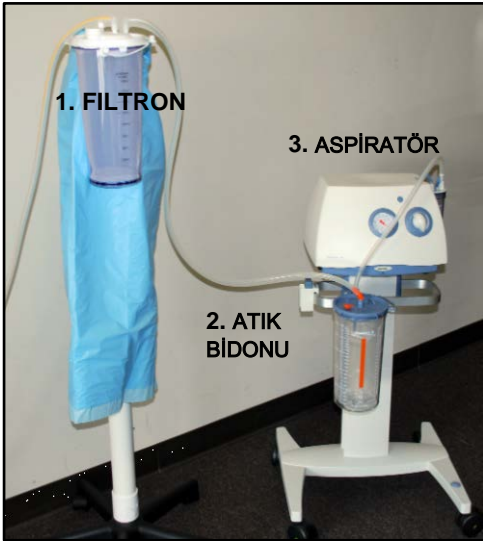

FILTRON liposuction sapı ve standart atık kutusu arasına boruyla bağlı olarak yerleştirilir.

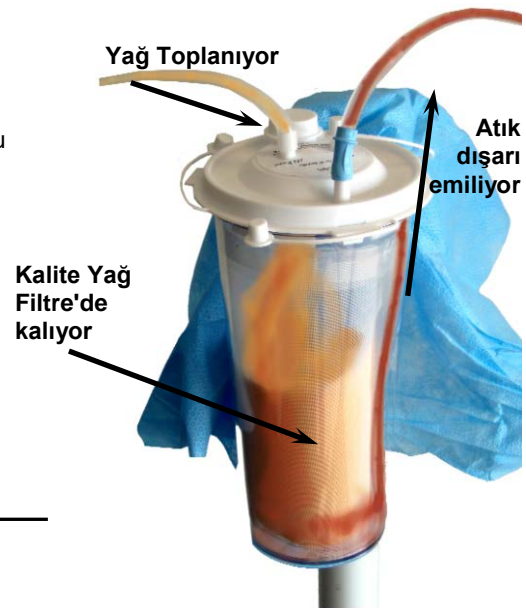


Kullanımdan önce notlar:



1. Tissu-Trans ® FILTRON sterilidir ve atılabilir. Bir hasta kullanımı içindir.
2. Ürün kullanıma hazırdır. **Bidonu veya kapağı açmayın.**
3. Dokunun hidrate olduğundan emin olun—aşırı yaş (superwet) şişik anestezi gibi.
4. FILTRON ve emme makinesi arasında bir standart atık bidonu **kullanmanız gerekir.** Toplama işlemi sırasında atıklar süzülerek atık kutusuna atılır.
5. 3 mm Toplama Kanülü **kullanılması önerilir.**
6. Toksik olmayan akış sağlamak için temin edilen tıbbi sınıfta borunun **kullanılması önerilir.**
7. Steril poşet yırtılmış veya delinmiş ise kullanmayın.

Talimatlar:

1. Steril bileşenleri çıkarın ve steril bir yüzeye yerleştirin.
2. Steril Mayo stand örtüsü (veya eşdeğer örtüyle) ile bidon standını örtün
3. Bidondaki şeffaf kenedi stand'daki evrensel yuvalara koyarak FILTRON'u bidon standına bağlayın. Sterilliği korumaya dikkat edin. **A**
4. Bidonun kapağındaki VAC portuna standart emme boruyu bağlayın. **B** Diğer ucunu atık bidonuna ve emme ucuna bağlayın.
5. Toplama boru bidona sarılır ve HASTA portuna bağlanır. Boruyu açıp gevşek ucunu Liposuction sapına ekleyin. **C** * Önerilen kanüle bakınız.

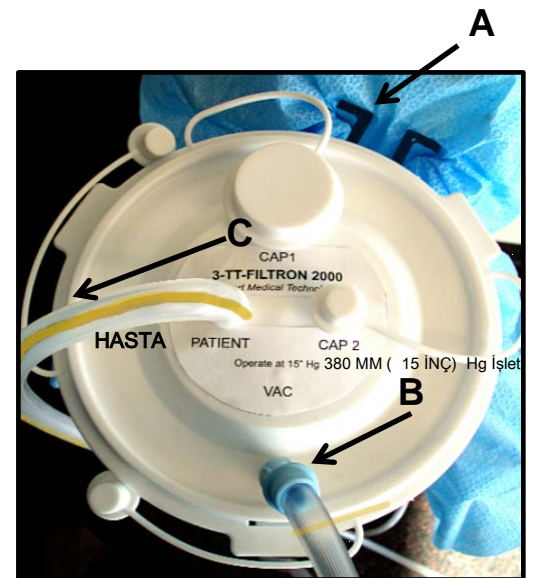

6. Emmeyi açın. Tüm bağlantıları kontrol edin. **Vakum basıncını 15 inç veya 380 mm Hg basınca ayarlayın.** D Sistemin doğru akışını sağlamak için steril serum ile test edilebilir.
7. **İstenen hacimde yağ toplayın.** Kalite yağ filtrede kalır ve atık bidonuna doğru atık emilir. Filtre'de kalan yağ reenjeksiyon için hazır olacaktır. *Aktarım sırasında düzgün akışını sağlamak için, filtreli yağda hala % 3-5 sıvı olabilir. Yağ şırıngalara aktarıldıktan sonra tekrar süzülerek kalan sıvı atılabilir.*

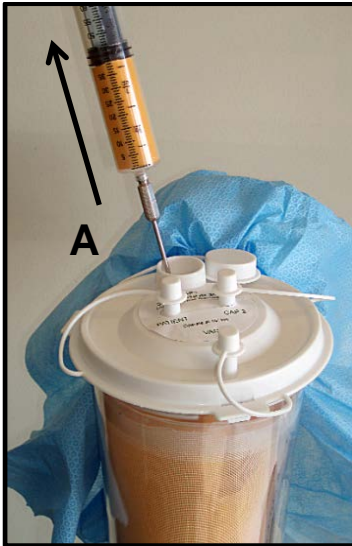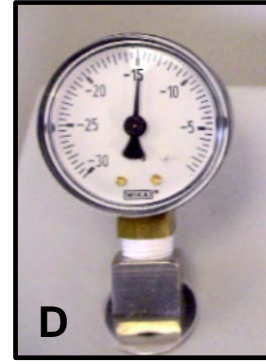


ÇIKARMA / AKTARIM Seçenek 1: Cihaz dik durumda kalır.

1. Emmeyi kapatın. Sterilliği koruyarak FILTRON kapağından boruları ayırın.
2. Tissu-Trans® kapağında, ekli kapaklar ile hem VAC hem de HASTA bağlantı portlarını kapatın. Tüm bağlantı portlar şimdi kapalı olmalıdır.
3. Büyük CAP1 portundan kapağı çıkarın.
4. Luer kilit şırıngasına aktarımı veya yeniden enjeksiyon kanülünü takın.
5. CAP1 Port içine kanülü takın ve tekrar enjekte edilecek yağı çekin. **A.** Ek şırıngalar ile işlemi tekrarlayın.
6. İstenilen hacim aktarıldıktan sonra bütün sistemi atın.
7. Re-enjeksiyon kanülünü takın. Yağ alıcı yere yeniden enjekte edilmek üzere hazırdır.



3-C-OP-3x30 FILTRON sistemlerden yağ çıkarmak için açık uçlu, eğimli aktarım kanülü. 3 mm x 30 cm

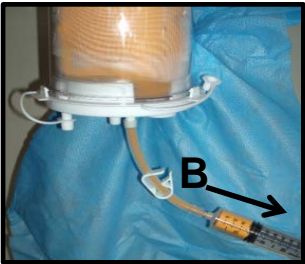

ÇIKARMA / AKTARIM Seçenek 2: Cihaz ters çevrilir.

1. Emmeyi kapatın. Sterilliği koruyarak boruları FILTRON kapağından ayırın. **HASTA**
2. Tissu-Trans® kapağında, ekli kapakla VAC portunu kapatın. HASTA hariç tüm portlar şimdi kapalı olmalıdır.
3. HASTA aktarma portuna Aktarım Borusunu takın. **A.** Aktarım Boru üzerinde beyaz kenedi kapatın. **Tüm bağlantı noktaları şimdi kapalı olmalıdır.**
4. Dikkatlice FILTRON'u ters çevirin.
5. Aynı kenedi kullanarak ters çevrilen bidonu standına takın.
6. Luer Lock şırıngayı aktarım Borusuna takın. Tutamaklı kenedi açarak çekilecek yağı çekin. **B** Ek şırıngalar ile işlemi tekrarlayın.
7. İstenilen hacim aktarıldıktan sonra bütün sistemi atın.
8. Re-enjeksiyon kanülünü takın. Yağ alıcı yere yeniden enjekte edilmek üzere hazırdır.

Standart tıbbi biyolojik tehlikeli atık kap içerisinde imha.





**CEpartner4U, Esdoornlaan 13
3951DB maarn HOLLANDA
www.cepartner4u.eu**



Uyarılar: 1. Bu cihaz, kendi başına önemli bir kilo kaybı sağlamaz. 2. Bu cihaz kronik sağlık sorunları olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. 3. Kan kaybı ve endojen vücut sıvı kaybının hacmi olumsuz içi ve / veya postoperatif hemodinamik stabilitesini etkileyebilir.

Önlemler: 1. Bu cihaz küçük kesiler yoluyla lokalize olan aşırı yağları alarak vücut hatlarının biçimini oluşturmak için tasarlanmıştır 2. Bu cihazın kullanılması emme lipoplasty yeterliliğe ulaşmış olan hekimlerle sınırlıdır. 3. Bu prosedürün sonuçları hastanın yaşı, cerrahi yeri ve hekimin deneyimine bağlı olarak değişecektir. 4. Bu prosedürün sonuçları kalıcı olabilir veya olmayabilir. 5. Çıkarılan yağ miktarı, arzu edilen bir estetik etkinin elde edilmesi için gerekli olan şekilde sınırlı olmalıdır. 6. Tekrar kullanılabilir tüm parçalar sterilize edilmeli ve tüm atılan bileşenleri her hasta için değiştirilmelidir.

Bu ürün, estetik vücut şekillendirme için aspire yağ toplanması için, temizlenmiş bir tıbbi dereceli pompa, boru ve kanüller ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yağ temizlenmiş bir enjeksiyon aparatı aracılığıyla yeniden enjekte edilebilir. Bu ürün otolog dokunun toplanması, aktarılması ve aspirasyonu için kullanılır. Yumuşak doku aspirasyonu istenilen branşlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yeniden kullanmayın ya da yeniden sterilize etmeyin. Tek hasta kullanımı içindir. Sadece tıbbi amaçla kullanılır. Sadece RX

Federal yasalar uyarınca bu cihazın satışı bir hekim tarafından veya onun talebi ile mümkündür.

