



Mode d'emploi du manche Biplane[®] à raccord Luer Lock ajustable

Le manche de liposuction Biplane[®] est un manche ergonomique de liposuction à raccord Luer Lock réglable qui permet le positionnement fixe de la canule de liposuction. La position des trous de la canule peut être positionnée exactement par le chirurgien.

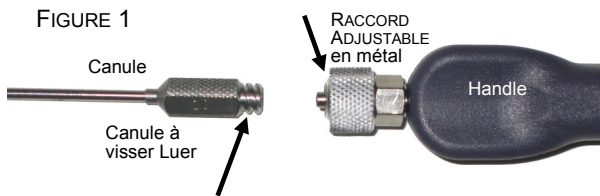

A. Se familiariser avec les parties du manche à raccord Luer Lock Biplane[®] et la canule Luer Lock. (Voir Figure 1)

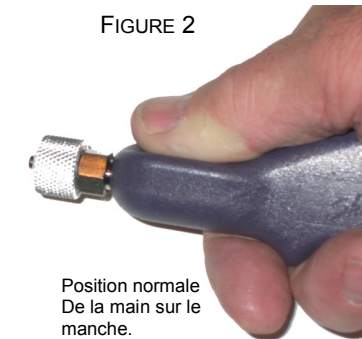


B. Prendre en main le manche[®] et le mettre en position de travail. (Voir Figure 2)

C. Faire glisser le pouce et l'index vers l'avant sur le bout du raccord Luer Lock. (Voir Figure 3)

D. De l'autre main, mettre en contact le bout Luer Lock de la canule avec le bout du raccord Luer Lock du manche Biplane.

Placer les trous dans la position désirée. Habituellement les trous sont positionnés vers le bas.

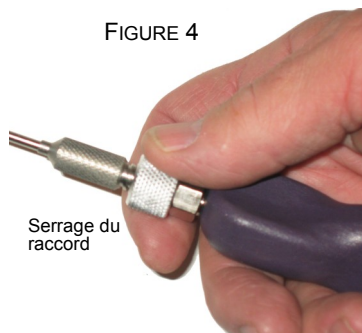

E. Avec le pouce et l'index, serrer le raccord pivotant dans le sens des aiguilles d'une montre. (Voir Figure 4). Cette action serre et verrouille le Luer. Resserrer manuellement ce raccord aussi fort que possible. **Ne pas utiliser de pinces ou d'autres instruments en métal qui puisse endommager le filet.**

F. Pour desserrer, faire pivoter le raccord dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et la canule dans l'autre sens.

Nettoyage : Laver et passer à l'autoclave le manche Biplane[®] et la canules après chaque patient.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

Phone: 303-754-0044 or 1-800-888-8663
Fax: 303-754-0318 or 1-800-284-0864
www.shippertmedical.com



Shippert Medical Technologies, Inc.

6248 South Troy Circle, Suite A

Centennial, CO 80111 USA

1-800-888-8663

Label PN
03L 1430 rev A