

Instructions pour le nettoyage et la stérilisation des canules

Chaque canule et/ou manche doit être :

- Immergé dans de l'eau savonneuse en employant un détergent adéquat.
- Soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur avec une brosse à canule pour enlever tous les résidus.
- Soigneusement rincé pour éliminer tous les déchets et détergents.
- Séché
- Emballé
- Stérilisé en suivant les instructions du fabricant, les procédés en vigueur dans votre pratique ou les procédés de l'industrie en général : stériliser à 265 - 270°F à 15 lb/ po2 pendant au moins 15 minutes.

Montage et utilisation des canules et manches

Canule LuerLock :

Connecter la canule LuerLock au manche et au tuyau du système d'aspiration ou au dispositif d'injection.

Canule avec manche "Biplane" ou en aluminium bleu :

Connecter le manche au tuyau d'aspiration ou au dispositif d'injection.

Manche "Biplane" ou en aluminium seul :

Fixer la canule LuerLock à l'extrémité LuerLock du manche.

Connecter le manche au tuyau d'aspiration du système.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

Phone: 303-754-0044 or 1-800-888-8663
Fax: 303-754-0318 or 1-800-284-0864
www.shippertmedical.com



Shippert Medical Technologies, Inc.

6248 South Troy Circle, Suite A

Centennial, CO 80111 USA

1-800-888-8663

Label PN
03L 1479 rev A