

Compresa Hidratante para el Ojo ACTIVADO MEDIANTE MICROONDAS

Bruder® húmedo Comprimir los ojos de calor con la tecnología patentada MediBeads®. Las moléculas de agua se absorben y almacenan continuamente desde el aire. Cuando el microondas, el agua se libera como calor húmedo limpio, terapéutico.

Preparación & Uso:

- Retire bastidores o soportes desde el interior del horno de microondas . Para ayudar a mantener el producto limpio , coloque en un plato y colocar en el plato giratorio de microondas .
- Iniciar el microondas durante 20 segundos . Para aumentar el calor , aumentará el tiempo en 10 segundos . No exceda de 30 segundos en total. Si reutilizado en 30 minutos , reducir el tiempo de calentamiento a la mitad. Para el tratamiento más eficaz , permiten 1 horas entre aplicaciones.
- Se recomienda un tratamiento de 10 minutos. Seguir siempre las instrucciones de su doctor.

Lavado:

Esperar 2 horas después de usarlo. LAVADO A MANO SOLAMENTE en AGUA FRIA con un detergente suave. Secar al aire durante al menos 24 horas antes de usarlo de nuevo. Lavar si se ha puesto en contacto con maquillaje, cremas, aceites, grasa ó comida.

Aviso importante:

- Siempre comprobar el nivel de temperatura, tocando con la compresa la parte posterior de la muñeca antes de colocarla sobre los ojos. Si la Compresa se siente demasiado caliente, esperar 1-2 minutos antes de aplicarla.
- Para ser efectiva, la Compresa debe estar confortablemente caliente, NO quemando.
- Después del tratamiento, puede notar su visión borrosa. Sus glándulas lacrimales están liberando fluido beneficioso. Esta sensación desaparecerá en unos minutos.
- La compresa debe ser aplicada suavemente.
- Si ha estado en contacto con cremas, maquillaje, aceites, grasas ó comida, lavar la Compresa siguiendo las instrucciones. Si se usa diariamente, debe reemplazarla después de 6 meses. Pregunte a su doctor ó farmacéutico sobre el tratamiento apropiado, si tiene diabetes, mala circulación ó piel sensible.

