

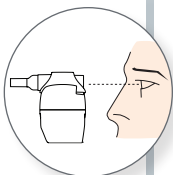


**Guía de inicio rápido:
Instrucciones de uso**


1 Examine el dispositivo.

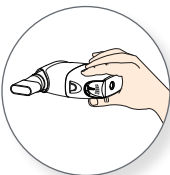


2 Seleccione cualquier orientación.

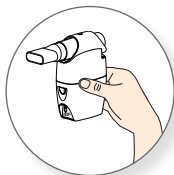

3 Inserte la boquilla.

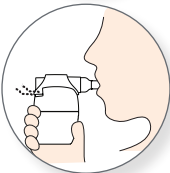

4 Inhale y profundamente y contenga la respiración durante 2 a 3 segundos.

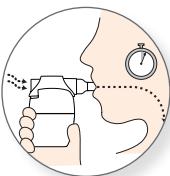


Estas son instrucciones de uso abreviadas; recuerde leer las instrucciones completas incluidas con el sistema de tratamiento PEPO AEROBIKA[®].


**DISPOSITIVO DE PRESIÓN
ESPIRATORIA POSITIVA
OSCILANTE (PEPO) AEROBIKA[®]**


Vea el video instructivo en monaghanmed.com

5 Exhale durante un tiempo 3 a 4 veces más largo que la inhalación.

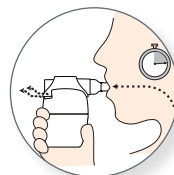

6 Continúe durante 10 a 20 respiraciones o según las instrucciones de su proveedor de atención médica. Tosa 2 o 3 veces como para despejar la garganta, a fin de despejar la vía respiratoria.

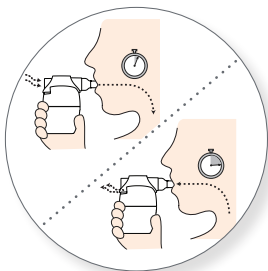


7 Repita los pasos 3 a 6 durante 10 a 20 minutos o en la forma prescrita.




Guía de inicio rápido: Instrucciones de limpieza

Si mantiene su dispositivo de acuerdo con las instrucciones, puede usarse hasta por 12 meses.



1 Presione las lengüetas para desenganchar.

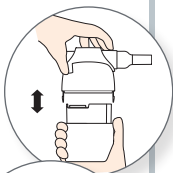

2 Retire el cartucho de la válvula y la boquilla.

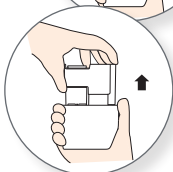

3 Remoje durante 15 minutos en agua jabonosa, agite suavemente y enjuague.

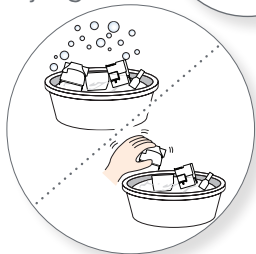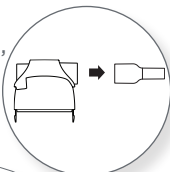

Estas son instrucciones de limpieza abreviadas; recuerde leer las instrucciones completas incluidas con el sistema de tratamiento PEPO AEROBIKA[®].

DISPOSITIVO DE PRESIÓN ESPIRATORIA POSITIVA OSCILANTE (PEPO) AEROBIKA[®]



Vea el video instructivo en monaghanmed.com


4 Sacuda para eliminar el agua y seque verticalmente. O coloque en la rejilla superior de una máquina lavaplatos después de realizar las instrucciones de limpieza 1 y 2.



Encontrará las instrucciones para máquina lavaplatos en las instrucciones completas incluidas con el sistema de tratamiento PEPO AEROBIKA[®].



5 Vuelva a armar el dispositivo.

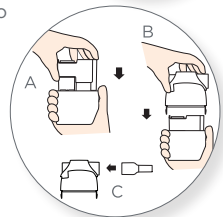

LIMPIEZA MENSUAL

El agua corriente puede dejar una acumulación de minerales en su dispositivo. Para eliminarla, sumerja el dispositivo desarmado en una solución de una 1 taza de vinagre y 1 taza de agua durante 1 hora, luego, lave normalmente.