

InsuJet™

(قرب إلب) نيلوس نألل ثافنل نل نل مرادخت سا مراظن

حلقة الراحة InsuJet™ معلومات

- يرجى قراءة كتيب تعليمات الاستخدام بالكامل والموجود داخل حزمة إنسو جيت™ قبل استخدام جهاز إنسو جيت™.
- احتفظ بالنسخة الأصلية من تعليمات استخدام إنسو جيت™ في مكان آمن.

InsuJet™
Comfort ring

- لحقن مريح
- متوافق مع فوهة InsuJet
- أقصى استخدام: 56 استخدامًا أو 14 يومًا (أيهما يأتي أولاً).

دليل الرموز

جهاز طبي



راجع تعليمات الاستخدام



تحذير



الصانع



حدود درجة الحرارة



رقم الكatalog



رقم الدفعة




European Pharma Group BV

Euro Offices Building 3rd Floor
Beechavenue 127, 1119 RB Schiphol-Rijk,
The Netherlands




017403-EN-3.0
8 November 2021

www.insujet.com | info@insujet.com

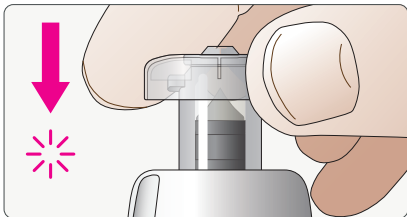

P/N: 01223

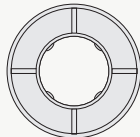


التحذيرات والاحتياطات



• استبدل حلقة الراحة في كل مرة تقوم فيها باستبدال رأس الحقن InsuJet ، كل 14 يومًا أو 56 حقنة ، أيهما يأتي أولاً.

• ملاحظة: لدواعي النظافة العامة، يجب الحرص على عدم لمس طرف رأس الحقن بأصابعك عند تثبيت حلقة الراحة.

• حدود درجة الحرارة للاستخدام

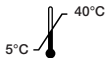

• ملاحظة: تخلص منها مع النفايات المنزلية العادية

حلقة الراحة InsuJet™ هي أحد ملحقات إنسوجيت™. فمن المستحسن استخدام حلقة الراحة، في حال كنت تشعر بعدم الراحة عند دفع رأس الحقن باتجاه الجلد

لتثبيت حلقة الراحة، امسك الجهاز من الجهة الأمامية وضع حلقة الراحة أعلى رأس الحقن. تأكد من أن الجانب المستدير من هذا الجزء يواجه الجانب الخارجي. ادفع حلقة الراحة على رأس الحقن حتى تسمع صوت نقرة مما يعني أنه قد استقر في مكانه المناسب.