

## InsuJet™ Aro de confort Instrucciones de uso

- Lea el folleto de instrucciones de uso completo que contiene el paquete InsuJet™ antes de usar el sistema InsuJet™.
- Conserve las instrucciones de uso originales del InsuJet™ en un lugar seguro.

### InsuJet™ Aro de confort

- Para una inyección cómoda.
- Compatible con la boquilla InsuJet™.
- Uso máximo: 56 usos o 14 días (lo que ocurra primero).

## Legenda de símbolos

**MD**

DISPOSITIVO MÉDICO



CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DE USO



PRECAUCIÓN



FABRICANTE



LÍMITES DE TEMPERATURA

**REF**

NÚMERO DE CATALOGO


**LOT**

NÚMERO DE LOTE



FECHA DE CADUCIDAD


## Uso del aro de confort InsuJet™

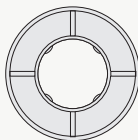

NP: 01223  
(no estéril)

El aro de confort InsuJet™ es un accesorio InsuJet™. Se recomienda utilizar un aro de confort en caso de que sienta molestias al presionar la boquilla contra la piel.

Para instalar el aro de confort, sujete el dispositivo por la parte delantera y coloque el aro de confort sobre la boquilla. Asegúrese de que la parte redondeada del aro de confort quede hacia fuera. Presione el aro de confort sobre la boquilla hasta que quede encajado en su sitio.

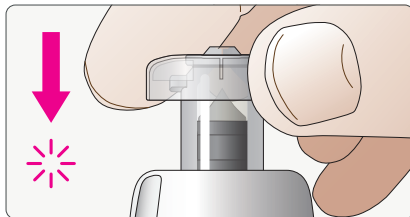

## Advertencias y precauciones

- Reemplace el anillo de confort cada vez que reemplace la boquilla InsuJet, cada 14 días o 56 inyecciones, lo que ocurra primero.
- Tenga cuidado de no tocar la punta de la boquilla cuando instale el Comfort Ring.

### NOTAS:

- Elimine con la basura doméstica normal.
- Límites de temperatura para el uso

