

InsuJet™ Informazioni sull'anello di comfort

- Prima di utilizzare il sistema InsuJet™, leggere l'intero libretto delle istruzioni per l'uso presente nella confezione del sistema InsuJet™.
- Conservare le istruzioni per l'uso originali del sistema InsuJet™ in una custodia sicura.

InsuJet Anello di comfort

- Per un'iniezione confortevole
- Compatibile con l'ugello InsuJet
- Utilizzo massimo: 56 utilizzi o 14 giorni (a seconda dell'evento che si verifica per primo).

Legenda dei simboli



DISPOSITIVO MEDICO



CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE



FABBRICANTE



LIMITI DI TEMPERATURA



NUMERO DI CATALOGO




NUMERO DI LOTTO




DATA DI SCADENZA

Utilizzo dell'anello di comfort InsuJet™

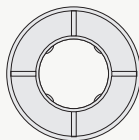

P/N: 01223
(non sterile)

L'anello di comfort InsuJet™ è un accessorio InsuJet™. Si consiglia di utilizzare un anello di comfort, nel caso in cui si avverta fastidio quando si spinge l'erogatore contro la pelle. Per installare l'anello di comfort, tenere il dispositivo dalla parte anteriore e mettere l'anello di comfort sulla parte superiore dell'erogatore. Assicurarsi che la parte arrotondata dell'anello di comfort sia rivolta verso l'esterno. Spingere l'anello di comfort sulla parte superiore dell'erogatore fino a farlo scattare in sede.

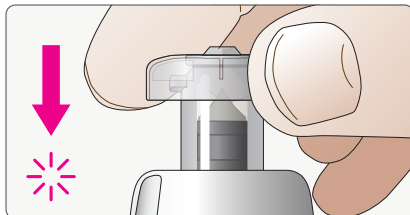

Avvertenze e Precauzioni

- Sostituisci il Comfort Ring ogni volta che sostituisci l'ugello InsuJet, ogni 14 giorni o 56 iniezioni, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
- Fare attenzione a non toccare la punta dell'ugello durante l'installazione del Comfort Ring.

NOTE:

- Smaltire con i normali rifiuti domestici
- Limiti di temperatura per l'uso:

