

Legenda simbolurilor



Dispozitiv medical



Consultați instrucțiunile de
utilizare



Atenție



Producător



Limitele de temperatură



Număr de catalog



Număr de lot



Data limită de utilizare



European Pharma Group BV

Euro Offices Building 3rd Floor

Beechavenue 127, 1119 RB Schiphol-Rijk,

The Netherlands

www.insuJet.com | info@insuJet.com



017403-RO-4.0

24 Jan.2023

Copyright © European Pharma Group BV

insuJet™

Sistem InsuJet™ de injectare a insulinei

fără întâmpinare


Instrucțiuni de utilizare a inelului pentru confort InsuJet™

- Vă rugăm să citiți în întregime ghidul cu instrucțiunile de utilizare din pachetul InsuJet™, înainte de a utiliza sistemul InsuJet™.
- Păstrați în siguranță instrucțiunile de utilizare InsuJet™ originale.

Inel pentru confort InsuJet™	Pentru o injectare confortabilă <ul style="list-style-type: none">• Compatibil cu duza InsuJet™• Nr.max.de utilizări:56 de utilizări sau 14 zile (oricare dintre situații survine mai întâi).
------------------------------------	--




Utilizarea inelului pentru confort InsuJet™

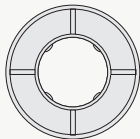

P/N:01223
(nesteril)

Inelul pentru confort este un accesoriu InsuJet™. Se recomandă folosirea unui inel pentru confort, în cazul în care simțiți disconfort atunci când împingeți duza pe piele.

Pentru a instala un inel pentru confort, țineți dispozitivul de partea frontală și așezați inelul pentru confort pe vârful duzei. Asigurați-vă că partea rotundă a inelului pentru confort este orientată spre exterior.

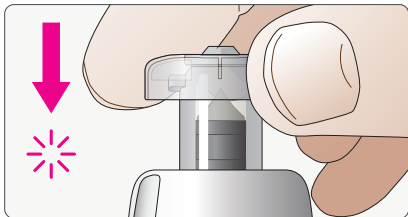

Împingeți inelul pentru confort deasupra duzei până când se fixează în poziție.



Avertismente și precauții

- Înlocuiți inelul pentru confort de fiecare dată când înlocuiți duza InsuJet, la fiecare 14 zile sau la fiecare 56 de injecții, oricare dintre situații survine mai întâi.
- Aveți grijă să nu atingeți vârful duzei când instalați inelul pentru confort.

Observații:

- Eliminați-l împreună cu deșeurile menajere obișnuite
- Limitele de temperatură pentru utilizare

