

## T4 Waarschuwingen

### T5

- Laat de InsuJet™-injector of de verbruiksartikelen niet vallen.
- De InsuJet™ dient alleen te worden gebruikt voor toediening van U-100 insuline.
- De InsuJet™ mag alleen worden gebruikt met InsuJet™-spuitstukken en -koppelstuk.
- Controleer de houdbaarheidsdatum van uw insuline. Gebruik geen insuline na de vervaldatum.
- Controleer vóór het gebruik de vervaldatum op de verpakking. Gebruik nooit artikelen waarvan de vervaldatum is verstreken.
- Controleer vóór het openen de verpakking van de gebruiksartikelen. Gebruik geen spuit- of koppelstukken uit een beschadigde verpakking.
- Gebruik nooit hetzelfde spuitstuk voor verschillende typen insuline.
- Gebruik nooit hetzelfde patroon- of injectieflacon Adapter voor verschillende insulinepatronen of injectieflacons. Gooi het koppelstuk weg met de lege insulinepatroon of injectieflacon.
- Zorg ervoor dat u de naald in het koppelstuk niet aanraakt.
- Leeg de InsuJet™ nooit zonder dat er een spuitstuk is bevestigd of er lucht in het mondstuk zit. Dit wordt DRY-FIRING genoemd en kan het apparaat onherstelbaar beschadigen.
- Bewaar geen insuline in het spuitstuk. Het spuitstuk is alleen bedoeld om direct voor de injectie te worden gevuld.
- Vervang het spuitstuk wanneer de InsuJet™ langer dan 3 dagen niet is gebruikt.

- Gebruik nooit hetzelfde spuitstuk of dezelfde patroon of injectieflaconkoppelstuk voor verschillende patiënten. Het gebruik van hetzelfde apparaat voor meerdere patiënten kan leiden tot de directe overdracht van bacteriën, virussen of andere ziektekiemen van de ene persoon naar de andere

- Toezicht door een volwassene wordt sterk aanbevolen wanneer een kind de InsuJet™ gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen wordt verteld dat de InsuJet™ geen speelgoed is.


- Houd alle medicijnen en injectieapparaten buiten het bereik van kinderen.

- Gebruik of probeer nooit een beschadigde of kapotte InsuJet™ of verbruiksartikelen te repareren.

- Als de hygiënepraktijken niet worden gevolgd, kunnen de verbruiksartikelen tijdens het gebruik worden besmet, wat mogelijk kan leiden tot infecties.

- Indien zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het apparaat, dient dit te worden gemeld aan EPG BV en de [toepasselijke bevoegde autoriteit] in [toepasselijk land]

- Temperatuurlimieten voor gebruik:

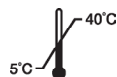


### Goede hygiënepraktijken


- Was uw handen grondig voordat u de InsuJet™ gebruikt.
- Reinig de injectieplaats zoals voorgeschreven door uw diabeteszorgspecialist.
- Vermijd onnodig contact met de spuitpunt of de delen van de verbruiksartikelen die in contact komen met de insuline. Houd tussen gebruik altijd het spuitstuk en de koppeldoppen op. Dit voorkomt mogelijke besmetting.

### T40

## InsuJet™- spuitstuk vervanging en installatie

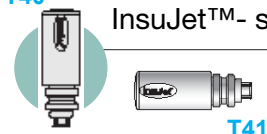


Maximaal **56 injecties**, of **14 dagen** gebruik. (wat het eerst komt)

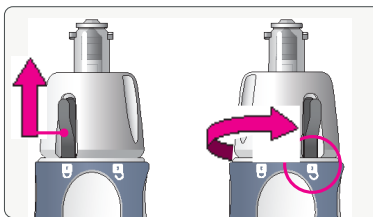


### T42

Duw het spuitstuk vergrendelingsschakelaar omhoog en draai het spuitstukvergrendeling totdat de schakelaar naar de 'ontgrendelde' positie wijst.

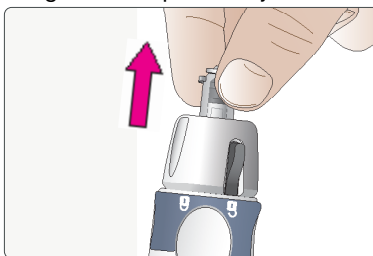


### T43

Trek het spuitstuk met een stevige, rechte trek uit de InsuJet™.

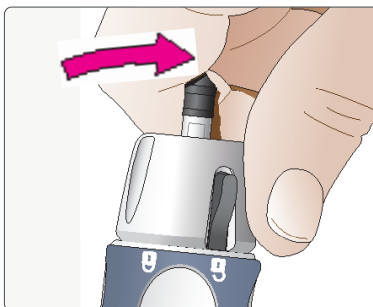


### T44

Maak het interne deel van het spuitstuk los door het stevig opzij te duwen.

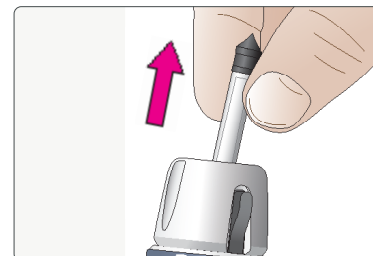


### T45

Verwijder het interne deel van het spuitstuk en gooi het samen met het spuitstuk weg.

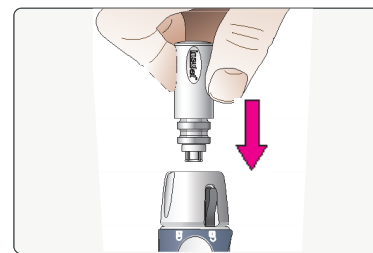

### T46

Duw het spuitstuk stevig in het spuitstukslot.

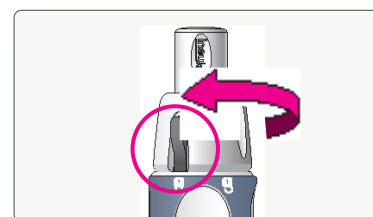

### T47

Zodra u het spuitstuk volledig hebt ingebracht, draait u de spuitstukvergrendeling totdat de schakelaar naar de 'vergrendelde' positie wijst.

### T55

## Symbol legenda

T56 RAADPLEEG HANDLEIDING

T57 LET OP

T58 FABRIKANT

T59 PARTIJNUMMER

T60 VERVALDATUM

T61 GESTERILISEERD DOOR MIDDEL VAN ETHYLEENOXIDE

T62 TEMPERATUURLIMITEN

T63 NIET GEBRUIKEN INDIEN DE VERPAKKING IS BESCHADIGD

T64 NIET OPNIEUW STERILISEREN

T65 NIET PYROGEEN

T66 EEN PERSON-MEERVOUDIG GEBRUIK

T67 NIET VAKER DAN 56 KEER HERGEBRUIKEN

T68 NIET LANGER GDAN 14 DAGEN HERGEBRUIKEN

T69 MEDISCH APPARAAT

T70 ENKEL STERIEL BARRIÈRESYSTEEM

T71 UNIEKE APPARAAT-ID

T72 GEKALIBREERD VOOR GEBRUIK VAN U-100 INSULINE



Euro Offices Building 3rd Floor  
Beechavenue 127,  
1119 RB Schiphol-Rijk,  
Nederland

www.insujet.com | info@insujet.com

Copyright © European Pharma Group BV



017303-NL-8.0  
3 nov. 2021

T75

# InsuJet™

Naaldloos insuline toedieningsysteem

### T2

## Informatie gebruiksartikelen




### T3

- Deze verpakking bevat steriele gebruiksartikelen bestemd voor gebruik met het InsuJet™ toedieningsysteem.
- Lees alstublieft de volledige handleiding, voordat u het InsuJet™ systeem voor de eerste keer gaat gebruiken.
- Bewaar de originele InsuJet™ handleiding zorgvuldig.
- Deze verpakking bevat één type van de bovengenoemde gebruiksartikelen.



## T6 Productoverzicht

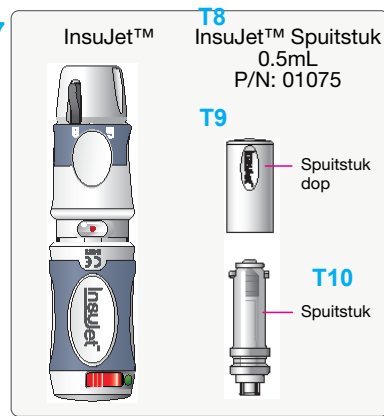

## T19 De verbruiksartikelen voorbereiden


### T20

### T21 Kies uw InsuJet™-adapter


Er zijn twee soorten koppelstukken beschikbaar voor de InsuJet™. Deze koppelstukken worden gebruikt om de insuline van een insulinepatroon of insulineflacon naar het spuitstuk te transporteren.

- T22**
- Gebruik een 3 ml-koppelstuk als u insuline wilt gebruiken uit een insulinepatroon van 3 ml of uit een voorgevulde wegwerpen.
  - Als u insuline uit een injectieflacon van 10 ml wilt gebruiken.

## T27 Koppelstuk van 3 ml met wegwerpinsulinepen

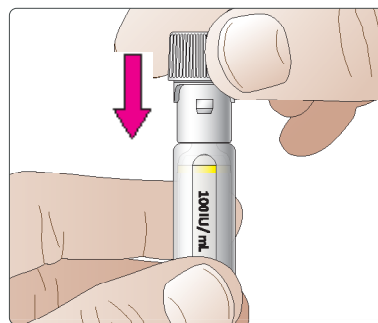

**T28** Neem de 3 ml-koppelstuk en plaats deze boven op de insulinepen voor eenmalig gebruik. Duw de koppelstuk stevig op de insulinepen totdat deze vastzit.

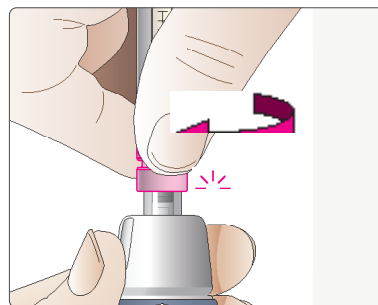


- T29** Lijn het koppelstuk uit met het spuitstuk en draai de koppelstuk stevig met de klok mee op het spuitstuk.
- T30**


### KENNISGEVING:

Wanneer u de koppelstuk en de insulinepen voor eenmalig gebruik op het spuitstuk bevestigt, moet u ervoor zorgen dat u het koppelstuk vasthoudt wanneer u deze op het spuitstuk draait.

## T31 Een 3 ml-koppelstuk installeren met patroon

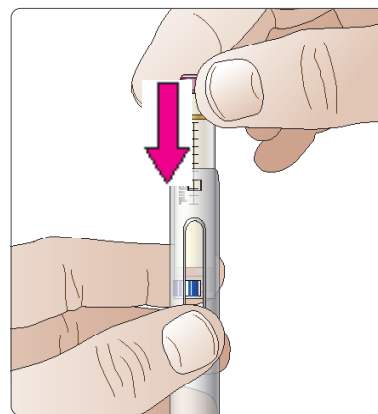


- T32** Schuif de patroon van 3 ml in de houder, met de onderkant van de patroon naar beneden.

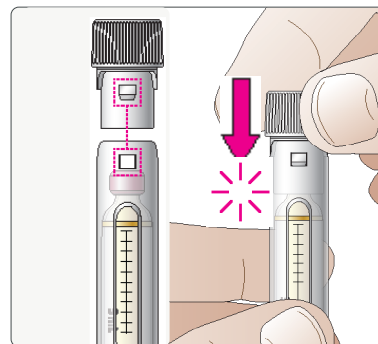


- T33** Pak de koppelstuk en lijn de uitsteeksels uit met de overeenkomstige gaten in de houder.
- T34** Druk stevig totdat het koppelstuk op zijn plaats klikt. Het koppelstuk blijft op de houder.

## T35 Een 10 ml-koppelstuk met flacon installeren

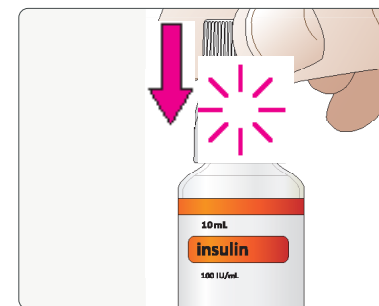


- T36** Verwijder de beschermkap van de insulineflacon.
- T37** Duw de 10 ml-koppelstuk stevig op de injectieflacon totdat het koppelstuk op zijn plaats klikt. De adapter blijft op de injectieflacon.

## T38 Aansluiten van het koppelstuk naar het spuitstuk

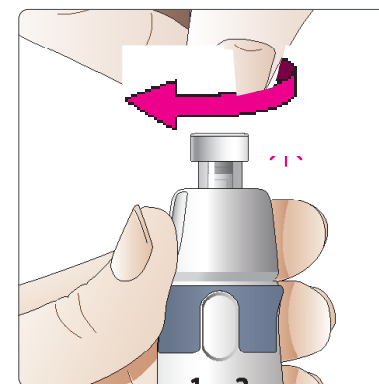


- T39** Lijn het koppelstuk uit met het spuitstuk en draai het koppelstuk stevig met de klok mee op het spuitstuk.

## T48 Opslag en onderhoud

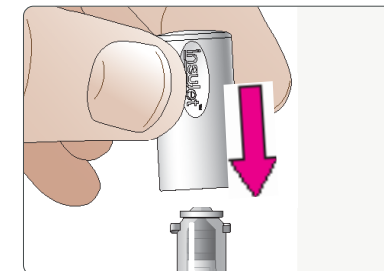


- T49** Om de accessoires tussen gebruik schoon te houden, plaatst u na gebruik altijd de hoezen terug.
- T50** Verwijder de Comfort Ring en plaats het spuitstuk dop terug op het spuitstuk.

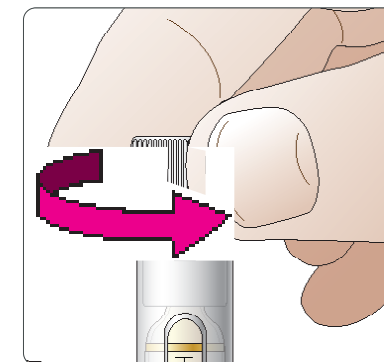

- T51** Plaats koppel dop terug op het koppelstuk.
- T52** Beschikbaarheid

- T53** • Alle producten kunnen bij het gewone huisvuil worden weggegooid.
- T54** • Gooi de patroon/flacon koppelstuk samen met elke lege insulinepatroon/flacon weg.

## T14 T12

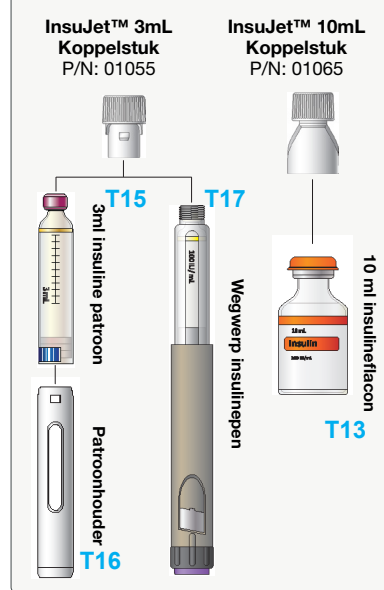

- T18** Voorbeeld van het gebruik van InsuJet-koppelstukken voor 3 ml insulinepatroon, wegwerp penfill of 10 ml insulineflacons.