



dline Phosphoric Acid Etching Gel

Phosphorsäure-Ätzel zum Ätzen von Schmelz und Dentin und zur Vorbereitung von Oberflächen



GEBRAUCHSANWEISUNG

DE

BESCHREIBUNG

dline Phosphorsäure-Ätzel ist ein 37% iges thixotropes Phosphorsäuregel mit optimaler Viskosität. Die Spritzenpräsentation mit speziellen Spitzen ermöglicht das Platzieren des Ätzelns an einem beliebigen Ort.

GEBRAUCHSANWEISUNG

HINWEIS! Nicht verwenden, wenn die Primärverpackung beschädigt ist. Es wird empfohlen, während der Anwendung des Produkts Kofferdamm zu verwenden.

VORBEREITUNG:

1. Bereiten Sie die Oberfläche wie immer vor. Der Arbeitsbereich muss trocken gehalten werden.
2. Wenn die zu ätzende Oberfläche nicht frisch exponiert ist, wird die Reinigung mit ölfreier Prophylaxepaste wie dline Prophy Paste empfohlen.
3. Bringen Sie den Spitzenapplikator an der Spritze an.
4. Fließen Sie eine kleine Menge Gel auf dem Mischpad.

ÄTZEN:

1. Drücken Sie vorsichtig den auf Kolben und tragen Sie die Ättschicht auf der gesamten zu ätzenden Oberfläche auf. Drücken Sie den Kolben nicht mit Gewalt.
2. Lassen Sie das Ätzel 15 Sekunden (Dentin) und 30 Sekunden (Schmelz) an Ort und Stelle.
3. Mit Wasser spülen und mit Luft trocknen.
4. Stellen Sie sicher, dass die geätzte Oberfläche sauber und trocken ist.
5. Verwenden Sie einen Klebstoff wie dline Light Curing Adhesive.

WARNINGS AND PRECAUTIONS!

HINWEIS! Verwenden Sie dline Phosphorsäure-Ätzel nicht, wenn der Patient allergisch gegen das Produkt oder einen der sonstigen Bestandteile ist.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

dline Phosphorsäure-Ätzel enthält Phosphorsäure, die Hautkorrosion, schwere Hautverätzungen und Augenschäden verursacht. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Lassen Sie den Betroffenen sofort 1 - 2 Gläser Wasser trinken. Versuchen Sie nicht, mit Basen oder Kohle zu neutralisieren. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht zu machen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Prävention:

Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

LAGERUNG

An einem trockenen, gut gelüfteten Ort bei 4-28 ° C dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Inhalt / Behälter entsprechend den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Von Kindern fern halten!

VERANTWORTUNG DER HERSTELLER

Unsere Produkte wurden für den professionellen Einsatz in der Zahnheilkunde entwickelt. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, trägt der Benutzer die volle Verantwortung für die Anwendung. Selbstverständlich garantieren wir die Qualität unserer Produkte gemäß den geltenden Normen.

VERPACKUNG

REF 20040	4.3g Spritze, 5 tips
REF 20120	12g Spritze, 10 tips
REF 20450	42g Spritze, 2x4.3g Spritzen, 20 tips
REF 20043	4x4.3g Spritzen, 20 tips

Made in EU for Dline OU
www.dline.ee



UAB „Medicinos linija“
Karaliaučiaus str. 29
LT-78348 Šiauliai
Lithuania

Letzte Revision: 2016-11