



Anime a sus paciente a unirse a Despierte para Wake Up to Sleep—la comunidad de apoyo de la apnea del sueño de ResMed—en WakeUpToSleep.com/Join.

Swift FX Nano



- Asegúrese de que la parte inferior del orificio de la almohadilla está alineada con la parte inferior de su nariz, entonces coloque la mascarilla sobre la misma.
- Luego pase el arnés sobre su cabeza de modo que quede a la mitad de la distancia entre sus orejas y sus ojos.



- Ajuste la posición de la correa superior, una muesca a la vez, hasta que la mascarilla quede cómodamente sobre su nariz. No apriete demasiado.
- CONSEJO:** Si la almohadilla está presionando mucho la parte inferior de su nariz, afloje la correa superior.



- La correa posterior debe descansar arriba de las orejas en la parte posterior de la cabeza.
- Ajuste ambos broches en la correa posterior de tela al mismo tiempo.
- Asegúrese de que la correa lateral descansa sobre su cabello.



- Asegúrese de que la mascarilla selle cómodamente.
- CONSEJO:** Cuando ajuste la mascarilla en caso de fuga, ajuste la correa posterior



- Ajuste la almohadilla nasal hasta que quede cómodamente sobre su nariz.
- Conecte el extremo libre del conjunto del tubo corto al tubo de aire de su dispositivo, y enciéndalo.



- Si el aire se fuga, revise dónde está la misma y ajuste la correa posterior.
 - Ahora estará lista para usarse.
- CONSEJO:** Para un óptimo funcionamiento, use el tubo en posición descendente.



Fundas suaves **opcionales**

- Envuelva cada lado del arnés con una de las fundas blandas, doblando el cierre superior sobre el inferior.
- Las fundas blandas deben ubicarse sobre las mejillas, con los cierres hacia el exterior.

Nota: Para obtener más información, consulte el manual del usuario de la mascarilla nasal Swift FX Nano.



Escaneé el código para tener acceso a videos de colocación y cuidado.
www.resmed.com/SwiftFXNanoVideos



S9 Series
More. Comfort.

Combine una mascarilla Swift FX Nano con un dispositivo de tratamiento S9 AutoSet™ de ResMed para obtener un sistema cómodo, silencioso que siga su estilo de vida.

Swift™ FX Nano
MASCARILLA NASAL

ResMed.com/SwiftFXNanoVideos

Swift™ FX Nano

Pequeña de tamaño, grande de comodidad



La mascarilla nasal Swift FX Nano combina el diseño abierto y estilizado de las almohadillas nasales para los pacientes que prefieren la comodidad de la respiración natural de una mascarilla nasal.

Swift™ FX Nano
MASCARILLA NASAL

ResMed.com/SwiftFXNanoVideos

Swift FX Nano

Los pacientes, especialmente aquellos que recién inician el tratamiento con CPAP, generalmente buscan los sistemas de mascarillas más pequeñas y menos molestas. La tecnología de la mascarilla Swift FX Nano nos permite eliminar los armazones rígidos y el incómodo soporte para la frente que se usa tradicionalmente en las mascarillas nasales, sin afectar su funcionamiento. El resultado es una mascarilla nasal que le ofrece lo mejor de dos mundos: un diseño minimalista semejante a las almohadillas nasales, otorgando un tratamiento confiable para lograr una mayor comodidad y cumplimiento.

Ideal para los pacientes

Diseñada para agradar de inmediato a los pacientes, la mascarilla Swift FX Nano también es fácil de usar y limpiar, permitiéndoles leer, usar anteojos o ver televisión y les ayuda a dormir cómodamente toda la noche.

Ideal para su negocio

El diseño sencillo y compacto de la mascarilla Swift FX Nano ayuda a disminuir la ansiedad del paciente al principio, aumentando la probabilidad de que cumplan el tratamiento. Y gracias a su increíblemente sencilla colocación y mantenimiento, usted pasará menos tiempo solucionando los problemas y respondiendo las llamadas de los pacientes.

La mascarilla Swift FX Nano para Ella tiene un arnés estilizado y un tamaño pequeño de almohadilla especialmente para las mujeres

Aرنés de colocación rápida de dos puntos

con muescas de ajuste sencillas en la correa superior que el paciente puede ajustar una vez y olvidarse de él



Las fundas suaves opcionales

proporcionan comodidad superior y una defensa adicional contra las marcas en la cara

La almohadilla de doble pared modificada

de gran elasticidad proporciona un sellado estable y cómodo, disminuyendo las fugas

El codo esférico liso

se mueve con libertad en cualquier ángulo y dirección para proporcionar un sellado estable, disminuir la tensión del tubo y aumentar la libertad al dormir

Diseño de ventilación silenciosa

que dispersa el aire alejándolo del paciente y de su pareja

El tubo elástico y flexible con doble pieza giratoria

disminuye la tensión en la mascarilla para adaptarse a las diferentes posiciones para dormir


Las correa posterior de tela SoftEdge™ es suave y cómoda, con broches de ajuste rápido

Indicadores mejorados de tamaño y nombre que identifican claramente el tamaño y la orientación correcta de la mascarilla

El broche de fijación permite fijar y liberar fácilmente el arnés

Las pestañas de la almohadilla proporcionan flexibilidad total para compensar los movimientos adicionales durante el sueño

Componentes de Swift FX Nano y Swift FX Nano para Ella

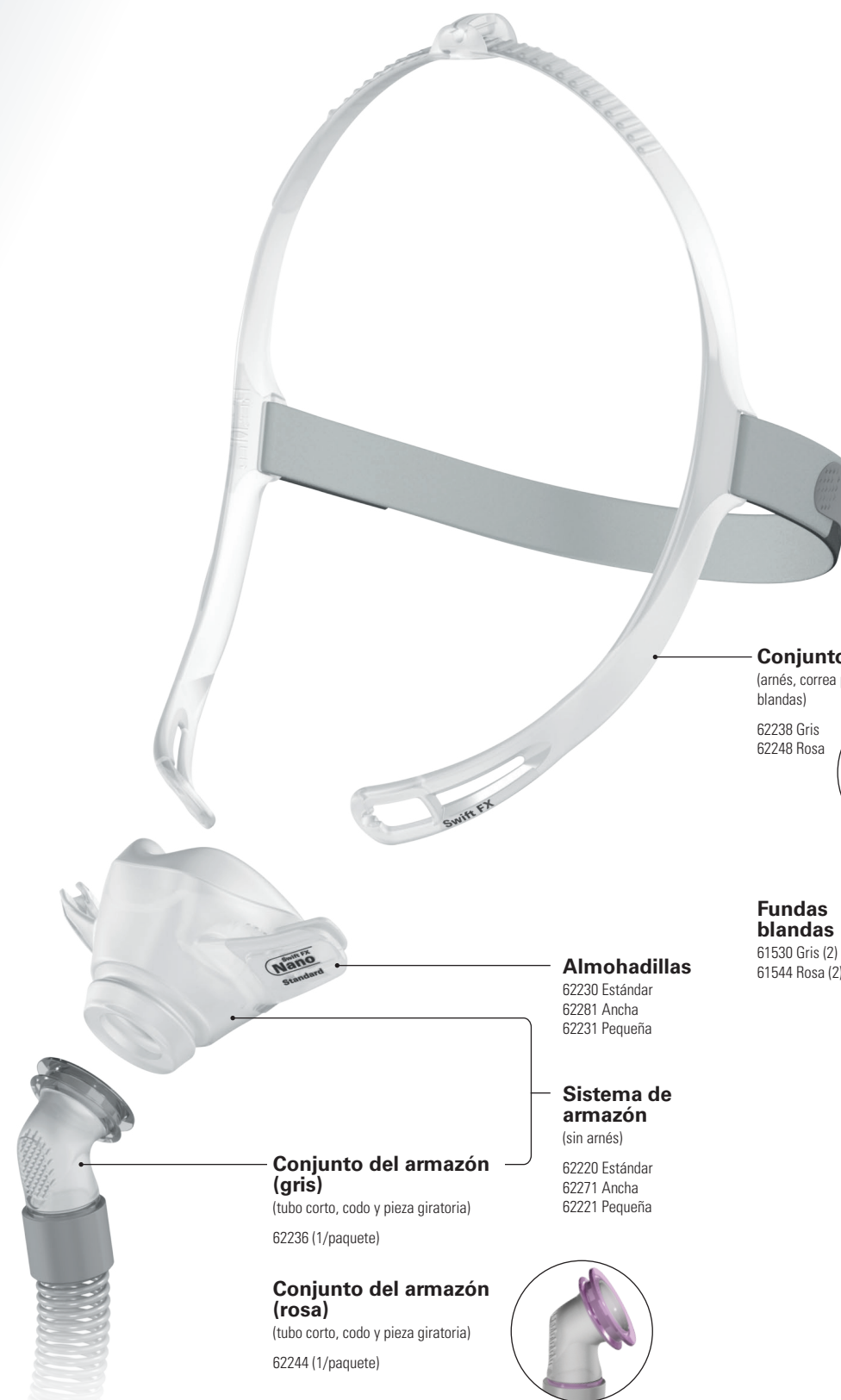

Conjunto del arnés

(arnés, correa posterior y fundas blandas)

62238 Gris
62248 Rosa



Fundas blandas

61530 Gris (2)
61544 Rosa (2)



Almohadillas

62230 Estándar
62281 Ancha
62231 Pequeña

Sistema de armazón

(sin arnés)
62220 Estándar
62271 Ancha
62221 Pequeña

Conjunto del armazón (gris)

(tubo corto, codo y pieza giratoria)
62236 (1/paquete)

Conjunto del armazón (rosa)

(tubo corto, codo y pieza giratoria)
62244 (1/paquete)



Swift™ FX Nano
MASCARILLA NASAL

ResMed.com/SwiftFXNanoVideos