

## Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES

### Guía de colocación



1

- Sostenga las almohadillas a la altura de la nariz y póngase el arnés tirando de él por encima de la cabeza.
- El arnés debe quedar apoyado a mitad de camino entre las orejas y los ojos.



2

- Ajuste la correa superior en primer lugar.
- Pase la correa por la hebilla, una muesca a la vez.
- No la deje demasiado tirante.



3

- Ajuste la correa posterior para obtener un ajuste más preciso, de ser necesario.
- No la deje demasiado tirante.
- La correa posterior se puede colocar por encima o por debajo del cabello.



4

- Las almohadillas Swift FX están diseñadas para proporcionar un ajuste natural.
- Un pequeño ajuste puede hacer que las almohadillas queden colocadas en la nariz en el ángulo más cómodo.



5

- Conecte el tubo corto de la Swift FX al tubo de aire del equipo.
- La Swift FX ya está colocada y lista para utilizar.



CONSEJO

- Con el equipo encendido, compruebe que las almohadillas nasales se inflen correctamente. Para hacerlo, separe las almohadillas nasales del rostro y de las mejillas, compruebe que se hayan inflado y vuelva a colocarlas en la nariz.

#### FUNDAS BLANDAS OPCIONALES

- Envuelva cada lado del arnés con una de las fundas blandas, doblando la tira adherente superior por encima de la inferior y pegándola sobre ella.
- Las fundas blandas deben quedar colocadas en las mejillas, con las tiras adherentes situadas del lado exterior.



Nota: Para obtener más información, consulte el manual del usuario del sistema de almohadillas nasales Swift FX.

## Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES

#### Menos máscara. Más, tú!

- Diseño minimalista refuerza la sensación de libertad
- Suavidad, sencillez y estabilidad sin precedentes
- Forma flexible y natural que se adapta al contorno facial y a los movimientos del usuario
- Promueve la pronta aceptación del tratamiento
- Ajuste intuitivo, prácticamente instantáneo
- Desempeño estable, incluso con presiones elevadas


**Almohadillas nasales de pared doble** se sellan al contacto para brindar un sellado cómodo y delicado, se adaptan a una amplia gama de usuarios y dispersan el aire suavemente hacia la nariz

**Almohadilla blanda y angosta con cámara flexible integrada** brinda comodidad al dormir de costado y permite mantener el sellado durante el movimiento

**Codo que gira 360° con gran facilidad** gira con un movimiento fácil y fluido que brinda flexibilidad para elegir la posición del tubo

**Orificios de ventilación silenciosos** dispersan y dirigen sigilosamente el flujo de aire, alejándolo del usuario y de su pareja

**Tubo liviano y flexible** se estira y se dobla de forma única para brindar más estabilidad, sin necesidad de usar un retenedor

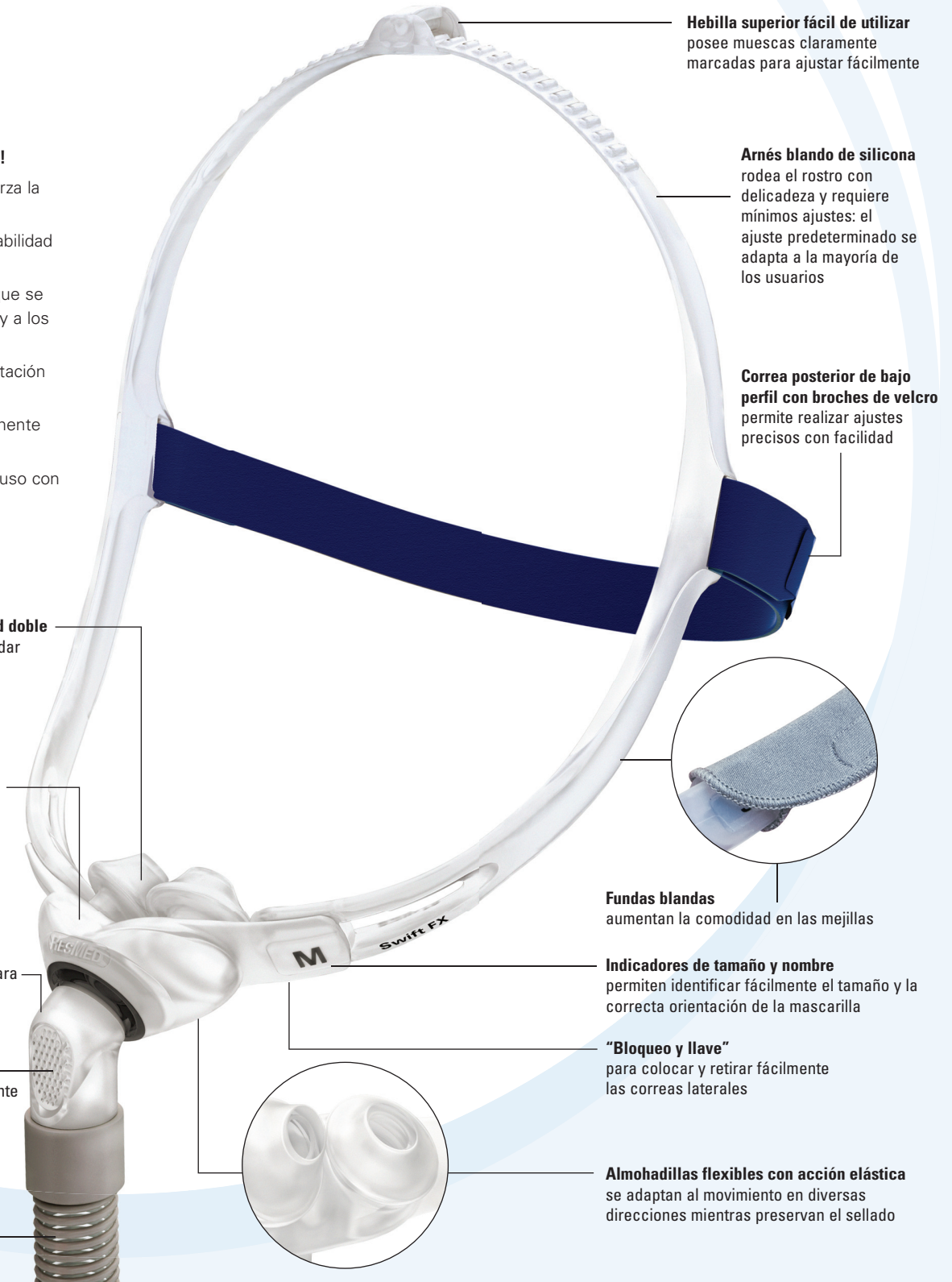

**Hebilla superior fácil de utilizar** posee muescas claramente marcadas para ajustar fácilmente

**Arnés blando de silicona** rodea el rostro con delicadeza y requiere mínimos ajustes: el ajuste predeterminado se adapta a la mayoría de los usuarios

**Correa posterior de bajo perfil con broches de velcro** permite realizar ajustes precisos con facilidad

**Fundas blandas** aumentan la comodidad en las mejillas

**Indicadores de tamaño y nombre** permiten identificar fácilmente el tamaño y la correcta orientación de la mascarilla

**"Bloqueo y llave"** para colocar y retirar fácilmente las correas laterales

**Almohadillas flexibles con acción elástica** se adaptan al movimiento en diversas direcciones mientras preservan el sellado



#### ASPECTOS DESTACADOS DE LA MASCARILLA

##### Comodidad total

- Gracias al contacto facial mínimo y al diseño discreto, la Swift FX hace que el tratamiento sea menos intimidante y más fácil de aceptar en las primeras etapas.
- Desde la punta de las almohadillas nasales, hasta los costados firmes y delicados, desde las fundas blandas que brindan confort, hasta la suave correa posterior...la Swift FX es tan liviana y suave que los pacientes se olvidan que la tienen puesta.
- Las ceñidas correas del arnés son las que mantienen el sellado, por lo que no es necesario dejar demasiado tirante el arnés y el usuario no siente que la mascarilla le aprieta.

#### BENEFICIOS PARA EL USUARIO

##### Suave comodidad, desempeño estable

- El delicado diseño de todo el sistema aumenta la comodidad.
- Las almohadillas nasales de pared doble y la base flexible de la almohadilla preservan el sellado y se adaptan al movimiento.
- El tubo liviano y flexible reduce la tensión en la mascarilla y aumenta la estabilidad.

##### Los pacientes pueden llegar a olvidar que la tienen puesta

- El diseño de pequeño tamaño refuerza la sensación de libertad: la sensación que la mascarilla brinda al usuario es tan importante como su apariencia en el rostro.

##### Permite dormir en diferentes posiciones

- Los usuarios de la Swift FX pueden dormir de costado o boca arriba, colocando el tubo en la posición que deseen.

##### Funcionamiento silencioso para lograr un sueño tranquilo

- El innovador diseño de la ventilación permite que el funcionamiento de la mascarilla sea ultrasilencioso: dispersa el aire con suavidad, alejándolo del paciente y de su pareja.

#### BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

##### Ajuste intuitivo, casi instantáneo

- Permite a los médicos y profesionales del sueño ahorrar tiempo valioso. Una vez que se ha escogido el tamaño correcto de almohadilla, los ajustes necesarios son mínimos.

##### Sellado estable, incluso con presiones elevadas

- El sistema posee un diseño exclusivo que le permite mantenerse en su lugar y preservar eficazmente el sellado, incluso con presiones elevadas de tratamiento.\*

##### Aceptación más fácil del tratamiento por parte de los pacientes

- La Swift FX está diseñada para gustar al instante y es una mascarilla que no intimida, con lo que facilita la pronta aceptación del tratamiento.

##### Menor inventario, se adapta a una amplia gama de usuarios (>95%)\*\*

- Viene con almohadillas de tres tamaños que se adaptan a la mayoría de los usuarios y reducen el inventario.
- También se puede solicitar un tamaño extra pequeño.

##### Fácil manejo del producto

- Gracias a la pequeña cantidad de piezas que la componen, la Swift FX es fácil de lavar y de montar.

##### Práctica de recomendar o recetar

- El manual del usuario y la asistencia en línea facilitan la capacitación de los usuarios y del personal.



#### CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

##### Sistema de almohadillas nasales Swift FX

Américas **61500**

# Swift™ FX

## SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES

### Tarjeta de componentes

#### Sistema completo

61500 (incluye almohadillas pequeñas (P), medianas (M) y grandes (G)\*)

#### Sistema de armazón

(sin arnés)

XP\* **61510**

P **61511**

M **61512**

G **61513**

Conjunto del arnés  
(arnés, correa posterior)  
**61529**

Conjunto del tubo corto  
(tubo corto, codo y pieza giratoria)  
**60528 (1)**  
**60527 (10)**

Almohadillas  
XP\* **61520**  
P **61521**  
M **61522**  
G **61523**

Fundas blandas  
**61530 (2)**

\* Las almohadillas extra pequeñas (XP) se deben solicitar por separado

\* Probada hasta 20 cm H<sub>2</sub>O en estudios clínicos

\*\* Según las investigaciones de mercado de ResMed