


Anleitung




9. Schritt

Schieben Sie das gefüllte Speichelröhrchen mit dem Speichel in das größere Transportröhrchen, **ohne das enthaltene Saugvlies zu entfernen**. Verschließen Sie das Transportröhrchen gut.

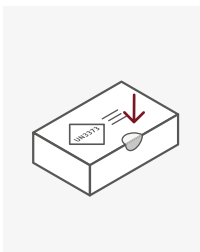

11. Schritt

Verschließen Sie die weiße Verpackungsbox und kleben Sie diese mit dem im Testkit enthaltenen Klebepunkt an der Mitte der langen Seite zu.

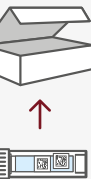

10. Schritt

Packen Sie das Transportröhrchen zurück in die weiße Verpackungsbox, in der die Testmaterialien enthalten waren.



12. Schritt


Geben Sie die verschlossene Verpackungsbox in den Rücksendeumschlag mit dem darauf klebendem UPS Versandaufkleber und verschließen Sie den Rücksendeumschlag gut.

13. Schritt

Bearbeiten Sie die Abholung per UPS entweder telefonisch unter **01806 882 663** oder im Internet unter www.cerascreen.de/proben-abholung. Ihr vorgedruckter UPS Versandaufkleber ist bereits auf dem Rücksendeumschlag befestigt.



Bitte beauftragen Sie die Abholung telefonisch oder online bis 11:00 Uhr vormittags, damit Ihre Probe noch am selben Tag bis 18:00 Uhr abgeholt und am nächsten Tag dem Labor zugestellt wird.

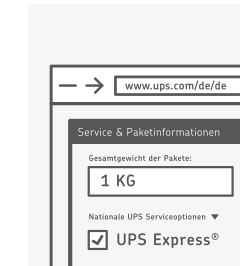

Bitte geben Sie die folgenden **Daten zur Abholung** bei Ihnen zuhause an. Die rot markierten Angaben übernehmen Sie bitte aus dieser Vorlage:


Abholinformationen und Standort:

- UPS Kundennummer: **R6X545**
- Postleitzahl der UPS Kundennummer: **19059**
- Name oder Unternehmen
- Straße (bei Bedarf: Suite/Zimmer oder Etage)
- Ort
- Postleitzahl
- Telefonnummer

Service und Paketinformationen:

- Gesamtgewicht der Pakete: **1 kg**
- Nationale UPS Serviceoptionen: **UPS Express®**

Zuletzt wählen Sie das **Abholdatum und die Abholzeit**. Auf der folgenden Seite wählen Sie bitte **„Ihrer UPS Kundennummer in Rechnung stellen“** als Zahlungsmethode aus. Prüfen Sie im nächsten Schritt Ihre Angaben und schließen Sie die Buchung der Abholung ab.

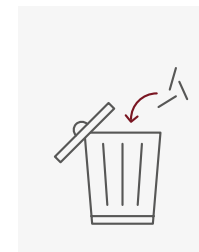

14. Schritt

Entsorgen Sie die benutzten Bestandteile des Testkits mit dem Hausmüll.



Der cerascreen® Coronavirus PCR Speichel Test ist ein Probe- und Einsendekit. Der Test dient dem Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2, Auslöser der Atemwegskrankheit COVID-19, in humanem Speichel.

Hinweise:

MDD Richtlinie 93/42/EWG, Klasse IIa
UN 3373 Biologischer Stoff, Kategorie B


Bei Verschlechterung Ihres Allgemeinzustandes durch zum Beispiel hohes Fieber, Atembeschwerden oder starken Husten wenden Sie sich bitte **TELEFONISCH** oder per Mail an die in Ihrer Region zuständige Stelle – oft ist es das Gesundheitsamt. Zusätzlich können Sie Ihre hausärztliche Praxis oder die **116 117** kontaktieren. Im Fall eines Notfalls (Atemnot) wenden Sie sich direkt an die **112**.

Hersteller:

cerascreen® GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Deutschland

fragen@cerascreen.de
www.cerascreen.de


Gültig ab: 08.10.2020
SKU: 99090760
CRS3-PCR-SALIVA_DE_00

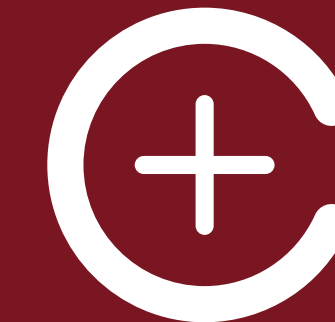


Coronavirus PCR Speichel Test

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ihr Testkit beinhaltet

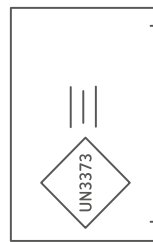

1 weiße Verpackungsbox (Wiederverwendung für den Rückversand)

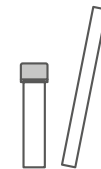

1 Speichelröhrchen, 1 Strohhalm



1 Transportröhrchen mit Saugvlies



1 Rücksendeumschlag mit vorgedrucktem UPS Versandaufkleber



1 Test-ID-Karte mit 2 Aufklebern



1 Klebepunkt

Wichtig



Führen Sie die Probenahme von **Montag bis Donnerstag bis spätestens 11:00 Uhr** durch, damit Ihre Probe noch am selben Tag abgeholt werden kann.

Aktivieren Sie vor dem Probenversand Ihren Test unter Angabe Ihrer Test-ID. Nur so kann das Labor Ihre Probe zuordnen, sodass Sie Ihr Testergebnis erhalten. Näheres dazu in **Schritt 2**.



In-vitro-Diagnostikum



Vor Durchführung die Anleitung lesen



Nur zum einmaligen Gebrauch



Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C



Enthält 1 Kit



Hersteller



Verfallsdatum



Conformité Européenne



Chargennummer



Artikelnummer



Pharmazentralnummer

Informationen und Hinweise zum Test

Allgemeine Informationen

- Bevor Sie beginnen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Halten Sie sich an die aufgeführten Schritte.
- Das Testkit sollte zwischen 2 °C und 30 °C gelagert werden.

Anweisungen zur Testdurchführung


- Nehmen Sie am Abend vor der Probenahme keinen Alkohol zu sich.
- Die Probe muss vor dem Zähneputzen genommen werden. Verzichten Sie auf Mundspülungen, Mundwasser, Kaugummi oder andere Atem erfrischende Substanzen.
- Trinken, essen und rauchen Sie 30 Min. vor der Probenahme nicht.
- Waschen Sie sich die Hände mit Seife, gut abtrocknen.
- Kleben Sie den quadratischen Code-Aufkleber erst nach erfolgreicher Probenahme auf das Speichelröhrchen.

Warnhinweise

- Bewahren Sie das Kit unzugänglich für Kinder auf.
- Die Anwendung darf nur an und durch Erwachsenen ab 18 Jahren erfolgen.
- Führen Sie keine Entnahme durch, wenn Sie akut unter Krankheiten bzw. Entzündungen der Mundhöhle oder unter Zahnfleischbluten leiden.
- Das Speichelentnahmekit dient der einmaligen Eigenanwendung.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie unser Hilfe-Portal (www.cerascreen.de/fragen).

Anleitung

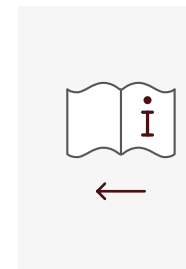

1. Schritt

Prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen für die Probenentnahme gegeben sind. Lesen Sie sich hierzu die Rubrik ‚Informationen und Hinweise zum Test‘ aufmerksam durch.




2. Schritt

Sind Sie Neukunde, dann erstellen Sie sich ein Benutzerkonto unter my.cerascreen.com oder in der mein cerascreen®-App. In unseren „Häufig gestellte Fragen“ auf www.cerascreen.de/fragen finden Sie eine Anleitung für die Erstellung.




3. Schritt

Damit wir Ihren Ergebnisbericht erstellen können, loggen Sie sich in der mein cerascreen®-App (Android, iOS) oder auf my.cerascreen.de ein. Geben Sie unter „Test aktivieren“ die 6-stellige ID-Nummer gemäß Ihrer Test-ID-Karte ein und folgen Sie den Anweisungen.

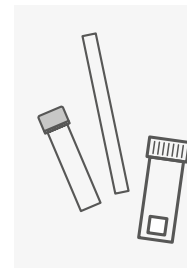


4. Schritt

Legen Sie alle im Testkit enthaltenen Utensilien auf eine saubere Unterlage und überprüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind.

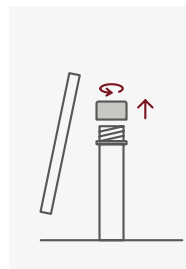


5. Schritt

Öffnen Sie das Speichelröhrchen und nehmen Sie den Strohhalm zur Hand. Räuspern Sie sich vor der Probenentnahme kräftig und husten Sie nach Möglichkeit mehrfach.

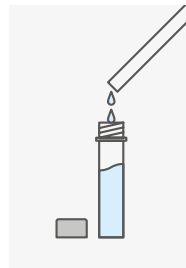


6. Schritt

Füllen Sie das Röhrchen mit Hilfe des Strohhalms vollständig mit Speichel (abzgl. Schaumbildung).

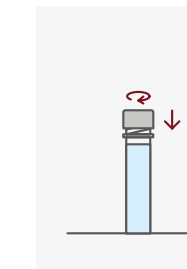

7. Schritt

Verschließen Sie das Speichelröhrchen durch Aufschrauben des Verschlussdeckels.

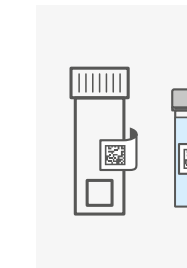

8. Schritt

Ziehen Sie die quadratischen Code-Aufkleber von der Test-ID-Karte. Kleben Sie einen auf das gefüllte Probenröhrchen, den anderen auf das Transportröhrchen.