

# Gebrauchsanweisung



## 9. SCHRITT

Beenden Sie die Entnahme erst, wenn das Röhrchen fast vollständig gefüllt ist, da ansonsten die Probe nicht auswertbar ist. Klopfen Sie das Röhrchen mehrmals leicht auf den Tisch, damit das Blut nachlaufen kann.



## 11. SCHRITT

Sobald die Blutung etwas nachlässt, nutzen Sie das Pflaster an der entsprechenden Stelle zur Wundversorgung.




## 13. SCHRITT

Ziehen Sie den Aufkleber von der Aktivierungskarte und kleben Sie ihn auf das gefüllte Blutauffangröhrchen – **NICHT auf das Transportröhrchen.**



## 15. SCHRITT

Verschließen Sie das Transportröhrchen gut.

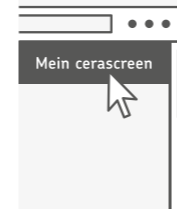

## 17. SCHRITT

Für die Erstellung Ihres Ergebnisberichts müssen Sie sich auf [www.cerascreen.de](http://www.cerascreen.de) unter „**Mein cerascreen**“ einloggen und Ihren Test aktivieren. Sind Sie noch nicht registriert, legen Sie im Bereich „Mein cerascreen“ ein Benutzerkonto an.



## 19. SCHRITT

Füllen Sie Ihren persönlichen Patientenbogen aus und schicken Sie ihn am Ende ab. Sobald Ihr Blut ausgewertet ist, werden Sie per E-Mail informiert und können unter „**Mein cerascreen**“ Ihr Ergebnis abrufen.



## 10. SCHRITT

Nach der Blutentnahme benutzen Sie bitte den Tupfer und drücken ihn auf die Stelle, an der das Blut austritt.




## 12. SCHRITT

Verschließen Sie das Röhrchen mit dem Verschlussdeckel durch festes Aufdrücken, bis die Verschlusskappe einrastet. **Schütteln Sie das Röhrchen gut.**



## 14. SCHRITT

Schieben Sie das gefüllte Blutauffangröhrchen mit dem Blut in das größere Transportröhrchen, **ohne das enthaltene Saugvlies zu entfernen.**

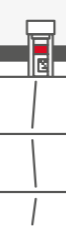


## 16. SCHRITT

Legen Sie das mit der Blutprobe gefüllte Transportröhrchen in den Rücksendeumschlag. Behalten Sie die Aktivierungskarte – Sie benötigen diese zur Aktivierung Ihres Tests. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend per Post.



## 18. SCHRITT

Nach dem Log-in klicken Sie auf „Test aktivieren“. Anschließend geben Sie die 6-stellige Test-ID ein, welche Sie auf Ihrer Aktivierungskarte finden. Bestätigen Sie mit „weiter“.

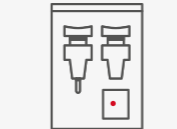

## 20. SCHRITT

Entsorgen Sie die benutzten Bestandteile des Testkits im durchsichtigen Kunststoffbeutel mit dem Hausmüll.

 cerascreen®

Der cerascreen® Langzeit-Blutzucker Test ist ein Probe- und Einsendekit für einen Test bei Verdacht auf eine veränderte Stoffwechsellage bzgl. des Blutzuckers. Der Test dient der Bestimmung der Konzentration des „verzuckerten“ Hämoglobins (HbA<sub>1c</sub>) im Kapillarblut. Die Durchführung ist schmerzfrei und einfach von zu Hause aus möglich.


### Hersteller:

cerascreen® GmbH  
Güterbahnhofstraße 16  
19059 Schwerin  
DEUTSCHLAND

frage@cerascreen.de  
[www.cerascreen.de](http://www.cerascreen.de)



CRS3-Blutzucker\_DE\_003  
Gültig ab Februar 2017

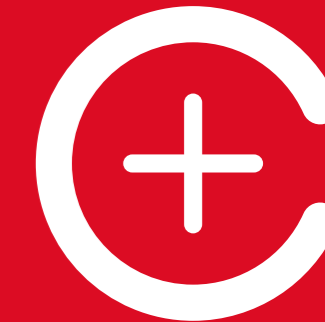


## Langzeit-Blutzucker Test


GEBRAUCHSANWEISUNG

## Ihr Test beinhaltet:

## Hinweise zum Test

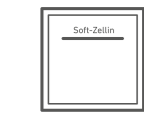

1 Desinfektionstuch CE

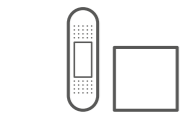

1 Pflaster CE und 1 Tupfer CE



1 Transportröhrchen



1 Microvette  
(Blutauffangröhrchen) 300 µl CE



2 Lanzetten CE 0344



1 Rückumschlag  
1 Aktivierungskarte mit Aufkleber

### WICHTIGE HINWEISE

Führen Sie die Blutentnahme nur zwischen **Sonntag und Mittwoch** durch und versenden Sie diese noch am Tag der Entnahme.

Bitte beachten Sie:

Eine Auswertung Ihrer Blutprobe ist **nur** in Verbindung mit einer Online-Registrierung und Aktivierung Ihrer Test-ID möglich! Näheres dazu ab Schritt 17.



In-vitro-Diagnostikum



Hersteller



Vor Durchführung die Anleitung lesen



Verfallsdatum



Nur zum einmaligen Gebrauch



Conformité Européenne



Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C



Chargennummer



Enthält 1 Kit



Bestellnummer

### ALLGEMEINE HINWEISE

- Lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig, bevor Sie beginnen.
- Bitte entnehmen Sie keine Blutprobe direkt nach außergewöhnlichen Anstrengungen.
- Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Blutentnahme haben oder das Kit unvollständig ist, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Kundenservice.
- Blutentnahmekit zur Eigenanwendung!
- Blutproben mit einem nicht ausreichenden Volumen können leider nicht ausgewertet werden (siehe Schritt 9).

### ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN

Verwenden Sie dieses Kit nicht, wenn Sie an einer durch Blut übertragbaren Erkrankung leiden, wie z.B. Hepatitis oder HIV!

### WARNHINWEISE

- Bewahren Sie das Kit unzugänglich für Kinder auf.
- Die Anwendung darf nur durch Erwachsene über 18 Jahre erfolgen.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten.
- Wenn Sie an einer angeborenen bzw. erworbenen Blutgerinnungsstörung leiden oder blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten.
- Verwenden Sie die Lanzetten nur für den eigenen Gebrauch.
- Wenn Sie Probleme beim Anblick oder mit der Abnahme von Blut haben, führen Sie die Entnahme nur im Beisein einer weiteren Person durch oder wenden Sie sich an Ihren Therapeuten oder Apotheker.


Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail ([frage@cerascreen.de](mailto:frage@cerascreen.de)) oder besuchen Sie unser Hilfe-Portal: [www.cerascreen.de/hilfe](http://www.cerascreen.de/hilfe).

## Gebrauchsanweisung



### 1. SCHRITT

Öffnen Sie das Blutauffangröhrchen und stellen Sie es auf einer flachen Unterlage bereit. Achten Sie darauf, dass es nicht umfallen kann.

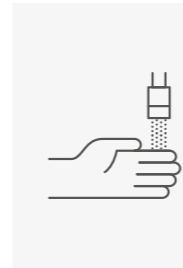


### 2. SCHRITT

Halten Sie Ihre Hand **mind. eine Minute** unter warmes Wasser, um die Blutzirkulation anzuregen. Trocknen Sie Ihre Hand sorgfältig mit einem Tuch ab.




### 3. SCHRITT

Kreisen Sie Ihren Arm 5-10-mal mit Schwung, möglichst voll durchgestreckt, in großen Bewegungen, um die Blutzirkulation anzuregen.

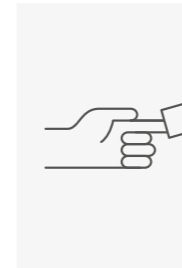


### 4. SCHRITT

Entnehmen Sie das Desinfektionstuch aus der Folie und desinfizieren Sie damit die Spitze eines Fingers. Warten Sie, bis der Finger wieder trocken ist (15 Sek.). TIPP: am besten eignet sich der Mittelfinger.

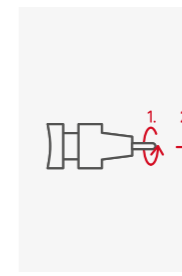

### 5. SCHRITT

Halten Sie die Lanzette wie im Bild gezeigt. Drehen Sie die gelbe Schutzhülle einmal um die eigene Achse (1.) und ziehen Sie sie dann vorsichtig ab (2.).  
Achtung: Verwenden Sie keine Lanzette ohne bzw. mit loser Schutzhülle.

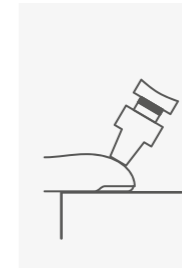


### 6. SCHRITT

Legen Sie Ihre Hand auf eine feste Unterlage, halten Sie die Lanzette wie in der Abbildung gezeigt und setzen Sie sie schräg auf die Spitze des Fingers auf. Drücken Sie mit dem Daumen fest auf den gelben Knopf. Der Knopf kann nur ein einziges Mal gedrückt werden!



### 7. SCHRITT

Halten Sie Ihre Hand waagrecht in Hüfthöhe (während Sie beispielsweise an einer Tischkante stehen) und massieren Sie Ihren Finger von der Handinnenfläche hin zur Fingerspitze, bis sich Bluttröpfchen bilden.

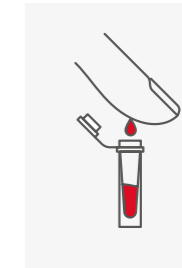

### 8. SCHRITT

Halten Sie Ihren Finger schräg an die Wandung des aufrecht stehenden Blutauffangröhrchens, damit das Blut hineinlaufen kann. Massieren Sie dabei Ihren Finger weiter, damit sich ausreichend Blut bildet. Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.