



Gebrauchsanweisung

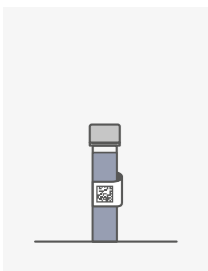


5. SCHRITT

Ziehen Sie den quadratischen Code-Aufkleber von der Aktivierungskarte und kleben Sie ihn auf das gefüllte Urin-Röhrchen – **NICHT auf das Transportröhrchen**.

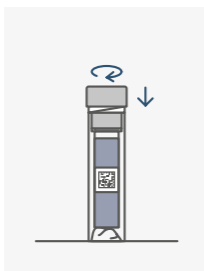


7. SCHRITT

Verschließen Sie das Transportröhrchen gut.

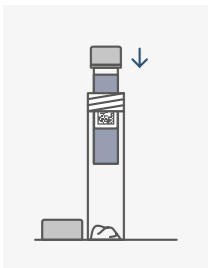

6. SCHRITT

Schieben Sie das gefüllte Urin-Röhrchen in das größere Transportröhrchen, **ohne** das darin enthaltene Saugvlies zu entfernen.

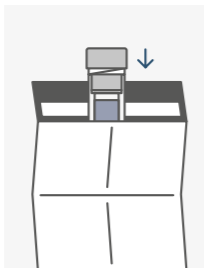

8. SCHRITT

Legen Sie das mit der Urinprobe gefüllte Transportröhrchen in den Rückumschlag. Behalten Sie die Aktivierungskarte – Sie benötigen diese zur Aktivierung Ihres Tests. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend per Post.



9. SCHRITT

Für die Erstellung Ihres Ergebnisberichts müssen Sie sich auf www.cerascreen.de unter „**Mein cerascreen**“ einloggen und Ihren Test aktivieren. Sind Sie noch nicht registriert, legen Sie im Bereich „Mein cerascreen“ ein Benutzerkonto an.




10. SCHRITT

Nach dem Log-in klicken Sie auf „Test aktivieren“. Anschließend geben Sie die 6-stellige Test-ID ein, welche Sie auf Ihrer Aktivierungskarte finden. Bestätigen Sie mit „weiter“.



11. SCHRITT

Füllen Sie Ihren persönlichen Patientenbogen aus und schicken Sie ihn am Ende ab. Sobald Ihr Urin ausgewertet ist, werden Sie per E-Mail informiert und können unter „**Mein cerascreen**“ Ihr Ergebnis abrufen.

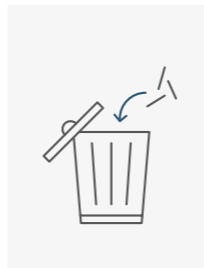

12. SCHRITT

Entsorgen Sie die verbleibenden Bestandteile des Testkits mit dem Hausmüll.



Der cerascreen® Schwermetall Test ist ein Probenahme- und Einsendekit zur Bestimmung der Konzentration verschiedener Schwermetalle in Urin. Der Test umfasst die Untersuchung folgender Stoffe: Aluminium, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Cobalt, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink. Die Durchführung ist schmerzfrei und einfach von zu Hause aus möglich.


Hersteller:

cerascreen® GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
DEUTSCHLAND



frage@cerascreen.de
www.cerascreen.de

CRS3-Schwermetalle_DE_001
Gültig ab Februar 2017

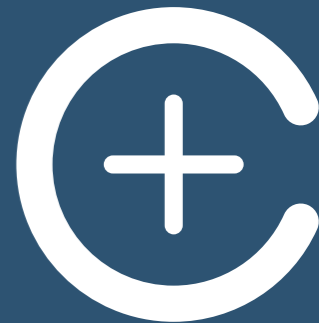

Schwermetall Test

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ihr Test beinhaltet:

Hinweise zum Test

Gebrauchsanweisung

WICHTIGE HINWEISE

Zur Auswertung der Probe wird Mittelstrahlurin Ihres ersten Morgenurins benötigt. Seit der letzten Mahlzeit und Flüssigkeitsaufnahme sollten mindestens 8 Stunden vergangen sein.

Bitte beachten Sie:

Eine Auswertung Ihrer Urinprobe ist **nur** in Verbindung mit einer Online-Registrierung und Aktivierung Ihrer Test-ID möglich! Näheres dazu ab Schritt 9.

IVD In-vitro-Diagnostikum

Vor Durchführung die Anleitung lesen

Nur zum einmaligen Gebrauch

Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C

Enthält 1 Kit

Hersteller

Verfallsdatum

LOT Chargennummer

REF Bestellnummer

Conformité Européenne

Gefahr

ätzend
gewässer-
gefährdend


ALLGEMEINE HINWEISE

- Testdurchführung nur durch Personen über 18 Jahre!
- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie beginnen.
- Führen Sie die **Probenentnahme nur zwischen Sonntag und Mittwoch** durch und versenden diese noch am Tag der Entnahme. Berücksichtigen Sie etwaige Feiertage.
- Urinentnahmekit zur Eigenanwendung!

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail (frage@cerascreen.de) oder besuchen Sie unser Hilfe-Portal: www.cerascreen.de/hilfe.

WICHTIGE HINWEISE ZUR TESTDURCHFÜHRUNG

- Nehmen Sie am Abend vor der Probenentnahme keine größeren Flüssigkeitsmengen (mehr als 1 Liter) zu sich.
- Für die Auswertung Ihrer Probe wird **Mittelstrahlurin Ihres ersten Morgenurins** benötigt. Darunter versteht man eine Urinprobe, die nicht zu Beginn des Urinlassens, sondern aus dem bereits laufenden Harnstrahl gewonnen wird. Der erste Urin wird dazu abgelassen und in die Toilette verworfen. Aus dem weiterlaufenden Harnstrahl werden ca. 60 ml im mitgelieferten Urinauffangbecher gesammelt. Der restliche Urin wird ebenfalls verworfen.
- Wichtiger Hinweis für Frauen: Entnehmen Sie keine Urinprobe während Ihrer Periode. Andernfalls ist keine repräsentative Auswertung möglich.

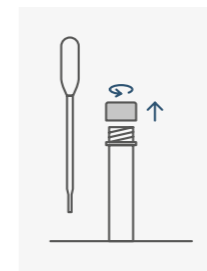


1. SCHRITT

Öffnen Sie das Urin-Röhrchen und stellen Sie es auf einer flachen Unterlage bereit. Legen Sie zum Urin-Röhrchen die Transferpipette.




2. SCHRITT

Nehmen Sie den Urin-Auffangbecher zur Hand und sammeln Sie darin eine Mittelstrahlurinprobe (siehe WICHTIGE HINWEISE ZUR TESTDURCHFÜHRUNG).

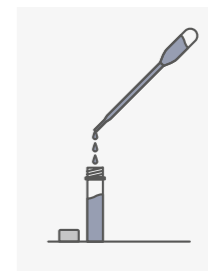


3. SCHRITT

Benutzen Sie die Transferpipette zur Umfüllung Ihres Urins in das kleinere Urin-Röhrchen. **Füllen Sie das Röhrchen komplett.**

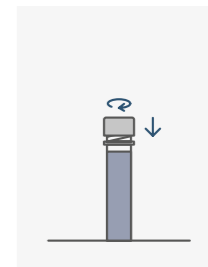

4. SCHRITT

Verschließen Sie das Urin-Röhrchen gut durch Aufschrauben des Verschlussdeckels.

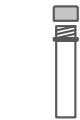

Urin-Röhrchen




Transferpipette



Transportröhrchen mit Saugvlies



1 Rückumschlag
1 Aktivierungskarte mit Aufkleber

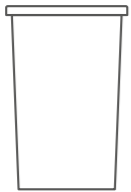

Urin-Auffangbecher