



Gebrauchsanweisung

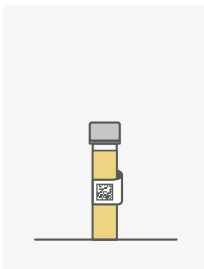


5. Schritt

Ziehen Sie den quadratischen Code-Aufkleber von der Aktivierungskarte und kleben Sie ihn auf das gefüllte Urin-Röhrchen – **NICHT auf das Transportröhrchen**.

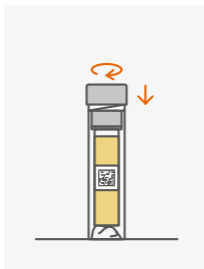


7. Schritt

Verschließen Sie das Transportröhrchen gut.

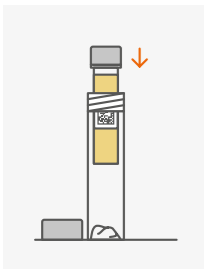

6. Schritt

Schieben Sie das gefüllte Urin-Röhrchen in das größere Transportröhrchen, **ohne** das darin enthaltene Saugvlies zu entfernen.

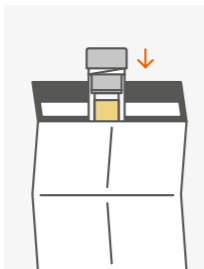

8. Schritt

Legen Sie das mit der Urinprobe gefüllte Transportröhrchen in den Rückumschlag. Behalten Sie die Aktivierungskarte – Sie benötigen diese zur Aktivierung Ihres Tests. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend per Post.



9. Schritt

Für die Erstellung Ihres Ergebnisberichts müssen Sie sich auf www.cerascreen.de unter „**Mein cerascreen**“ einloggen und Ihren Test aktivieren. Sind Sie noch nicht registriert, legen Sie im Bereich „Mein cerascreen“ ein Benutzerkonto an.




10. Schritt

Nach dem Log-in klicken Sie auf „Test aktivieren“. Anschließend geben Sie die 6-stellige Test-ID ein, welche Sie auf Ihrer Aktivierungskarte finden. Bestätigen Sie mit „weiter“.



11. Schritt

Füllen Sie Ihren persönlichen Patientenbogen aus und schicken Sie ihn am Ende ab. Sobald Ihr Urin ausgewertet ist, werden Sie per E-Mail informiert und können unter „**Mein cerascreen**“ Ihr Ergebnis abrufen.

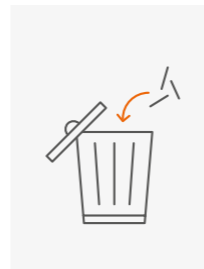

12. Schritt

Entsorgen Sie die verbleibenden Bestandteile des Testkits mit dem Hausmüll.



Der cerascreen® Serotonin Test ist ein Probennahme- und Einsendekit für einen Test bei Verdacht auf einen Serotoninmangel. Der Test dient der Bestimmung der Konzentration des Neurotransmitters Serotonin im Urin. Die Durchführung ist schmerzfrei und einfach von zu Hause aus möglich. Die Probe wird im spezialisierten cerascreen® Diagnostik-Fachlabor in vitro ausgewertet.

Hersteller:

cerascreen® GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Deutschland

fragen@cerascreen.de
www.cerascreen.de



CRS3-Serotonin_DE_003
Gültig ab September 2017



Serotonin Test

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ihr Testkit beinhaltet:

Hinweise zum Test

Gebrauchsanweisung

Wichtige Hinweise

Zur Auswertung der Probe wird Mittelstrahlurin Ihres ersten Morgenurins benötigt. Seit der letzten Mahlzeit und Flüssigkeitsaufnahme sollten mindestens 8 Stunden vergangen sein.

Eine Auswertung Ihrer Probe ist **nur** in Verbindung mit der Online-Aktivierung Ihres Tests unter Angabe Ihrer Test-ID möglich! Näheres dazu ab Schritt 9.

Bitte beachten Sie, dass einige Medikamente (z. B. Hormonpräparate) das Ergebnis beeinflussen können. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website in den FAQ.

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail (fragen@cerascreen.de) oder besuchen Sie unser Hilfe-Portal: www.cerascreen.de/hilfe.



Allgemeine Hinweise

- Testdurchführung nur durch Personen über 18 Jahre!
- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie beginnen.
- Führen Sie die Probenahme nur zwischen **Sonntag und Mittwoch** durch und versenden die Probe noch am Tag der Entnahme. Berücksichtigen Sie etwaige Feiertage.
- Urinentnahmekit zur einmaligen Eigenanwendung!
- In dieser Anleitung wurden gegenüber einer vorigen Version im Bereich „Hinweise zum Test“ Hinweise zur Anwendung bezügl. der Medikamente ergänzt.

 IVD	In-vitro-Diagnostikum	 Verfallsdatum	
 Vor Durchführung die Anleitung lesen		 LOT	Chargennummer
 Nur zum einmaligen Gebrauch		 REF	Bestellnummer
 Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C		 Conformité Européenne	
 Enthält 1 Kit		 ätzend	 gewässer-gefährdend
 Hersteller			

Wichtige Hinweise zur Testdurchführung

- Nehmen Sie am Abend vor der Probenentnahme keine größeren Flüssigkeitsmengen (mehr als 1 Liter) zu sich.
- Für die Auswertung Ihrer Probe wird **Mittelstrahlurin Ihres ersten Morgenurins** benötigt. Darunter versteht man eine Urinprobe, die nicht zu Beginn des Urinlassens, sondern aus dem bereits laufenden Harnstrahl gewonnen wird.
- Der erste Urin wird dazu abgelassen und in die Toilette verworfen. Aus dem weiterlaufenden Harnstrahl werden ca. 60 ml im mitgelieferten Urinauffangbecher gesammelt. Der restliche Urin wird ebenfalls verworfen.
- Wichtiger Hinweis für Frauen: Entnehmen Sie keine Urinprobe während Ihrer Periode. Andernfalls ist keine repräsentative Auswertung möglich.

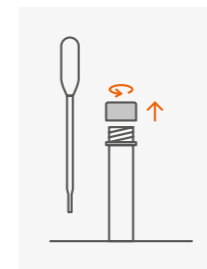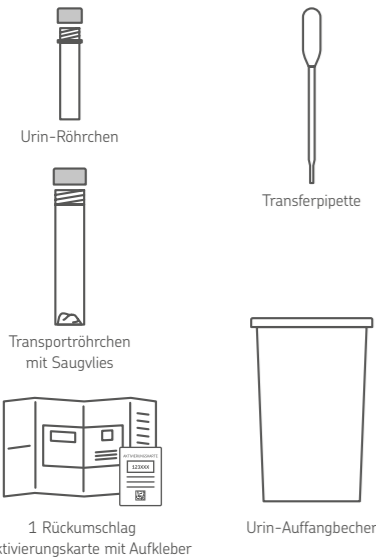


1. Schritt

Öffnen Sie das Urin-Röhrchen und stellen Sie es auf einer flachen Unterlage bereit. Legen Sie zum Urin-Röhrchen die Transferpipette.




2. Schritt

Nehmen Sie den Urin-Auffangbecher zur Hand und sammeln Sie darin eine Mittelstrahlurinprobe (siehe WICHTIGE HINWEISE ZUR TEST-DURCHFÜHRUNG).

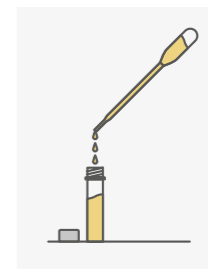

3. Schritt

Benutzen Sie die Transferpipette zur Umfüllung Ihres Urins in das kleinere Urin-Röhrchen. **Füllen Sie das Röhrchen komplett.**

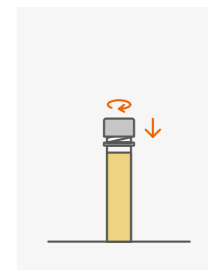

4. Schritt

Verschließen Sie das Urin-Röhrchen gut durch Aufschrauben des Verschlussdeckels.