


Gebrauchsanweisung



7. Schritt

Verschließen Sie das Transportröhrchen gut und verwahren Sie es bis zum Transport im Kühlschrank.

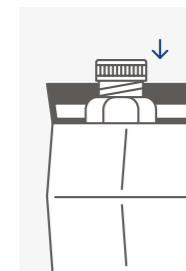

9. Schritt

Legen Sie das mit den Speichelproben gefüllte Transportröhrchen in den Rückumschlag. Behalten Sie die Aktivierungskarte – Sie benötigen diese zur Aktivierung Ihres Tests. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend per Post.



8. Schritt

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um insgesamt drei Speichelproben zu entnehmen. Hinweise zum Zeitpunkt der Probenahme finden Sie unter VORBEREITUNG am Anfang dieser Anleitung.

10. Schritt

Für die Erstellung Ihres Ergebnisberichts müssen Sie sich auf www.cerascreen.de unter „**Mein cerascreen**“ einloggen und Ihren Test aktivieren. Sind Sie noch nicht registriert, legen Sie im Bereich „**Mein cerascreen**“ ein Benutzerkonto an.




11. Schritt

Nach dem Log-in klicken Sie auf „Test aktivieren“. Anschließend geben Sie die 6-stellige Test-ID ein, welche Sie auf Ihrer Aktivierungskarte finden. Bestätigen Sie mit „weiter“.



12. Schritt

Füllen Sie Ihren persönlichen Patientenbogen aus und schicken Sie ihn am Ende ab. Sobald Ihre Proben ausgewertet sind, werden Sie per E-Mail informiert und können unter „**Mein cerascreen**“ Ihr Ergebnis abrufen.

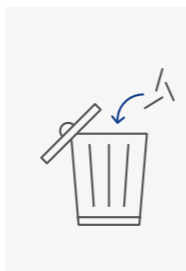

13. Schritt

Entsorgen Sie die verbleibenden Bestandteile des Testkits mit dem Hausmüll.



Der cerascreen® Testosteron Test ist ein Probenahme- und Einsendekit für einen Test bei Verdacht auf Veränderungen des Testosteron-Spiegels. Der Test dient der Bestimmung der Konzentration des Androgens Testosteron im Speichel. Die Durchführung ist schmerzfrei und einfach von zu Hause aus möglich. Die Probe wird im spezialisierten cerascreen® Diagnostik-Fachlabor in vitro ausgewertet.


Hersteller:

cerascreen® GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Deutschland

fragen@cerascreen.de
www.cerascreen.de




CRS3-Testosteron_DE_004
Gültig ab September 2017

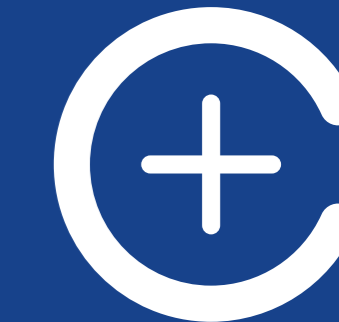

Testosteron Test

GEBRAUCHSANWEISUNG


Ihr Testkit beinhaltet:

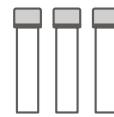

3 Speichelröhrchen



3 Strohhalm

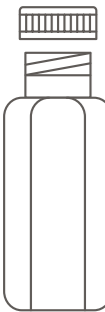

1 Transportröhrchen



1 Rückumschlag
1 Aktivierungskarte mit 3 Aufklebern

Hinweise zum Test

Wichtige Hinweise

Führen Sie die Probenahme nur zwischen **Sonntag und Mittwoch** durch und versenden Sie die Probe noch am Tag der Entnahme. Berücksichtigen Sie etwaige Feiertage.

Eine Auswertung Ihrer Probe ist **nur** in Verbindung mit der Online-Aktivierung Ihres Tests unter Angabe Ihrer Test-ID möglich! Näheres dazu ab Schritt 10.

Bitte beachten Sie, dass einige Medikamente (z. B. Hormonpräparate) das Ergebnis beeinflussen können. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website in den FAQ.

IVD In-vitro-Diagnostikum

ℹ Vor Durchführung die Anleitung lesen

⊗ Nur zum einmaligen Gebrauch

🧊 Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C

Σ 1 Enthält 1 Kit

🏭 Hersteller

🕒 Verfallsdatum

CE Conformité Européenne

LOT Chargennummer

REF Bestellnummer

Allgemeine wichtige Hinweise

- Testdurchführung nur durch Personen über 18 Jahre!
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig. Halten Sie sich an die aufgeführten Schritte.
- Speichelentnahmekit zur einmaligen Eigenanwendung!
- Nehmen Sie am Abend vor der Probenahme keinen Alkohol zu sich.
- Gehen Sie abends nach Möglichkeit vor 23:00 schlafen und stehen Sie am Tag der Probenahme nicht später als 8:00 auf.
- In dieser Anleitung wurden gegenüber einer vorigen Version im Bereich „Hinweise zum Test“ Hinweise zur Anwendung bezügl. der Medikamente ergänzt.

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail (fragen@cerascreen.de) oder besuchen Sie unser Hilfe-Portal: www.cerascreen.de/hilfe.

Wichtige Hinweise zur Testdurchführung

- Speichelproben müssen vor dem Zähneputzen genommen werden. Verzichten Sie auf Mundspülungen oder Mundwasser.
- Führen Sie keine Entnahme durch, wenn Sie akut unter Krankheiten bzw. Entzündungen der Mundhöhle oder Zahnfleischbluten leiden.
- Trinken, essen oder rauchen Sie 30 Min. vor der Probenahme nicht, da dies zu einer Verfälschung des Ergebnisses führt. Kauen Sie kein Kaugummi.
- Kleben Sie den Aufkleber immer erst nach erfolgreicher Probenentnahme auf das Speichelröhrchen.

Gebrauchsanweisung




Vorbereitung

Insgesamt entnehmen Sie drei Speichelproben:

1. Direkt nach dem Aufwachen
2. 30 Minuten nach dem Aufwachen
3. Eine Stunde nach dem Aufwachen


Bitte beachten!

Die folgenden Schritte 1-7 müssen für jede der drei Probenahmen durchgeführt werden. Für jede Probe ist ein Aufkleber auf der Aktivierungskarte vorhanden. Die Aufkleber können in beliebiger Reihenfolge verwendet werden.

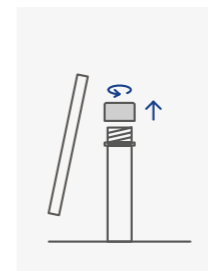


1. Schritt

Öffnen Sie ein Speichelröhrchen und nehmen Sie einen Strohhalm zur Hand.

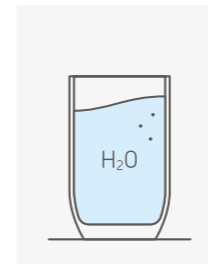


2. Schritt

Spülen Sie den Mund mit klarem Wasser und warten Sie, bis sich Ihr Speichelfluss wieder normalisiert hat.

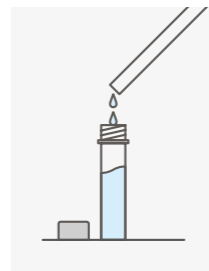


3. Schritt

Füllen Sie das Röhrchen mit Hilfe des Strohhalms bis oben mit Speichel (abzgl. Schaumbildung).

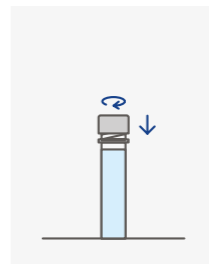

4. Schritt

Verschließen Sie das Speichelröhrchen durch Aufschrauben des Verschlussdeckels.

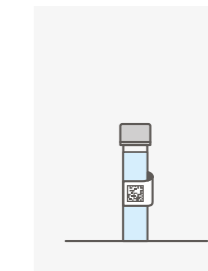

5. Schritt

Ziehen Sie einen der Aufkleber von der Aktivierungskarte und kleben Sie ihn auf das gefüllte Speichel-Röhrchen – **NICHT auf das größere Transportröhrchen.**



6. Schritt

Schieben Sie das gefüllte Speichelröhrchen in das größere Transportröhrchen, ohne das enthaltene Saugvlies zu entfernen.