

Gebrauchsanweisung



8. Schritt

Halten Sie Ihren Finger schräg an die Wandung des aufrecht stehenden Blutauffangröhrchens, damit das Blut hineinlaufen kann. Massieren Sie dabei Ihren Finger weiter, damit sich ausreichend Blut bildet. Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.



9. Schritt

Beenden Sie die Entnahme erst, wenn die Markierung (300 µl) erreicht ist, da ansonsten die Probe nicht auswertbar ist. Klopfen Sie das Röhrchen mehrmals leicht auf den Tisch, damit das Blut nachlaufen kann.



10. Schritt

Nach der Blutentnahme benutzen Sie bitte den Tupfer und drücken ihn auf die Stelle, an der das Blut austritt.



11. Schritt

Sobald die Blutung etwas nachlässt, nutzen Sie das Pflaster an der entsprechenden Stelle zur Wundversorgung.



12. Schritt

Verschließen Sie das Röhrchen mit dem Verschlussdeckel durch festes Aufdrücken, bis die Verschlusskappe einrastet. **Schütteln Sie das Röhrchen gut.**



13. Schritt

Ziehen Sie den Aufkleber von der Aktivierungskarte und kleben Sie ihn auf das gefüllte Blutauffangröhrchen – **NICHT auf das Transportröhrchen.**



14. Schritt

Schieben Sie das gefüllte Blutauffangröhrchen mit dem Blut in das größere Transportröhrchen, **ohne das enthaltene Saugvlies zu entfernen.** Verschließen Sie das Transportröhrchen gut.



15. Schritt

Legen Sie das mit der Blutprobe gefüllte Transportröhrchen in den Rücksendeumschlag. Behalten Sie die Aktivierungskarte – Sie benötigen diese zur Aktivierung Ihres Tests. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend per Post.



16. Schritt

Für die Erstellung Ihres Ergebnisberichts müssen Sie sich auf www.cerascreen.de unter „**Mein cerascreen**“ einloggen und Ihren Test aktivieren. Sind Sie noch nicht registriert, legen Sie im Bereich „Mein cerascreen“ ein Benutzerkonto an.




17. Schritt

Nach dem Log-in klicken Sie auf „Test aktivieren“. Anschließend geben Sie die 6-stellige Test-ID ein, welche Sie auf Ihrer Aktivierungskarte finden. Bestätigen Sie mit „weiter“.



18. Schritt

Füllen Sie Ihren persönlichen Patientenbogen aus und schicken Sie ihn am Ende ab. Sobald Ihr Blut ausgewertet ist, werden Sie per E-Mail informiert und können unter „**Mein cerascreen**“ Ihr Ergebnis abrufen.

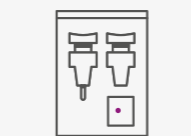

19. Schritt

Entsorgen Sie die benutzten Bestandteile des Testkits im durchsichtigen Kunststoffbeutel mit dem Hausmüll.



Der cerascreen® Vitamin B12 Test ist ein Probenahme- und Einsendekit für einen Test von humanem Kapillarblut bei Verdacht auf einen Mangel an Vitamin B12. Der Test dient der Bestimmung der Konzentration des B12 bindenden Proteinkomplexes Holo-transcobalamin. Die Durchführung ist schmerzfrei und einfach von zu Hause aus möglich. Die Probe wird im spezialisierten cerascreen® Diagnostik-Fachlabor in vitro ausgewertet.


Hersteller:

cerascreen® GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Deutschland

fragen@cerascreen.de
www.cerascreen.de



CRS3-Vit B12_DE_003
Gültig ab September 2017

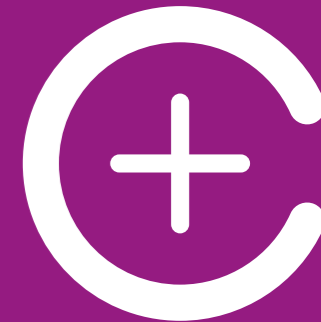


Vitamin B12 Test

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ihr Testkit beinhaltet:



1 Desinfektionstuch €€

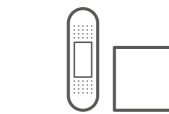


1 Pflaster €€ und 1 Tupfer €€




1 Transportröhrchen



1 Microvette
(Blutauffangröhrchen) 300 µl €€

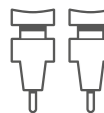

2 Lanzetten €€ 0344

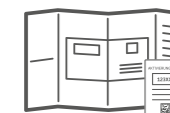

1 Rückumschlag
1 Aktivierungskarte mit Aufkleber

Hinweise zum Test

Wichtige Hinweise

Führen Sie die Probenahme nur zwischen **Sonntag und Mittwoch** durch und versenden Sie die Probe noch am Tag der Entnahme. Berücksichtigen Sie etwaige Feiertage.

Eine Auswertung Ihrer Probe ist **nur** in Verbindung mit der Online-Aktivierung Ihres Tests unter Angabe Ihrer Test-ID möglich! Näheres dazu ab Schritt 17.

Bitte beachten Sie, dass nach einer Vitamin-B12-Injektion mindestens vier Wochen bis zur Testdurchführung gewartet werden sollte. Oral eingenommene Präparate hingegen haben keinen Einfluss auf das Testergebnis.

Übertragbare Krankheiten

Verwenden Sie dieses Kit nicht, wenn Sie an einer durch Blut übertragbaren Erkrankung leiden, wie z.B. Hepatitis oder HIV!

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig, bevor Sie beginnen.
- Bitte entnehmen Sie keine Blutprobe direkt nach außergewöhnlichen Anstrengungen.
- Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Blutentnahme haben oder das Kit unvollständig ist, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Kundenservice.
- Blutentnahmekit zur einmaligen Eigenanwendung!
- Blutproben mit einem geringeren Volumen als 300 µl können leider nicht ausgewertet werden.
- In dieser Anleitung wurden gegenüber einer vorigen Version im Bereich „Hinweise zum Test“ Hinweise zur Anwendung bezügl. der Medikamente ergänzt.



In-vitro-Diagnostikum



Hersteller



Vor Durchführung die Anleitung lesen



Verfallsdatum



Nur zum einmaligen Gebrauch



Conformité Européenne



Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C



Chargennummer



Enthält 1 Kit



Bestellnummer

Warnhinweise

- Bewahren Sie das Kit unzugänglich für Kinder auf.
- Die Anwendung darf nur durch Erwachsene über 18 Jahre erfolgen.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten.
- Wenn Sie an einer angeborenen bzw. erworbenen Blutgerinnungsstörung leiden oder blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten.
- Verwenden Sie die Lanzetten nur für den eigenen Gebrauch.
- Wenn Sie Probleme beim Anblick oder mit der Abnahme von Blut haben, führen Sie die Entnahme nur im Beisein einer weiteren Person durch oder wenden Sie sich an Ihren Therapeuten oder Apotheker.

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail (fragen@cerascreen.de) oder besuchen Sie unser Hilfe-Portal: www.cerascreen.de/hilfe.

Gebrauchsanweisung



Diese Anleitung zur Blutentnahme finden Sie auch als **Video** online in Ihrem **Mein-cerascreen-Bereich**. Näheres dazu ab Schritt 16. Hier gelangen Sie direkt zu dem Video: www.cerascreen.de/anleitung




1. Schritt
Öffnen Sie das Blutauffangröhrchen und stellen Sie es auf einer flachen Unterlage bereit. Achten Sie darauf, dass es nicht umfallen kann.




2. Schritt

Halten Sie Ihre Hand **mind. eine Minute** unter warmes Wasser, um die Blutzirkulation anzuregen. Trocknen Sie Ihre Hand sorgfältig mit einem Tuch ab.

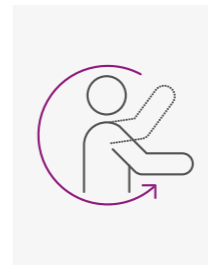


3. Schritt

Kreisen Sie Ihren Arm 5-10-mal mit Schwung, möglichst voll durchgestreckt, in großen Bewegungen, um die Blutzirkulation anzuregen.

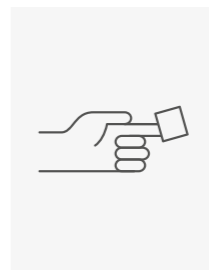


4. Schritt

Entnehmen Sie das Desinfektionstuch aus der Folie und desinfizieren Sie damit die Spitze eines Fingers. Warten Sie, bis der Finger wieder trocken ist (15 Sek.). TIPP: am besten eignet sich der Mittelfinger.

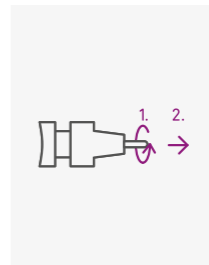


5. Schritt

Halten Sie die Lanzette wie im Bild gezeigt. Drehen Sie die gelbe Schutzhülle einmal um die eigene Achse (**1.**) und ziehen Sie sie dann vorsichtig ab (**2.**).
Achtung: Verwenden Sie keine Lanzette ohne bzw. mit loser Schutzhülle.

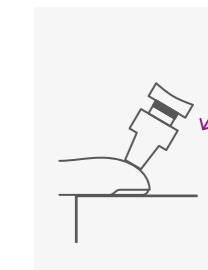

6. Schritt

Legen Sie Ihre Hand auf eine feste Unterlage, halten Sie die Lanzette wie in der Abbildung gezeigt und setzen Sie sie schräg auf die Spitze des Fingers auf. Drücken Sie mit dem Daumen fest auf den gelben Knopf. Der Knopf kann nur ein einziges Mal gedrückt werden!

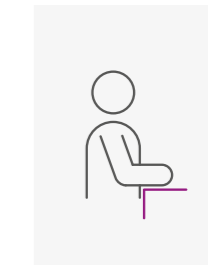

7. Schritt

Halten Sie Ihre Hand waagrecht in Hüfthöhe (während Sie beispielsweise an einer Tischkante stehen) und massieren Sie Ihren Finger von der Handinnenfläche hin zur Fingerspitze, bis sich Blutstropfen bilden.