



Anleitung

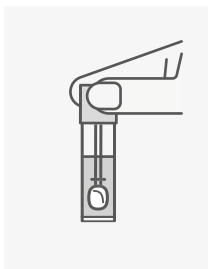


5. Schritt

Verschließen Sie das Probenröhrchen durch Aufschrauben des Deckels mit Löffel. Säubern Sie es von außen, sofern dies notwendig ist.

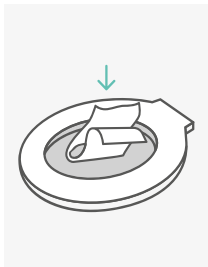


6. Schritt

Nach der Stuhlprobenahme können die Stuhlauffanghilfe sowie der restliche Stuhl in der Toilette entsorgt werden. Waschen Sie sich für min. 20 Sekunden mit Seife gründlich die Hände.

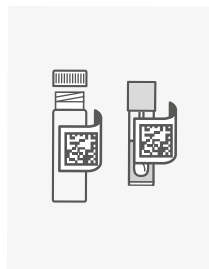

7. Schritt

Ziehen Sie die quadratischen Code-Aufkleber von der Test-ID-Karte. Kleben Sie einen auf das gefüllte Probenröhrchen, den anderen auf das Transportröhrchen.

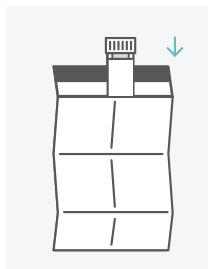

9. Schritt

Legen Sie das bestückte Transportröhrchen in den Rücksendeumschlag. Behalten Sie die Test-ID-Karte – Sie benötigen diese zur Aktivierung Ihres Tests. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend kostenfrei per Post.




10. Schritt

Sind Sie Neukunde, dann erstellen Sie sich ein Benutzerkonto unter my.cerascreen.de oder in der **mein cerascreen®**-App. In unseren „Häufig gestellte Fragen“ auf www.cerascreen.de/fragen finden Sie eine Anleitung für die Erstellung.



11. Schritt

Damit wir Ihren Ergebnisbericht erstellen können, loggen Sie sich in der **mein cerascreen®**-App (Android, iOS) oder auf my.cerascreen.de ein. Geben Sie unter „Test aktivieren“ die 6-stellige ID-Nummer gemäß Ihrer Test-ID-Karte ein und folgen Sie den Anweisungen.

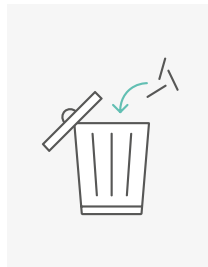

12. Schritt

Entsorgen Sie die restlichen Bestandteile des Testkits mit dem Hausmüll.



Der cerascreen® Zonulin Test ist ein Probenahme- und Einsendekit für eine Stuhluntersuchung auf das Protein Zonulin. Der Test dient der Konzentrationsbestimmung von Zonulin im Stuhl. Die Probe wird in unserem spezialisierten cerascreen® Diagnostik-Partnerlabor in vitro ausgewertet.

Hersteller:
cerascreen® GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Deutschland

fragen@cerascreen.de
www.cerascreen.de




CRS1-Zonulin_DE_000
SKU: 99090555



Zonulin Test
GEBRAUCHSANWEISUNG

Ihr Testkit beinhaltet

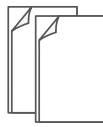

2 Stuhlauffanghilfen CE



1 Stuhlprobenröhrchen CE



1 Transportröhrchen mit Saugvlies



1 Test-ID-Karte mit 2 Aufklebern



1 Rücksendeumschlag

Hinweise zum Test

Wichtige Hinweise

Führen Sie die Probenentnahme **nur von Sonntag bis Dienstag** durch und versenden Sie die Probe noch am Tag der Entnahme. Berücksichtigen Sie etwaige Feiertage.

Eine Auswertung Ihrer Probe ist **nur** in Verbindung mit der Online-Aktivierung Ihres Tests unter Angabe Ihrer Test-ID möglich! Näheres dazu in Schritt 10 + 11.

IVD	In-vitro-Diagnostikum	Verfallsdatum
Vor Durchführung die Anleitung lesen	Conformité Européenne	
Nur zum einmaligen Gebrauch	Chargennummer	
Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C	Artikelnummer	
Enthält 1 Kit	Pharmazentralnummer	
Hersteller		

Allgemeine Hinweise

- Bevor Sie beginnen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Halten Sie sich an die aufgeführten Schritte.

Wichtige Hinweise zur Testdurchführung

- Wenn Sie die Probe am Abend entnehmen, lagern Sie diese über Nacht im Kühlschrank und versenden Sie diese am Tag nach der Entnahme.
- Der Stuhl darf nicht mit dem Toilettenwasser in Berührung kommen.
- Nehmen Sie am Abend vor der Probenahme keinen Alkohol zu sich.
- Bitte entnehmen Sie keine Stuhlprobe, wenn Sie an Durchfall leiden.
- Führen Sie keine Probenahme durch, wenn Sie an akuten Magen-Darm-Infekten leiden.
- Kleben Sie den quadratischen Code-Aufkleber erst nach erfolgreicher Probenahme auf das Stuhlprobenröhrchen.
- Leider ist es nicht möglich, Stuhlproben zu analysieren,


die weniger als die erforderliche Menge an Stuhl enthalten.

Warnhinweise

- Verwenden Sie dieses Kit nicht, wenn Sie an einer durch Blut übertragbaren Erkrankung leiden, wie z. B. Hepatitis oder HIV!
- Die Anwendung darf nur an und durch einen Erwachsenen ab 18 Jahren erfolgen.
- Das Stuhlentnahmekit dient der einmaligen Eigenanwendung.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.


Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail (fragen@cerascreen.de) oder besuchen Sie unser Hilfe-Portal: www.cerascreen.de/fragen.

Anleitung

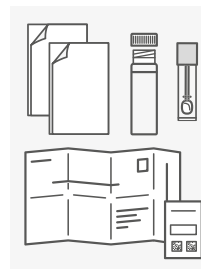


1. Schritt

Legen Sie alle im Testkit enthaltenen Utensilien auf eine saubere Unterlage und überprüfen Sie ob alle Komponenten enthalten sind.

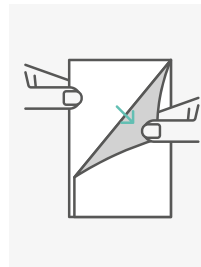


2. Schritt

Benutzen Sie die Stuhlauffanghilfe. Der Stuhl darf nicht mit dem Toilettenwasser in Berührung kommen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Stuhlauffanghilfe. Scheiden Sie Ihren Stuhl auf die Stuhlauffanghilfe aus.

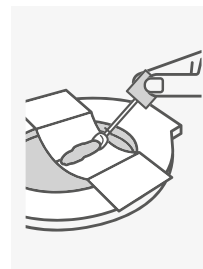

3. Schritt

Entnehmen Sie die Probe umgehend. Schrauben Sie das Probenröhrchen auf. Benutzen Sie den Entnahmelöffel am Deckel des Röhrchens, um an verschiedenen Stellen des Stuhls Proben zu entnehmen.

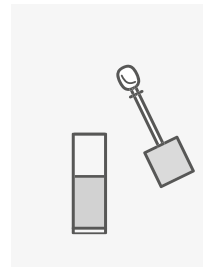

4. Schritt

Füllen Sie das Probenröhrchen bis es etwas mehr als zur Hälfte befüllt ist.