



## 5. Schritt

Benutzen Sie die Stuhlaufanghilfe. **Der Stuhl darf nicht mit dem Toilettenwasser in Berührung kommen.** Beachten Sie die Anweisungen auf der Stuhlaufanghilfe. Scheiden Sie Ihren Stuhl auf die Stuhlaufanghilfe aus.

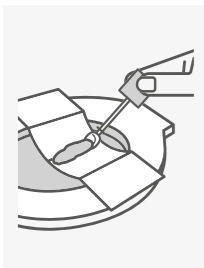


## 6. Schritt

Entnehmen Sie die Probe umgehend. Schrauben Sie das Probenröhrchen auf. Benutzen Sie den Entnahmelöffel am Deckel des Röhrchens, um an verschiedenen Stellen des Stuhls Proben zu entnehmen.

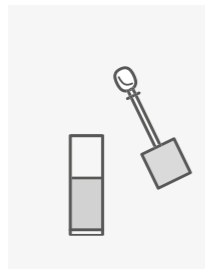


## 7. Schritt

Füllen Sie das Probenröhrchen, bis es etwas mehr als zur Hälfte befüllt ist.

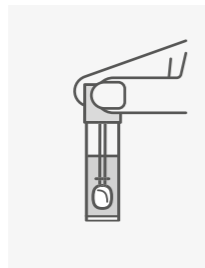

## 8. Schritt

Verschließen Sie das Probenröhrchen durch Aufschrauben des Deckels mit Löffel. Säubern Sie es von außen, sofern dies notwendig ist.

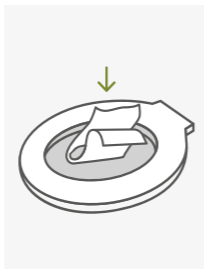


## 9. Schritt

Nach der Stuhlprobenahme können die Stuhlaufanghilfe sowie der restliche Stuhl in der Toilette entsorgt werden. Waschen Sie sich für min. 20 Sekunden mit Seife gründlich die Hände.




## 10. Schritt

Ziehen Sie die quadratischen Code-Aufkleber von der Test-ID-Karte. Kleben Sie einen auf das gefüllte Probenröhrchen, den anderen auf das Transportröhrchen.

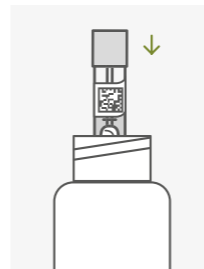

## 11. Schritt

Schieben Sie das mit Stuhl gefüllte Probenröhrchen in das größere Transportröhrchen, ohne das enthaltene Saugvlies zu entfernen. Verschließen Sie das Transportröhrchen gut.

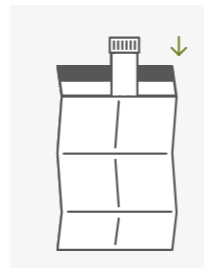

## 12. Schritt


Legen Sie das bestückte Transportröhrchen in den Rücksendeumschlag. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend kostenfrei per Post. Überprüfen Sie, ob Sie den Test aktiviert haben und entsorgen Sie die benutzten Bestandteile im Hausmüll.



Der cerascreen® Helicobacter pylori Test ist ein Probe- nahme- und Einsendekit für eine Stuhluntersuchung. Der Test dient der Bestimmung von Antigenen, die einen Hinweis auf eine mögliche Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori im Magen geben können. Die Probe wird in unserem spezialisierten cerascreen® Partnerlabor in vitro ausgewertet.

**Hersteller:**  
cerascreen® GmbH  
Güterbahnhofstraße 16  
19059 Schwerin  
Deutschland

fragen@cerascreen.de  
www.cerascreen.de  
CRS1-Helico\_DE\_000  
SKU: 99090849  
Gültig ab März 2021


 **Lieferanten: Stuhlaufanghilfe** CE: Med Auxil, Triftstr.  
25, 38723 Seesen, Deutschland



## Helicobacter pylori Test

GEBRAUCHSANWEISUNG

## Ihr Testkit beinhaltet

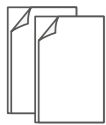

2 Stuhlauffanghilfen CE



1 Stuhlprobenröhrchen



1 Transportröhrchen mit Saugvlies



1 Test-ID-Karte mit 2 Aufklebern



1 Rücksendeumschlag

## Informationen und Hinweise zum Test

### WICHTIG



Führen Sie die Probenahme nur von **Sonntag bis Dienstag** durch und versenden Sie die Probe noch am Tag der Entnahme. Berücksichtigen Sie etwaige Feiertage.

Eine Auswertung Ihrer Probe ist nur in Verbindung mit der Online-Aktivierung Ihres Tests unter Angabe Ihrer Test-ID möglich! Näheres dazu in Schritt 2 und 3.



In-vitro-Diagnostikum



Verfallsdatum



Gebrauchsanweisung beachten



Conformité Européenne



Nur zum einmaligen Gebrauch



Chargennummer



Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C



Artikelnummer



Enthält 1 Kit



Pharmazentralnummer



Hersteller

### Allgemeine Hinweise

- Bevor Sie beginnen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Halten Sie sich an die aufgeführten Schritte.

### Anweisungen zur Testdurchführung

- Der Stuhl darf nicht mit dem Toilettenwasser in Berührung kommen.
- Leider ist es nicht möglich, Stuhlproben zu analysieren, die weniger als die erforderliche Menge an Stuhl enthalten.
- Kleben Sie den quadratischen Code-Aufkleber erst nach erfolgreicher Probenahme auf das Stuhlprobenröhrchen.

### Warnhinweise

- Verwenden Sie dieses Kit nicht, wenn Sie an einer durch Blut übertragbaren Erkrankung leiden, wie z. B. Hepatitis oder HIV!
- Bewahren Sie das Kit unzugänglich für Kinder auf.
- Die Anwendung darf nur an und durch Erwachsene ab 18 Jahren erfolgen.

- Das Stuhlentnahmekit dient der einmaligen Eigenanwendung.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten.

Wenn Sie Fragen haben besuchen Sie unser Hilfe-Portal ([www.cerascreen.de/fragen](http://www.cerascreen.de/fragen)).

## Anleitung



### 1. Schritt

Prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen für die Probenentnahme gegeben sind. Lesen Sie sich hierzu die Rubrik „Informationen und Hinweise zum Test“ aufmerksam durch.

### 2. Schritt

Sind Sie Neukunde, dann erstellen Sie sich ein Benutzerkonto unter [my.cerascreen.de](http://my.cerascreen.de) oder in der **meine cerascreen®**-App. In unseren „Häufig gestellte Fragen“ auf [www.cerascreen.de/fragen](http://www.cerascreen.de/fragen) finden Sie eine Anleitung für die Erstellung.



### 3. Schritt

Damit wir Ihren Ergebnisbericht erstellen können, loggen Sie sich in der **meine cerascreen®**-App (Android, iOS) oder auf [my.cerascreen.de](http://my.cerascreen.de) ein. Geben Sie unter „Test aktivieren“ die 7-stellige ID-Nummer gemäß Ihrer Test-ID-Karte ein und folgen Sie den Anweisungen.

### 4. Schritt

Legen Sie alle im Testkit enthaltenen Utensilien auf eine saubere Unterlage und überprüfen Sie ob alle Komponenten enthalten sind.

