



# Anleitung

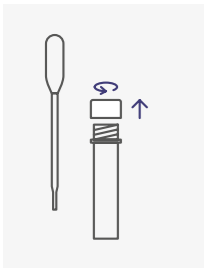

## 5. Schritt

Öffnen Sie das Urinröhrchen und stellen Sie es auf einer flachen Unterlage bereit. Achten Sie darauf, dass es nicht umfallen kann. Legen Sie die Transferpipette dazu.

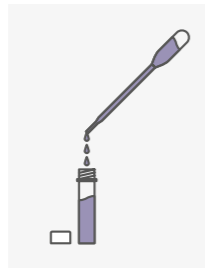


## 7. Schritt

Benutzen Sie die Transferpipette zur Umfüllung Ihres Urins in das kleinere Urinröhrchen. **Füllen Sie das Röhrchen komplett.**



## 6. Schritt

Nehmen Sie den Urin-Auffangbecher zur Hand und sammeln Sie darin eine Erststrahlurinprobe (siehe „Anweisungen zur Testdurchführung“).

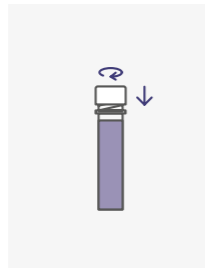


## 8. Schritt

Verschließen Sie das Urinröhrchen durch Aufschrauben des Verschlussdeckels.




## 9. Schritt

Ziehen Sie die beiden Code-Aufkleber von der Test-ID-Karte. Kleben Sie einen Code-Aufkleber auf das fertig gefüllte Probenröhrchen, den anderen Code-Aufkleber auf das Transportröhrchen.

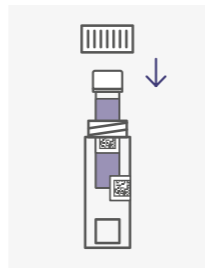

## 10. Schritt

Schieben Sie das gefüllte Urinröhrchen in das größere Transportröhrchen, **ohne das enthaltene Saugvlies zu entfernen.** Verschließen Sie das Transportröhrchen gut.

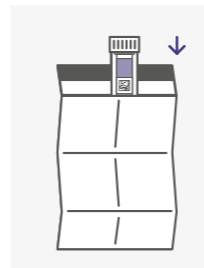

## 11. Schritt

Legen Sie das bestückte Transportröhrchen in den Rücksendeumschlag. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend kostenfrei per Post.



## 12. Schritt

Überprüfen Sie, ob Sie den Test aktiviert haben und entsorgen die benutzten Bestandteile im durchsichtigen Kunststoffbeutel im Hausmüll.

 **cerascreen®**

Der cerascreen® STI Test ist ein Probenahme- und Einsendekit zur Bestimmung von Erregern von sexuell übertragbaren Krankheiten. Der Test dient dem Nachweis von Erregern in Ihrem Erststrahlurin, die zu sexuell übertragbaren Krankheiten führen können. Die Probe wird in unserem spezialisierten cerascreen® Diagnostik-Partnerlabor in vitro ausgewertet.





### Hersteller:


cerascreen® GmbH  
Güterbahnhofstraße 16  
19059 Schwerin  
Deutschland

fragen@cerascreen.de

www.cerascreen.de  
SKU: 99090843  
CRS3-STI\_DE\_000  
Gültig ab April 2021



Lieferanten: Urinröhrchen , Transferpipette , Transportröhrchen mit Saugvlies , Urin-Auffangbecher : Sarstedt AG & Co.KG, Sarstedtstraße 1,51588 Nümbrecht, Germany

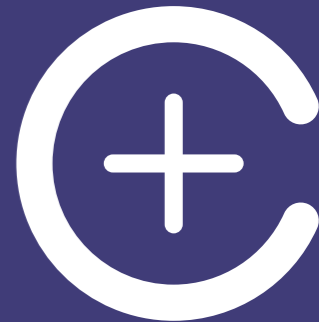

**STI Test**

GEBRAUCHSANWEISUNG

## Ihr Testkit beinhaltet




1 Urinröhrchen CE



1 Transferpipette CE



1 Transportröhrchen mit Saugvlies CE

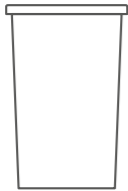

1 Urin-Auffangbecher CE



1 Rücksendeumschlag,  
1 Test-ID-Karte mit 2 Aufklebern

## Informationen und Hinweise

### WICHTIG



Führen Sie die Probenahme nur **von Sonntag bis Dienstag** durch und versenden Sie die Probe noch am Tag der Entnahme. Berücksichtigen Sie etwaige Feiertage.

Zur Auswertung der Probe wird der **Erststrahlurin** benötigt.

Eine Auswertung Ihrer Probe ist nur in Verbindung mit der Online-Aktivierung Ihres Tests unter Angabe Ihrer Test-ID möglich! Näheres dazu in Schritt 2 + 3.



In-vitro-Diagnostikum



Gebrauchsanweisung beachten



Nur zum einmaligen Gebrauch



Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C



Enthält 1 Kit



Hersteller



Verfallsdatum



Conformité Européenne



Chargennummer



Artikelnummer

### Allgemeine Informationen

- Bevor Sie beginnen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Halten Sie sich an die aufgeführten Schritte.
- Nach dem Infektionsschutzgesetz sind bestimmte sexuell übertragbare Krankheiten meldepflichtig. Eine nicht-namentliche (anonyme) Meldepflicht besteht unter anderem für Syphilis.
- Bei Verschlechterung Ihres Allgemeinzustandes durch zum Beispiel hohes Fieber oder Schmerzen wenden Sie sich bitte an Ihre (haus-)ärztliche Praxis oder rufen Sie die 116 117 an. Im Fall eines Notfalls wenden Sie sich direkt an die 112.

### Anweisungen zur Testdurchführung

- Nehmen Sie am Abend vor der Probenahme keine größeren Flüssigkeitsmengen (mehr als 1 Liter) zu sich.
- Für die Auswertung Ihrer Probe wird der **Erststrahlurin** benötigt. Darunter versteht man eine Urinprobe, die zu Beginn des Urinlassens aus dem

Harnstrahl gewonnen wird. Aus dem Harnstrahl werden ca. 60 ml im mitgelieferten Urin-Auffangbecher gesammelt. Der restliche Urin wird verworfen.

- **Wichtiger Hinweis für Frauen:** Entnehmen Sie keine Urinprobe während Ihrer Periode. Andernfalls ist keine valide Auswertung möglich.

### Warnhinweise

- Bewahren Sie das Kit unzugänglich für Kinder auf.
- Dieser Test ist nicht für Kinder geeignet.
- Das Entnahmekit dient der einmaligen Eigenanwendung.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten.

Wenn Sie Fragen haben besuchen Sie unser **Hilfeportal ([www.cerascreen.de/fragen](http://www.cerascreen.de/fragen))**.

## Anleitung



### 1. Schritt

Prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen für die Probenentnahme gegeben sind. Lesen Sie sich hierzu die Rubrik „Informationen und Hinweise“ aufmerksam durch.

### 2. Schritt

Sind Sie Neukunde, dann erstellen Sie sich ein Benutzerkonto unter [my.cerascreen.de](http://my.cerascreen.de) oder in der **mein cerascreen®-App**. In unseren „Häufig gestellte Fragen“ auf [www.cerascreen.de/fragen](http://www.cerascreen.de/fragen) finden Sie eine Anleitung für die Erstellung.



### 3. Schritt

Damit wir Ihren Ergebnisbericht erstellen können, loggen Sie sich auf [my.cerascreen.de](http://my.cerascreen.de) oder in der **mein cerascreen®-App** (Android, iOS) ein. Geben Sie unter „Test aktivieren“ die 6-stellige ID-Nummer gemäß Ihrer Test-ID-Karte ein und folgen Sie den Anweisungen.

### 4. Schritt

Legen Sie alle im Testkit enthaltenen Utensilien auf eine saubere Unterlage und überprüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind.

