

1. TÄRKEITÄ KÄYTTÖOHJEITA

Tämän maton tarkoituksena on tuottaa lempeää lämpöä eläimen maatessa sen päällä. Virtalähteenä on 12 V DC, joka takaa potilaan turvallisuuden. Koska matto tuottaa vain vähäistä lämpöä, se häviää heti lämmön tuottamisen jälkeen. On siis normaalia erehtyä luulemaan, ettei matto toimi kunnolla, jos asetat kätesi maton päälle etkä välittömästi tunne lämpöä. Jos sinun täytyy testata mattoa, on suositeltavaa asettaa sen päälle jokin painava esine, kuten suuri kirja, 30 minuutin ajaksi. Tällöin matto alkaa lämmitä.

2. KOKOAMINEN

Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tarkista sisältö. Pakkauksessa on matto sekä siihen kiinnitetty säätörasia, muuntaja ja kaksi virtajohtoa – toinen on tarkoitettu käytettäväksi Isonsa-Britanniassa ja toinen Euroopassa. Yhdistä säätörasian ja muuntajan liittimet toisiinsa. Liitä oikea virtajohto muuntajaan.

3. KÄYTTÖVINKKEJÄ

1.1 YLEISTÄ

Aseta matto paikkaan, jossa sitä on tarkoitus käyttää, ja varmista, että se on tasaisella alustalla.

Ei ole suositeltavaa asettaa eläintä suoraan lämpimälle matolle. Valitse lämpötila, joka mahdollisimman hyvin vastaa eläimen tarpeita. On tärkeää tarkistaa eläimen elimistön lämpötila säännöllisin väliajoin, jottei se nousisi liian korkeaksi. Peitä matto kevyellä liinalla; näin lämpö pääsee läpi. Lämmönhukan välttämiseksi potilaan päälle voidaan asettaa peite.

Jos lämpömattoa käytetään eristämättömällä lattialla, kuten betonipohjalla, on suositeltavaa asettaa maton alle peite tai vastaava, jotta vältettäisiin lattian kautta tapahtuva lämmönhukka.

1.2 LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

EickWarm-lämpömaton lämpötila voidaan säätää välille 35–45 °C. Matossa on ajastin, joka kytkee lämmityksen automaattisesti pois päältä säädetyn ajan kuluttua. Näin voidaan välttää eläimen nahan irtoaminen, mitä saattaa esiintyä, kun makaavassa asennossa oleva eläin jätetään pitkäksi aikaa lämpömatolle eikä sitä käännetä välillä.

Ei ole suositeltavaa asettaa eläintä suoraan lämpimälle matolle. Valitse lämpötila, joka mahdollisimman hyvin vastaa eläimen tarpeita. On tärkeää tarkistaa eläimen elimistön lämpötila säännöllisin väliajoin, jottei se nousisi liian korkeaksi.

Virransyöttöä ei tule katkaista sinä aikana, kun lämpöä tarvitaan. Pidä MODE-painike pohjassa siihen asti, kunnes punainen lämpötilavallo syttyy palamaan. Valitse UP- ja DOWN-painikkeiden avulla vaadittu lämpötila, joka näytetään celsiusasteina LED-näytössä. Anna maton olla kytkettynä sähköverkkoon koko sen ajan, kun lämpöä tarvitaan.

1.3 AJAN SÄÄTÄMINEN

Pidä MODE-painike pohjassa siihen asti, kunnes oranssi lämpötilavallo syttyy palamaan. Valitse UP- ja DOWN-painikkeiden avulla vaadittu aika 1 ja 9 tunnin väliltä.

1.4 KÄYTTÖ

Painamalla START-painiketta matto alkaa lämmitä. Vihreä lämmitysvalo syttyy palamaan. Kun valittu aika on kulunut, vihreä lämmitysvalo sammuu ja matosta katkeaa virta. Tunnit näkyvät edelleen LED-näytössä. Jos START-painiketta painaa silloin, kun vihreä lämmitysvalo palaa, lämmitys päättyy.

4. PUHDISTUS

Irrota matto aina verkkovirrasta ennen sen puhdistamista. Maton pinta on vettä hylkivää materiaalia, joka voidaan pyyhkiä puhtaaksi miedolla desinfiointiaineella. Jos matto on hyvin likainen, puhdistamiseen voidaan käyttää puhdistusainetta. Älä koskaan upota mattoa veteen.



5. TERVEYS JA TURVALLISUUS

Jos lämpömattoa käytetään säännöllisesti tai sairaiden ja heikkojen eläinten hoidossa, se tulisi tarkistaa usein. Jos eläimellä, jonka hoitoon sitä aiotaan käyttää, on taipumusta purra maton osia, on suositeltavaa tehdä muutamia varotoimia maton suojaamiseksi. Tämä voidaan toteuttaa seuraavasti: sahaa ohuesta vanerista hieman lämpömattoa suurempi pala, aseta lämpömatto levyn päälle ja kiedo niiden ympärille jokin paksu kangas, esim. säkki- tai purjekangas, ja kiinnitä kangas levyn alapintaan. Lämpö pääsee edelleen paksun kerroksen läpi.

Jos eläin, jonka hoitoon matto on tarkoitettu, pureskelee mattoa jatkuvasti, on suositeltavaa luopua maton käytöstä kyseistä eläintä hoidettaessa. Jos kuitenkin haluat käyttää mattoa ja olet huolissasi pureskelusta, useimmista rautakaupoista voi ostaa metallisia suojuksia ja katkaisijoita johtoa varten.

HUOMIO - ON TÄRKEÄÄ NOUDATTAA SEURAAVIA OHJEITA

ÄLÄ pese tai kuivapese

ÄLÄ käytä märkänä

ÄLÄ taita

ÄLÄ upota veteen

ÄLÄ kohdistaa jännitettä tai painetta johtoon

Älä kiinnitä mattoon teräviä esineitä

ÄLÄ käytä pehmeiden kalusteiden päällä

Vältä terävien taitoskohtien tekemistä mattoon. Tarkista matto säännöllisesti ja tutki, onko siinä kuluneita tai vaurioituneita kohtia. Jos tällaisia tai muita kulumisen merkkejä löytyy, lämpömatto on toimitettava huoltoon. On suositeltavaa huoltaa matto kahden vuoden välein; ks. kohta "Huolto ja korjaukset".

6. HUOLTO JA KORJAUKSET

Jos lämpömatossa havaitaan vaurioita tai vikoja, sitä ei pidä yrittää korjata itse millään tavalla. Toimita tuote sen sijaan EICKEMEYER®-liikkeeseen tai ota yhteyttä EICKEMEYER®-asiakaspalveluun lisätietojen saamiseksi ja ilmoita huomautuksen aihe.

7. YHTEYSTIEDOT

Ota puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä paikalliseen EICKEMEYER®-asiakaspalveluun, jos kaipaat neuvoja tuotteen käyttöönoton tai asennuksen yhteydessä tai haluat lisätietoja lämpömaton käytöstä.

MUISTIINPANOJA:
