




Dentanomic

PIKAOPAS

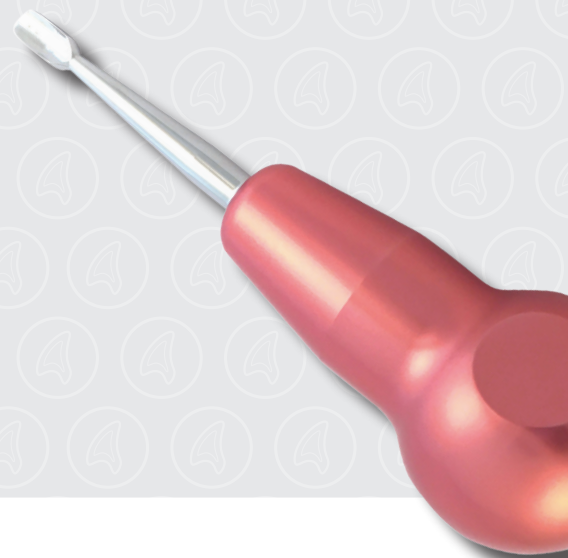


Terissämme on ohuimmat ja terävämmät reunat kuin mihin ehkä olet tottunut. Nämä ominaisuudet nopeuttavat ja helpottavat hammasoperaatioita.

Hampaanpoistotekniikkaasi kehittämällä saat täyden hyödyn teristämme ja opit suojaamaan instrumentteja. Osallistu **ilmaiseen** webinaari-koulutukseen, jossa käsitellään instrumentin käyttötekniikkaa - www.dentanomic.com/training-session



ELEVAATTORI

Hyödyllinen, kun kyse on lyhyistä, vahvoista juurista. Venyttää parodontaaliligamenttia.

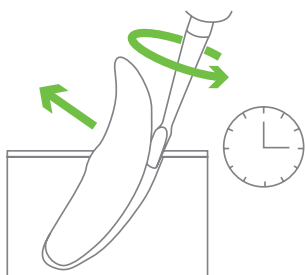

Työnnä terä parodontaalirakoon.


Käännä instrumenttia rauhallisesti KERRAN, kunnes tunnet vastuksen. Sen jälkeen PIDÄ yllä tasaista painetta.

Venytä ligamenttia 15-30 sekunnin ajan. Toista tämä hampaan koko ympärysmitalta.



LUKSAATTORI

Hyödyllinen, kun kyseessä on ohuet, heikot juuret. Leikkaa parodontaaliligamentit

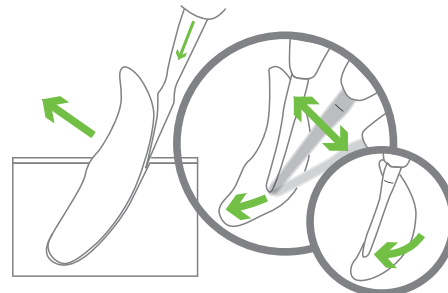

Työnnä terä parodontaalirakoon.

Keinuta terää vinottain parodontaalisella alueella. **ÄLÄ** pyöritä terää äläkä vipua sitä pois hampaan läheisyydestä; pysy parodontaaliraossa.

Mukauta terä juuren ympärille ja pidä terän leveä sivu juurta vasten parodontaaliraossa.

Kiinnitä huomiota ohuen terän reunoihin - terän kunto kertoo leikkaustekniikastasi

VAURIOITUNEEN TERÄN REUNA TAI SIVU

Tämä aiheutuu terän pyörittämisestä tai edestakaisesta työntöliikkeestä tai liian nopeasta voimankäytöstä hammasta vasten.



Tällaisen tekniikan käyttö ei anna ligamenteille aikaa venyä. Tuloksena juuren vaurioituminen ja vääntyneet terän reunat.

VÄÄNTYNYT REUNA

Tämä johtuu siitä, että terä siirretään pois hampaan läheisyydestä ennemminkin vipuamalla kuin nostamalla tai luksoimalla.



Tämä tekniikka estää terää työntymästä syväälle ligamenttirakoon, hidastaa työskentelyä ja taivuttaa terän.

Vaihda terä käyttämällä avainta tai kolikon mallista esinettä. Terän vaihtaminen tapahtuu nopeimmin pitämällä avainta paikoillaan ja kahvaa kääntämällä. Vain hellävarainen kiristäminen on tarpeen.

Pidä Dentanomic-instrumentteja kämmenotteessa estääksesi vaaralliset lipsumiset.


Vakiokahvat ja lyhyet kahvat:

Pienille ja keskikokoisille käsille / hanskan koko < 7,5

Pitkät kahvat:

Suurille käsille / hanskan koko > 7,5

Terän kiinnitys on universaali – kaikki terät sopivat kaikkiin kahvoihin.

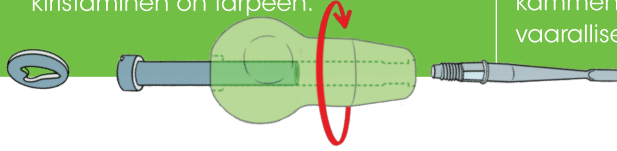


PUHDISTAMINEN

VAROITUS! Jotkin emäksiset puhdistusliuokset poistavat Dentanomic-kahvojen suojaavan anodisoidun kerroksen! Käytä puhdistamiseen liuoksia, joiden pH on neutraali.

Irrota terät kahvoista. Erottele värilliset kahvat teräosista, jotta värillisiin pintoihin ei tulisi näkyviä värivaurioita puhdistuksen yhteydessä. Käytä teräs- ja alumiini-instrumenttien puhdistamiseen soveltuvia puhdistusaineita. Käytä deionisoitua (tislattua) vettä ultraäänipuhdistuksessa ja loppuhuuhtelussa värillisen pinnan suojaamiseksi.

Hävitä vaurioituneet ja tylsät terät. Tarkista ja hio terän reunat jokaisen käytön jälkeen. Steriloi kahvat ja terät autoklaavissa, säilytä kuivana autoklaavipusseissa.

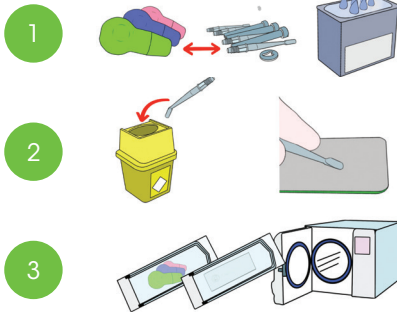


PIDÄ INSTRUMENTTI TERÄVÄNÄ

Päivittäin hiotut terät kestävät 10 kuukautta päivittäistä käyttöä.

Satunnaisesti hiotut terät kestävät 3 kuukautta päivittäistä käyttöä.

Jos teriä ei hiotu ja niitä käytetään enemmän kuin 3 kertaa päivässä, terät kestävät 1–3 kuukautta.

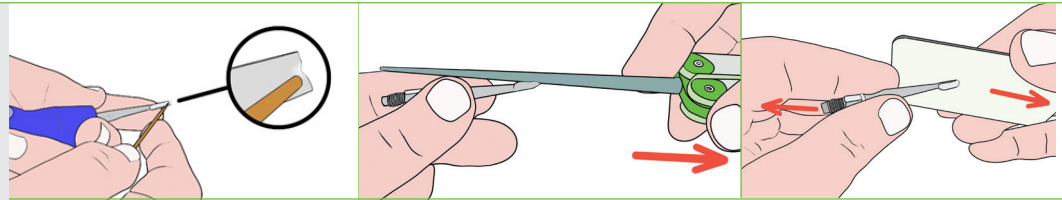

Kuljeta hammas- tai cocktailtikku terän reunan yli – näin tunnistat mahdolliset vauriot, jos terän reuna on epätasainen tai taipunut. Käytä soveltuvia silmä- ja käsisuoja hioessasi teriä.

DENTANOMIC-HIONTASETIN KÄYTTÖ:

Hio taipuneita tai vaurioituneita reunoja niiden suoristamiseksi ja uudelleen kohdistamiseksi. Älä yritä hiotessa poistaa reunan epätasaisia kohtia.


Käytä kartiota koverille pinoille ja korttia kuperien ja suorien pintojen reunoille.

Käytä hionnassa hellävaraisia liikkeitä terän leikkauskulman suuntaisesti.

EROTTELE

Elevaattoriterillä on paksu sivuprofiili.

Luksaattoriterillä on ohut, kaksireunainen sivuprofiili.

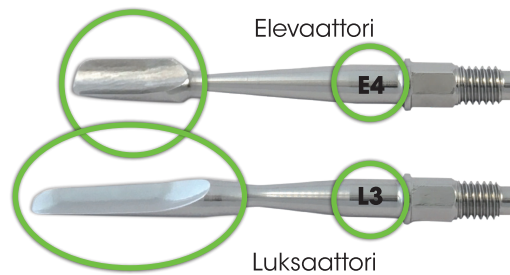

TERIEN KAIVERRUKSET

E = Elevaattori

L = Luksaattori

Numero = terän leveys (mm)

JÄLLEEN-MYYJÄT:

veterinary technology for life
Eickemeyer®



Puh.: +358 2 7221 222

S-posti: vetman@vetman.fi

www.vetman.fi

Vetman, Maoriantie 1

FI-24800 Hallikko

Tämä asiakirja ei korvaa ammattimaista kirurgista koulutusta. Asianomainen lääkäri vastaa toiminnasta aina kaikilta osin. Bonovate Ltd ja sen jälleenmyyjät eivät vastaa mahdollisista komplikaatioista.