



# HAMMASKIRURGIAN TERÄVIN KÄRKI

Dentanomic-terät toimivat loistavasti, koska niissä on ohut terävä reuna, joka leikkaa helposti parodontaaliligamentit. Mutta aivan kuten leikkausveitsi, terän tylsyttyä tai taivuttua, se ei ole enää tehokas.

## NÄIN TARKISTAT TERÄN REUNAT:



Hae teräsi reunasta taipuneita kohtia tai halkeamia valoa vasten tai puhelimesi kamerasuojan avulla.



Tunnustele cocktailtikun tai injektioneulan avulla onko terän reuna taipunut. Terän säännöllisellä hionnalla voidaan suoristaa vähäiset taipumat.

## AJAN MITTAAN TERÄN REUNAT KULUVAT JA TERÄ PITÄÄ VAIHTAA UUTEEN:

Vaihda terät

**1**

KUUKAUDEN  
VÄLEIN

Yli 3 hammastoimenpidettä päivässä - ei hiontaa

Vaihda terät

**3**

KUUKAUDEN  
VÄLEIN

1-2 hammastoimenpidettä päivässä - satunnaista hiontaa

Vaihda terät

**10**

KUUKAUDEN  
VÄLEIN

Päivittäisiä hammastoimenpiteitä - päivittäistä hiontaa