


# Kaßla®

## Panel de Drogas Instant-View

Prueba para detectar múltiples drogas  
en una sola muestra de orina

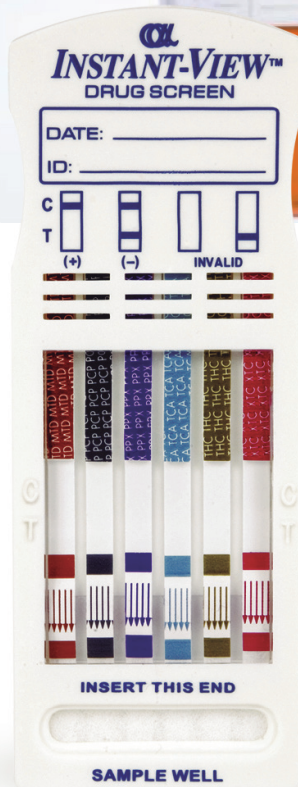

**INSTANT-VIEW®**  
MULTI-TEST DRUGS OF ABUSE PANEL

## Acerca de Panel Instant-View

El Panel de Drogas en Orina Instant-View es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia desde 2 y hasta 12 diferentes drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo.

Existen diferentes presentaciones que varían de acuerdo a la cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar.

Para cada tipo de droga le corresponde un resultado independiente, el cual puede ser positivo o negativo, dependiendo si se rebasan los puntos de corte. Adicionalmente, cada tira incluye un control que permite verificar si el procedimiento de la prueba se desempeña correctamente.



## Características de la Prueba



**Método Fácil  
y Práctico**



**Resultados  
Rápidos  
(5 a 10 min)**



**No Requiere  
Refrigeración**



**Confiable  
(99.7% de Precisión)**



## Ventajas y Beneficios

- Más de 24 combinaciones de diferentes drogas disponibles
- Detecta de 2 hasta 12 diferentes drogas en una misma muestra de orina
- Altamente confiable y preciso
- Fabricado en E.E.U.U




## Modo de empleo

- 1 Recolecte una muestra de orina considerable de la persona.

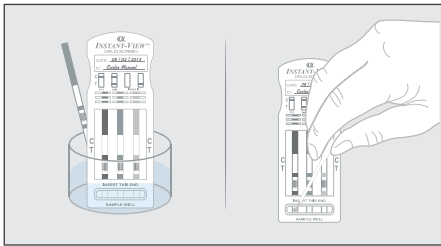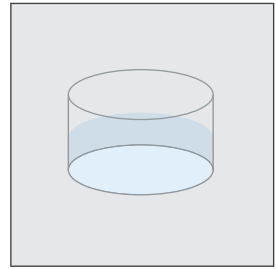

- 2 Inmerse la prueba de su elección en la muestra de orina de 5 a 10 segundos y después coloque la prueba en un trapo para secarse. O si lo prefiere, utilice un gotero para recolectar la muestra y aplique al menos 5 gotas a cada tira hasta mojarlas bien.

- 3 La presentación de resultados se da en un plazo de 3 a 5 minutos.

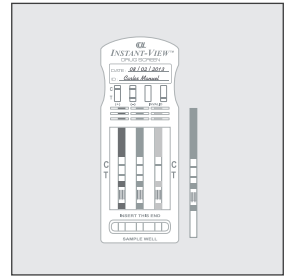

## Interpretación de Resultados

C   
T Positivo (+)

Si la línea C aparece y no hay línea T, el examen indica un resultado positivo para aquella droga en particular. Muestras con resultados positivos deben confirmarse con un método más específico antes de una determinación positiva.

C   
T Negativo (-)

Si una línea C y una línea T aparecen, la prueba indica que el nivel correspondiente a la droga o sus metabolitos es inferior del punto de corte.

C   
T 

Si no se desarrolla una línea C dentro de 5 minutos en cualquiera de las tiras reactivas, el ensayo es inválido y en este caso habrá que repetir el examen con un dispositivo nuevo.

Inválido

## Parámetros Disponibles

- Anfetamina (AMP)	- Fenciclidina (PCP)
- Barbitúricos (BAR)	- Propoxifeno (PPX)
- Benzodiazepinas (BZD)	- Oxiconona (OXY)
- Cocaína (COC)	- Antidepresivos Tricíclicos (TCA)
- Marihuana (THC)	- MDMA (XTC)
- Morfina (Opiáceos) (OPI)	- Metadona (MTD)
- Ketamina	- Metanfetamina (MET)

## Información para Pedidos

Las siguientes presentaciones se encuentran a su disposición para entrega inmediata.

Catálogo	Parámetro	Espécimen
03-3270	COC + THC	Orina
03-3375	AMP + COC + THC	
03-3338	AMP300 + COC150 + THC	
03-3371	COC + MET + THC	
03-3343	BZD + COC + THC	
03-3458	AMP + COC + OPI + THC	
03-3457	BZD + COC + MET + THC	
03-3461	AMP + COC + MET + THC	
03-3420	AMP + COC + THC + XTC	
03-3438	COC + MET + THC + XTC	
03-3577	AMP + COC + MET + OPI + THC	
03-3520	AMP + BAR + BZD + COC + THC	
03-3522	BAR + BZD + COC + MET + THC	
03-3529	AMP + BZD + COC + MET + THC	
03-3533	AMP + BZD + COC + OPI + THC	
03-3534	AMP + BAR + COC + MET + THC	
03-3571	BZD + COC + MET + OPI + THC	
03-3578	MET + COC + OPI + PCP + THC	
03-3576	AMP + COC + OPI + PCP + THC	
03-3537	AMP + BAR + COC + MET + THC	
03-3635	AMP + BZD + COC + MET + OPI + THC	
03-3669	AMP + BAR + BZD + COC + MOR300+ THC	
03-3665	AMP + BAR + BZD + COC + MET+ THC	
03-3678	BAR + BZD + COC + MET + OPI + THC	
03-3679	AMP + COC + MET + OPI + PCP+ THC	
03-3650	AMP + COC + MET1000 + MOR2000 + THC + XTC	
03-3762	AMP + BAR + BZD + COC + MET + OPI + THC	
03-3855	AMP + BAR + BZD + COC + MET+ OPI + PCP + THC	
03-3909	AMP + BAR + BZO + COC + MET + MTD+ OPI300 + PCP + THC + XTC	
03-3963	AMP + BAR + BZO + COC + MET + MTD + OPI + PCP + PPX + TCA + THC +XTC	