



Certum E-Z Split Key Cup

Frasco integrado para detección de múltiples drogas



Acerca de Certum

Certum Diagnostics ofrece la mejor opción en pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardíacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros.

Todos los productos de Certum cumplen con el objetivo de ser rápidos, fácil de utilizar, económicos y confiables.

Certum E-Z Split Key Cup



Es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en orina.

Debido a que cuenta con un sistema de seguridad único, termómetro y panel de resultados montado de manera independiente, éste frasco se encuentra notablemente por encima de cualquier opción en el mercado.

Para utilizar el frasco tan solo se debe recolectar una muestra de orina en el interior del mismo, activar la prueba por medio de su llave de seguridad y esperar a que el panel ubicado en la parte trasera del frasco nos presente los resultados en menos de 5 minutos.


Adicionalmente el termómetro integrado nos permitirá determinar si la orina obtenida es reciente para evitar que haya alguna trampa por parte del donador.

E-Z Split Key Cup brinda resultados cualitativos de manera independiente para cada una de las drogas detectables.

Beneficios


- **Sensibilidad:** Todas nuestras pruebas se someten a los puntos de corte especificados por SAMSHA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) en los Estados Unidos para realizar exámenes de drogas en el Centro de Trabajo.
- **Precisión:** Para cada uno de los parámetros detectables se ha demostrado una concordancia promedio de más de 99% respecto a pruebas de laboratorio de gases con espectrometría de masas, tanto en resultados positivos como en negativos.
- **Estabilidad:** E-Z Split Key Cup estable durante 24 meses después de su fecha de fabricación. Así mismo no precisan de requerimientos de almacenaje especiales ni refrigeración.

Características Principales

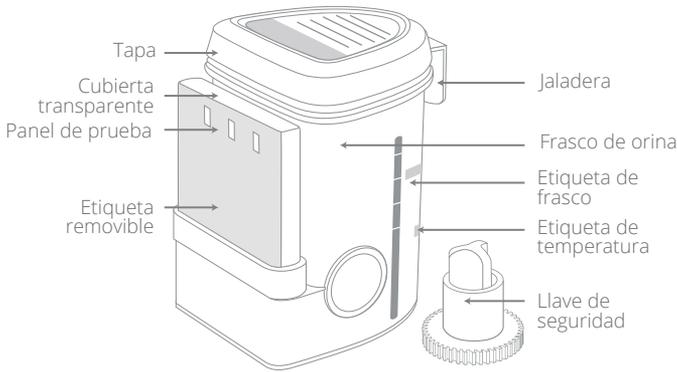

Modo de Empleo

- 1 Preparación: Etiqueta de seguridad, guantes, frasco E-Z Split Key Cup, muestra de orina, llave.

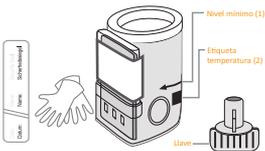


- 2 Retirar la etiqueta y abrir la tapa, depositar la muestra en el recipiente y cerrar la tapa presionando en las tres esquinas. Anotar el nivel mínimo de orina. Comprobar la temperatura 4 minutos después de la recogida de la muestra.




- 3 Comprobar que la tapa se encuentra perfectamente cerrada, y la fecha e iniciales de la etiqueta de seguridad se encuentran sobre la misma.




- 4 Tomar la llave del kit, depositarla en una superficie plana, y empujar la llave dentro del orificio del recipiente para comenzar el test. Cronometrar el tiempo.

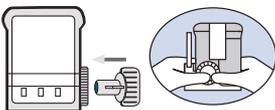

- 5 Retirar la etiqueta donde aparecen los resultados y esperar a que aparezca la línea coloreada.

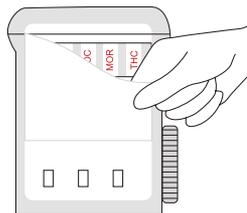

- 6 Después de 5 minutos, interprete los resultados. Debe evaluarlos antes de los 10 minutos, si deja pasar más tiempo los resultados serán inválidos.

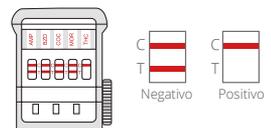



Catálogo	Producto / Parámetro	Espécimen	Formato
DOA-1237-19	AMP + COC + THC	Orina	Frasco
DOA-1257-19	AMP + COC + MET + OPI + THC		
DOA-0157-02	AMP + BAR + BZD + COC + THC		
DOA-2167-19	AMP + BZD + COC + MET + OPI + THC		
DOA-1871-11	AMP + BZD + COC + MET + OPI + THC + PCP + BAR		
DOA-1107	AMP + BZD + COC + MET + OPI + THC + PCP + BAR + MTD + XTC		