

REF КАТАЛОЖЕН НОМЕР

MD МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

Стоматологични лъчезащитни престилки

Предназначение:

Лъчезащитните престилки Palmero Healthcare се използват за защита на пациента от рентгеновите лъчи, генерирани от образни системи. За употреба само от пациенти, освен ако не е посочено друго.

Предлагат се в различни цветове за следните приложения:

Стоматологични престилки = .35 mm оловен еквивалент

Основни материали:

Стоматологичните престилки са произведени от:

- вътрешен и външен слой от винил/найлон
- изолиращ слой от олово или антимон/бисмут

Инструкции за употреба:

УПОТРЕБА: Поставете на пациента ПРЕДИ облъчването с рентген.

ПОЧИСТВАНЕ: Използвайте сапун и вода или препарат за почистване на винил.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ: Използвайте само дезинфектант за винил.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Предайте за рециклиране съгласно местните регламенти за изхвърляне на обвивки от олово/винил.

Предупреждения и предпазни мерки:

ОБСЛУЖВАНЕ: Не излагайте престилката на екстремни температури, не я потапяйте в течности и не я поставяйте в сушилня.

СЪХРАНЕНИЕ: Не сгъвайте, не мачкайте и не полагайте престилката върху остри ръбове. Окачвайте я внимателно.

СКРИТА ПОВРЕДА: Злоупотреба може да причини скрита повреда. Престилките трябва редовно да се проверяват визуално за повреда и да се подлагат ежегодно на рентгенографска или флуороскопска проверка, за да се гарантира непрекъснатата цялост.

Съгласно регламента за медицинските изделия на ЕС потребителите/пациентите са длъжни да докладват сериозни инциденти с медицинско изделие на производителя и компетентния орган в държавата, в която са се състояли.



Само ръчно пране



Да не се използва белина



Не използвайте химическо чистене



Да не се глади



Не използвайте центрофуга за изсушаване



Защита срещу йонизиращи лъчения

- Модул В и модул D, нотифициран орган: 2895, Shirley Technologies (Europe) Limited, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
- Удостоверява, че този продукт е сертифициран съгласно Регламента (ЕС) за ЛПС 2016/425
- Означава, че този продукт осигурява защита срещу медицински рентгенови лъчи и използваният защитен материал е с оловен еквивалент 50 kV – 110 kV, както е показано на етикета на облеклото.
- Използваните при производството на продуктите материали са тествани чрез методи, еквивалентни на EN61331-1:2014

ISO 9001

Този продукт е произведен в завод, чиято система за управление на качеството е регистрирана по ISO 9001:2015

Декларация за съответствие

ЕС декларацията за съответствие е достъпна онлайн: <https://www.palmerohealth.com/pages/eu-certificates>