

Neuro+lux




SILLA PARA BAÑO

Modelo: 83912

Manual de usuario

Por favor, lea este manual con detenimiento antes de utilizar este producto y consérvelo para futuras consultas.

CONTENIDO

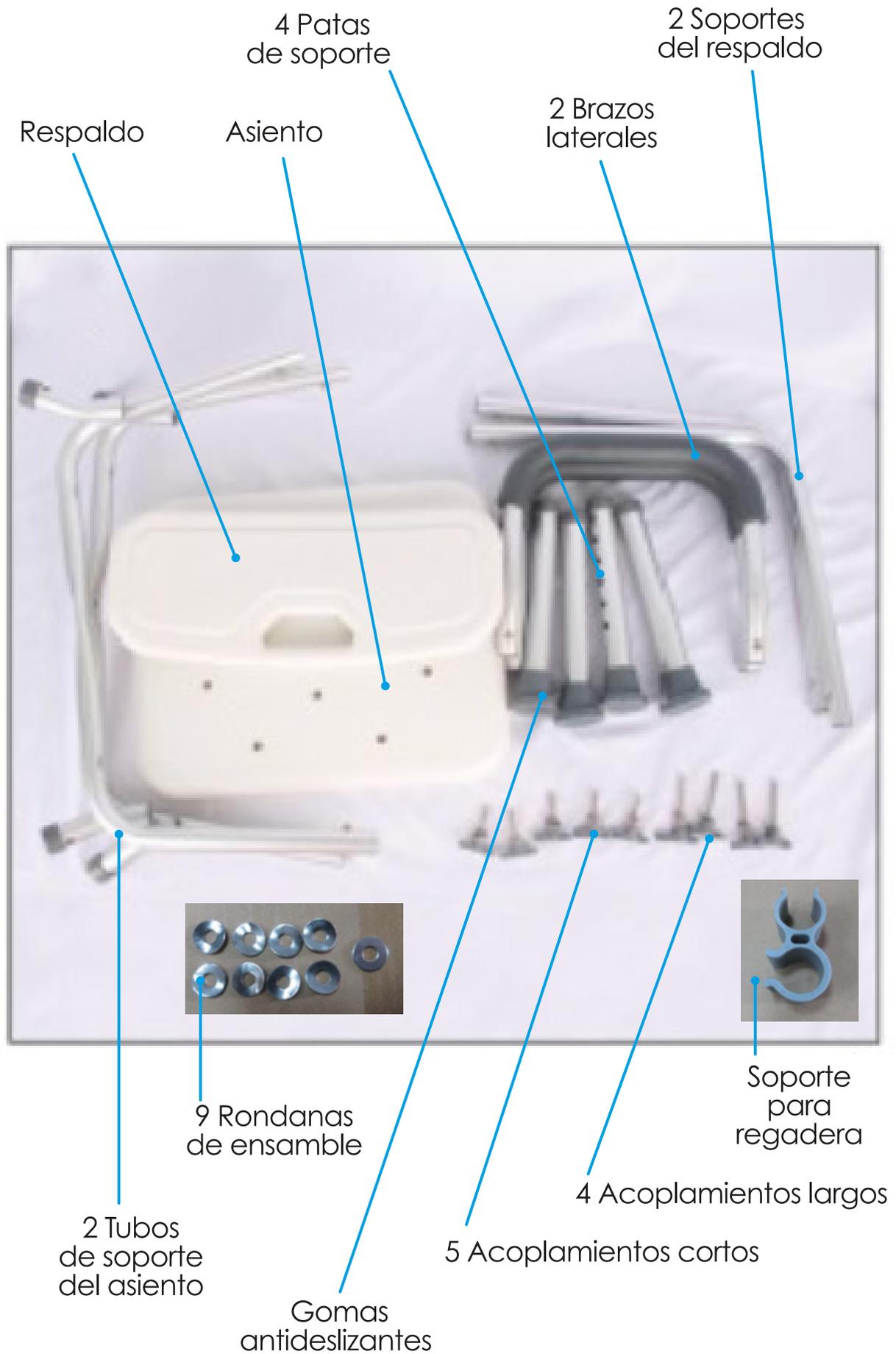

PARTES DEL PRODUCTO



ADVERTENCIA

No utilice este producto sin cerciorarse que todos los componentes estén instalados y ajustados correctamente.

Evite exponer el producto al fuego o fuentes de calor extremas que puedan dañarlo o alterar su funcionamiento.

No utilice este producto si alguna parte de sus partes está dañada, rota o falta alguna de las piezas.

No sacuda ni aplique fuerza excesiva en este producto.

Evite ejercer fuerza excesiva al momento de ensamblar o desensamblar este producto para evitar daño en sus componentes. El maltrato puede ocasionar daños, riesgo de lesiones y perderá la garantía. Para hacer válida la garantía debe conservar empaque, manual y accesorios originales.

Este producto no está destinado para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban la supervisión o capacitación para el funcionamiento de este producto por una persona responsable de su seguridad.

Las imágenes mostradas en el manual son meramente representativas y pueden discrepar del producto original sin previo aviso.

PRECAUCIONES:

Asegúrese que todos los componentes se encuentren instalados correctamente y que todos los acoplamientos estén ajustados en su totalidad.

Todas las patas deben estar a la misma altura, todos los seguros de ajuste de las patas deben salir por al menos 3 mm.

No apoye su peso completo u objetos pesados en el respaldo de la silla para baño. Evite balancearse sobre la silla.


Asegúrese que las 4 patas y gomas antideslizantes se encuentren pegadas al piso para evitar accidentes.

No use la silla para baño para trabajar o para sentarse en otro lado. No se pare en ella o podría accidentarse y dañar el producto.

Lave y limpie con un paño después de cada uso. Si no se encuentra en uso, mantenerlo en un lugar ventilado y seco.

Verifique cada cierto tiempo si los acoplamientos se encuentran flojos (de ser así apriételos en su totalidad). Si las gomas antideslizantes se van desgastando cámbielas con tiempo.

Asegúrese de haber recibido el producto y sus accesorios completos de acuerdo a la lista de contenido de este manual, si tiene piezas faltantes o dañadas, evite utilizar el producto y póngase en contacto con servicio al cliente.

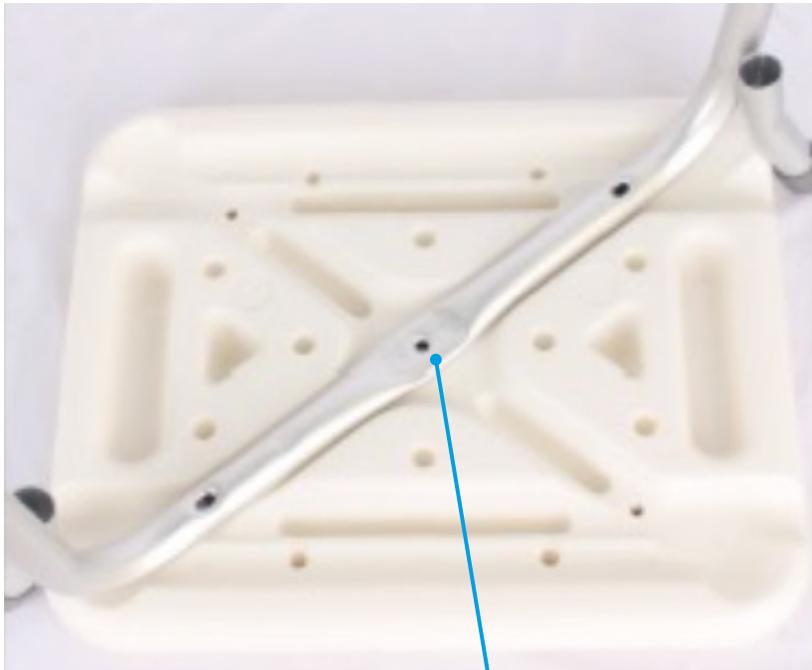


Soporte de asiento

1. Coloque el asiento al reverso viendo hacia arriba (como se muestra en la imagen). Inserte el primer tubo de soporte de manera diagonal, use los surcos para conectarlo, (el tubo debe quedar con los seguros viendo hacia arriba).




2. Coloque el segundo tubo de soporte por encima del primero, quedarán los dos soportes en forma de cruz como se muestra en la imagen. El asiento tiene unos señalamientos con las letras A y B. El tubo de soporte con la moldura hacia arriba va en el surco A, y el tubo de soporte con la moldura hacia abajo va en el surco B.

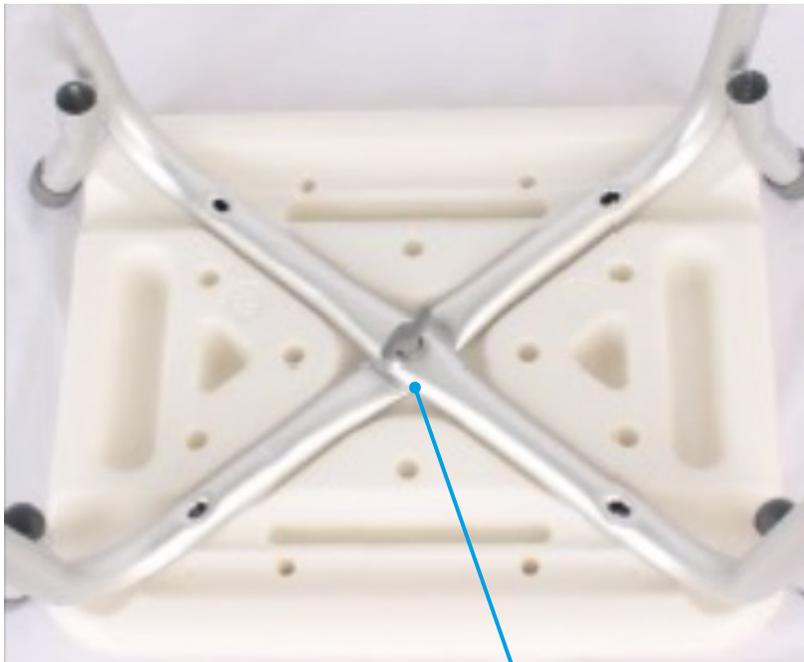


Acoplamiento

3. Coloque un acoplamiento corto al centro de la silla para baño, donde se conectan los dos tubos de soporte del asiento. Coloque la rondana plana entre el acoplamiento y los tubos de soporte. (El resto de las rondanas curvadas son para colocar entre los tubos y el resto de los acoplamientos).

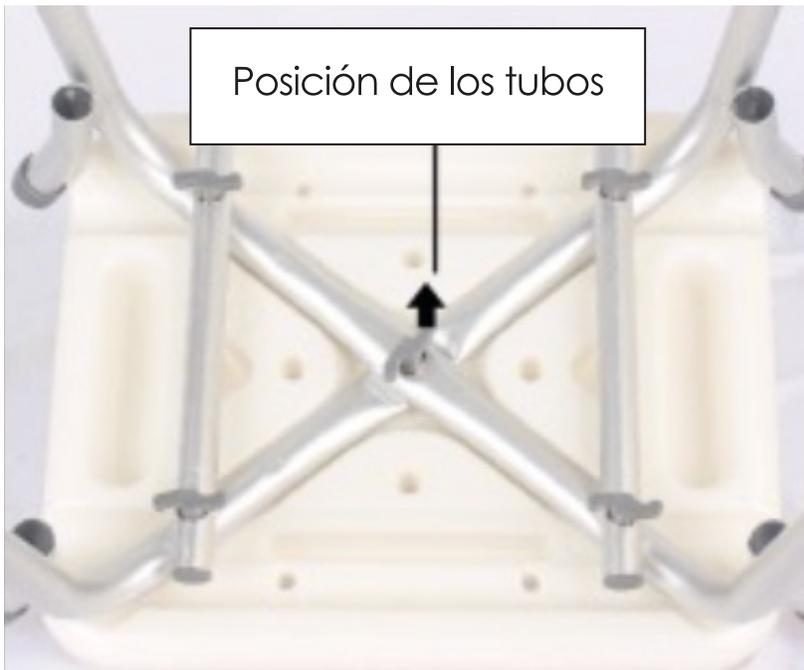

Posición de los tubos

4. Coloque los dos soportes de respaldo y únalos a los tubos de soporte del asiento con 4 acoplamientos largos y 4 rondanas curvadas en los orificios correspondientes.

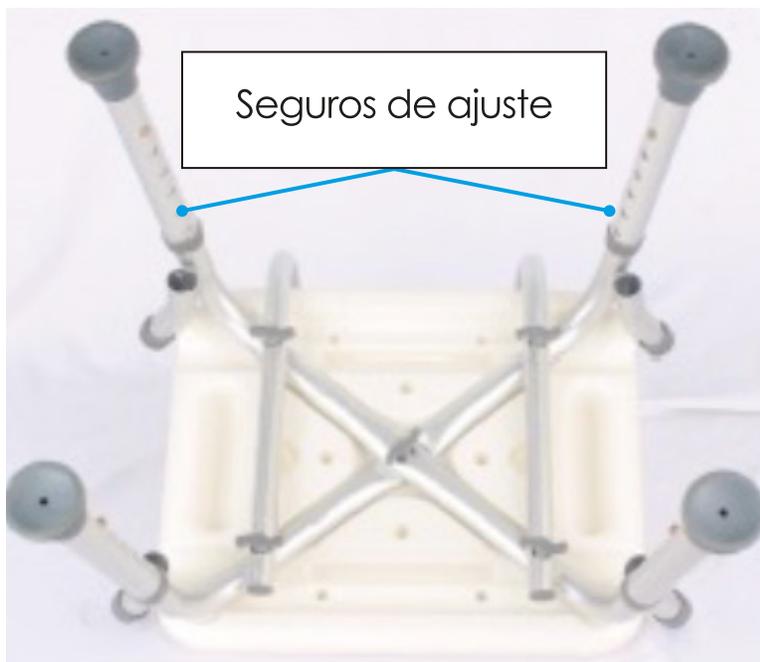

5. Coloque las 4 patas con gomas antideslizantes en las patas de los tubos de soporte del asiento. Bájelas hasta que las 4 se encuentren en donde desea, el botón de ajuste se debe oprimir para poder insertar cada pata y estará lista cuando los seguros de ajuste salgan por al menos 3 mm de cada pata.



6. Levante la silla para baño para que quede apoyada sobre las 4 patas con gomas antideslizantes. Coloque el respaldo en el soporte correspondiente, debe quedar centrado acorde con los agujeros para que se puedan colocar los acoplamientos. Sujete el respaldo con 4 acoplamientos cortos y 4 rondanas curvadas, deben quedar como se muestran en la imagen.



7. Coloque los brazos laterales en los tubos cortos del tubo de soporte del asiento, haga presión sobre los seguros de ajuste hasta que queden bien ajustados (tenga cuidado para no dañar o doblar los componentes).



8. La silla para baño quedará lista para utilizarla, verifique que todos los acoplamientos se encuentren apretados y que cada componente se encuentre correctamente ajustado.

AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA PARA BAÑO:



Presione los seguros de ajuste hasta meterlos por dentro de los tubos de las patas, después baje o suba la silla para baño hasta que quede a la altura que desea y saque los seguros de ajuste por el orificio. Recuerde que deben salir por al menos 3 mm.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Materiales:	Aleación de aluminio y plástico
Altura ajustable del asiento:	37.5 a 50 cm
Altura total ajustable:	66 a 78 cm
Ancho y profundidad:	53 cm y 42 cm
Tamaño del asiento:	40 cm x 33 cm
Peso recomendado:	150 Kg
Peso máximo soportado:	199.581 kg
Peso de la silla para baño:	3 kg

RL1223