

Glandomed® - apelsinų skonio burnos skalavimo skystis, 500 ml.
Medicinos priemonė

Sudėtis: Makrogolis 300, makrogolis 1500, natrio hidrokarbonatas, natrio sacharinas, natrio edetatas, chlorheksidino gliukonatas, apelsinų skonio kvapiosios medžiagos, vanduo. Be alkoholio ir mentolio.

Medicinos priemonė vartojama visapusiškai burnos ertmės priežiūrai ir profilaktikai, ypač sergant įvairios kilmės burnos mukozitu (burnos gleivinės uždegimu). Apsaugo nuo infekcijų ir apnašų susidarymo.

Vartojimas: Glandomed® yra vartojimui paruoštas burnos skalavimo skystis. Jo skiesti nereikia. Burną skalaukite apie 2 minutes 20 ml Glandomed® skysčiu po valgio ir prieš miegą (naudokite kamštelį su matuokliu). Po to skystį išspjaukite. Burnos perskalauti vandeniu nereikia. 15 min. po skalavimo nieko nevalgykite ir negerkite. Pavartoję skysčio, buteliuką uždarykite. Prireikus Glandomed® galima vartoti ir dažniau. Sergant mukozitu arba kserostomija (burnos sausumas dėl sumažėjusio seilių kiekio) rekomenduojama skalauti burną kas 2 valandas ir prieš miegą (laikantis anksčiau išvardintų nurodymų).

Prieš pradėdami vartoti šią medicinos priemonę, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Laikykitės pateiktų nurodymų!

Medicinos priemonę laikykite ne žemesnėje nei 15° C temperatūroje ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo vaikų!

Galiojimo terminas ir serija nurodyti ant dėžutės.

Gamintojas: Cell pharm GmbH, Theodor-Heuss g. 52, D-6118 Bad Vilbel.

Platintojas: UAB „Stada- Nizhpharm- Baltija“, A. Goštauto g. 40A, LT- 03163, Vilnius, Lietuva. El. paštas: info@stada.lt.