

Bruksanvisning MedM Health app

Last ned MedM Health appen fra App Store, Google Play eller Windows Store.



Er du ny bruker, trykk på knappen «**Register**».

Registrer deg med din e-post adresse og et enkelt passord. Det vil bli sendt en e-post til denne adressen med informasjon om hvordan du kan logge deg på kontoen fra PC/internett.

Trykk så «**Registrer**».

Trykk på menytegnet oppe i venstre hjørne og velg «**My account**».

Legg inn fornavn, etternavn fødselsdato, kjønn og høyde. Trykk på portrettet for å legge inn bilde.

Huk av oppe i høyre hjørne når alle data er lagt inn.



Email

Password

Register

Enter Enterprise Access Code



My Account



Name

Last Name

Date of Birth

Sex


Height



Trykk så på menyknappen oppe til venstre igjen og velg «**Settings**», så «**Measurement types**». Her huker du av for «**Activity**» og «**Sleep**» for aktivitetsmåleren, «**Weight**» for vekten og «**Blood Pressure**» for blodtrykksmåleren. Gå så tilbake med piltasten oppe til venstre.

Gå igjen inn på menyknappen og velg «**My devices**».


Hold inne sammenkoblingsknappen som vist under i noen sekunder til du ser at to firkanter blinker i displayet.

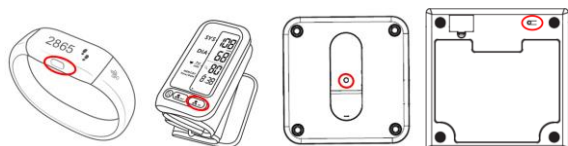

Trykk så på «**Add new**» og appen begynner å søke etter enheten.

Når appen har funnet enheten, dukker et bilde av den opp på skjermen. Trykk på bildet og fullfør oppkoblingen ved å trykke på «**Add to My Devices**».

Enheten er nå klar til bruk.

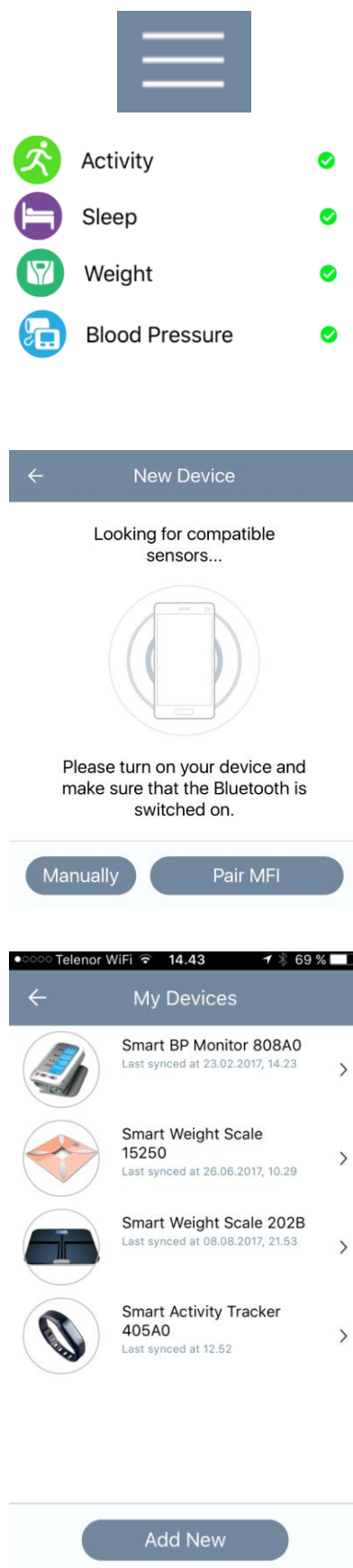

Koble sammen manuelt:

Hvis appen ikke finner aktivitetmåleren, vekten eller blodtrykksmåleren ved gjentatte forsøk, kan den kobles opp manuelt.

Gå inn på menyknappen og velg «**My devices**». Trykk så på «**Add new**». Velg «**Manually**» og bla ned i listen og velg enheten du skal koble til appen.

Aktivitetmåleren: «Smart Activity Tracker 405A0».

Ridian vekten: «Smart Weight Scale 15250»

Airon vekten: «Smart weight Scale 202B»

Blodtrykksmåleren: «Smart BP Monitor 808A0»

Trykk «**Add to My Devices**» og appen begynner å søke etter Bluetooth enheten. Hold inne knappen på aktivitetmåleren, vekten eller blodtrykksmåleren i noen sekunder til du ser at to firkanter blinker i displayet.

Når appen har funnet enheten dukker et bilde av den opp under «**My Devices**».

Enheten er nå klar til bruk.

Manually



Smart Activity Tracker
405A0



Smart Weight Scale 202B



Smart BP Monitor 808A0
Last synced at 12.10.2016, 09.50



Smart Weight Scale
15250
Last synced at 26.06.2017, 10.29



Add Device

Smart Activity Tracker
405A0



Erase data on pairing

No




Yes



Add to My Devices

For å **overføre data**, åpne appen og slå på apparatet eller foreta målingen. Trykk på «**activity**», «**Weight**» eller «**Blood Pressure**», så på bildet av aktivitetsmåleren, vekten eller blodtryksmåleren. Når enheten er slått på og du gjør dette, overføres dataene.

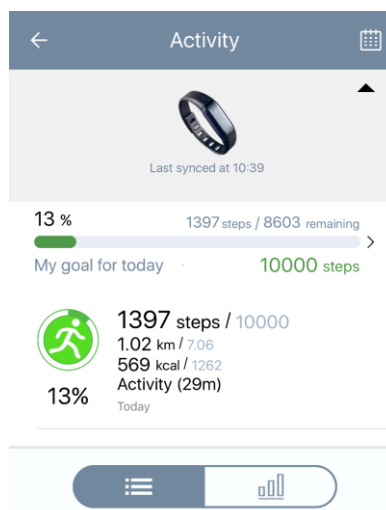

Du vil få tilsendt en e-post til adressen du oppga ved registreringen. Trykk på linken MedM Health i e-posten og registrer deg med samme e-post, navn og passord som du har brukt i appen. Du vil da kunne logge deg inn på og **administrere din konto fra PC**. Her kan du også eksportere dine data til Excel eller andre program for videre databehandling. Trykk på «Export» og «Get report», og du får generert en CSV fil som kan hentes inn i Excel.

You can access MedM Health ecosystem using this link: [MedM Health](#)

Accept [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)