


## Rigla pentru masurarea distantei pupilare **DP**

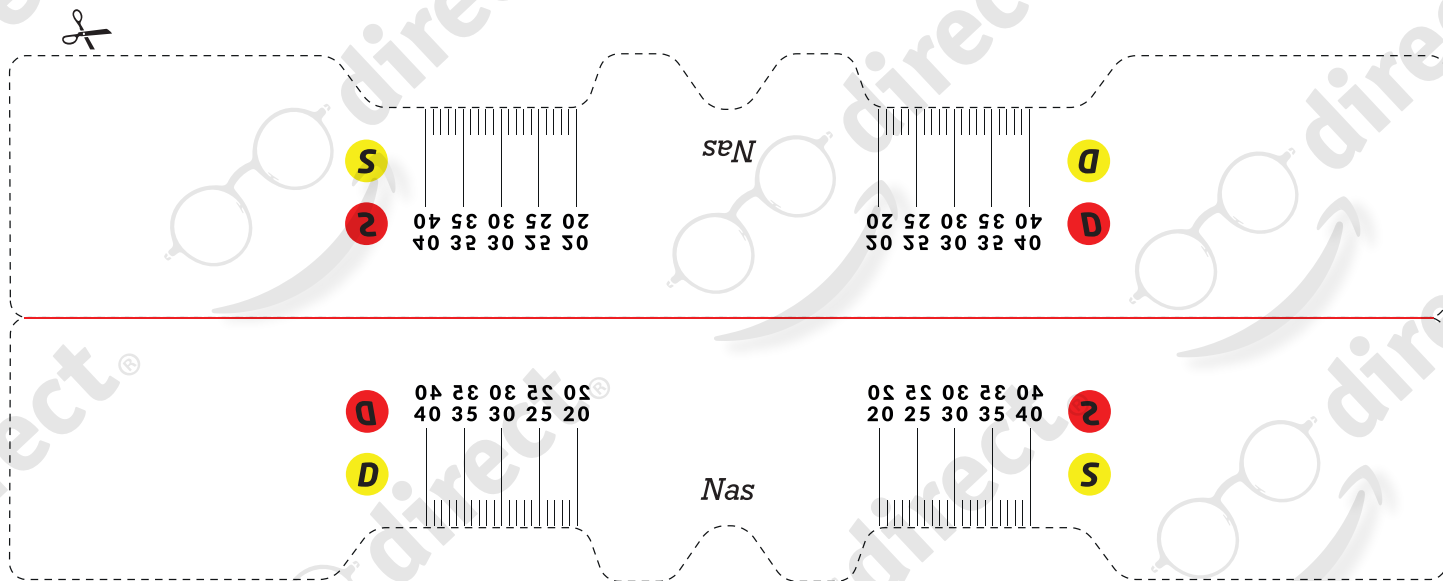


Cum sa va masurati distanta pupilara **DP** :

1. *Printati aceasta pagina fara sa redimensionati, este la scara reala 1:1*
2. *Dupa printare verificati rigla prin compararea acesteia cu o rigla normala*
3. *Decupati rigla de-a lungul liniei intrerupte si intoarcati-o pe jumatate, urmand linia rosie.*
4. *Masurati distanta pupilara*

\* Plasati partea insemnata cu "Nas" pe puntea nasului

\* Daca nu are cine sa va ajute mergeti in fata oglinzii si priviti drept inainte

\* Notati valorile distantei pupilare care se aliniaza cu centrul pupilelor dvs. - dreapta "D" si stanga "S" indica ochiul dvs. drept si stang din perspectiva dumneavoastra.

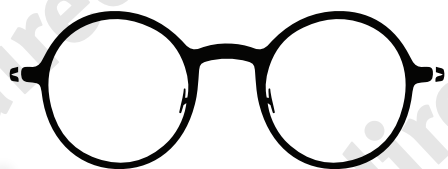

# direct®