


1. Ouvrir l'emballage et suivez les étapes ci-dessous

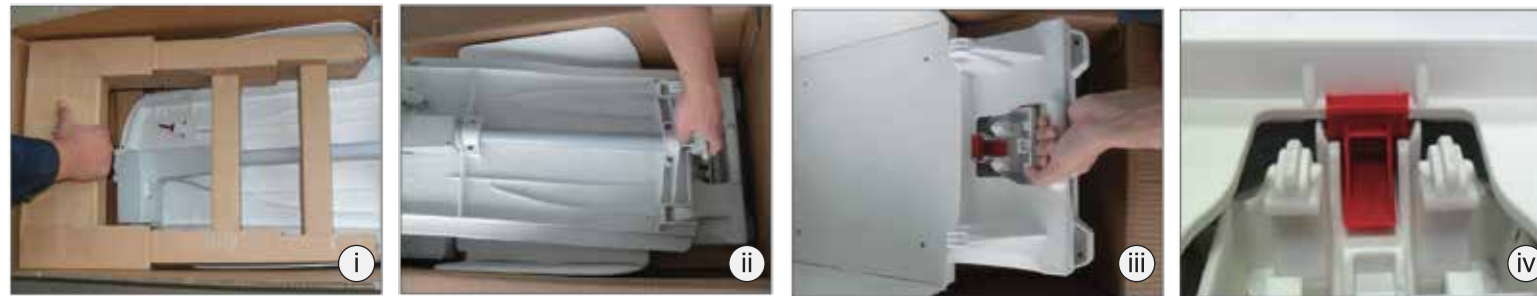


- Retirer l'emballage et tout le contenu du carton.
- Soulever l'extrémité avant du dossier et le déplacer vers l'avant.
- Tenir la poignée du siège pour soulever le siège.
- S'assurer que la fixation rouge est réglée à la position de verrouillage lors du déplacement.

2. Installer les ventouses antidérapantes à la base

- Les ventouses doivent être nettoyées avant l'usage.
- Les languettes sur les ventouses doivent faire face vers l'arrière.
- S'assurer de placer les ventouses au bord de la baignoire.




3. Assembler le siège au dossier

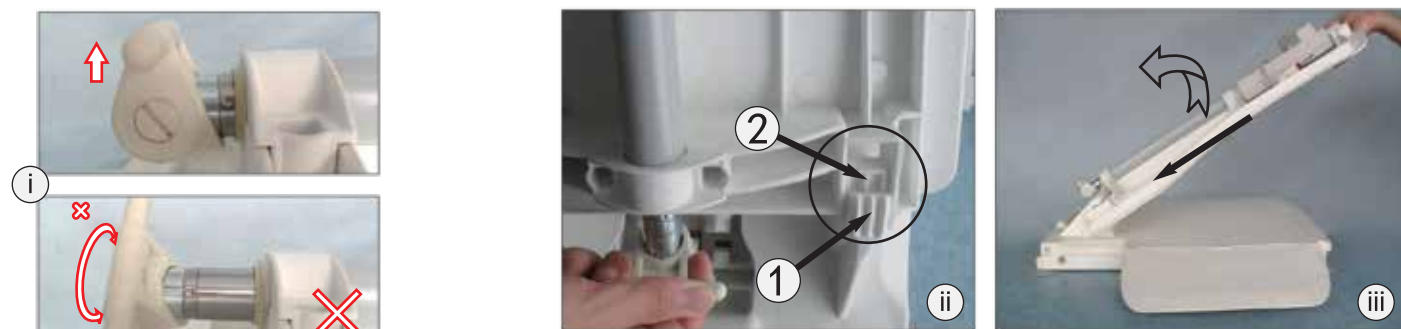

- Mise en garde :** S'assurer que la tige-poussoir est entièrement rétractée et dans la direction appropriée.
- Le dossier se glisse dans la base de l'axe, laquelle est à l'extrémité du talon de la section du siège.
- Lever le dossier à un angle de 45° jusqu'à ce qu'il s'emboîte sur la base de l'axe. Continuer de pousser le dossier vers arrière jusqu'à ce qu'il atteigne la position la plus basse.
- Mise en garde :** S'assurer que l'extrémité du talon de l'actionneur s'emboîte correctement dans la base de l'élevateur de siège de baignoire. Sinon, il y a risque de dommage.


① Base de l'axe ② L'arbre de détour

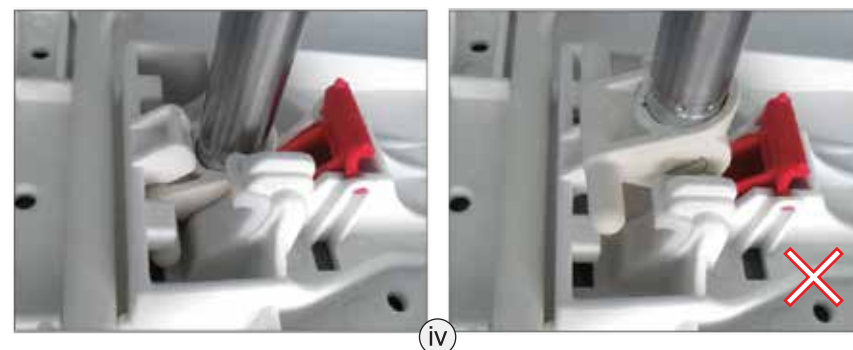

4. Commande manuelle avec pile rechargeable

Brancher la prise du chargeur ① dans le connecteur de la commande manuelle ②.

- Charger la pile pendant 8 heures pour une charge complète.
- Mise en garde :** S'assurer que le chargeur et la commande manuelle sont propres et secs avant de charger la pile.
- La commande manuelle peut être en contact avec l'eau lorsque vous utilisez l'élevateur de siège de baignoire.
- Pour la ranger, bien l'essuyer et la ranger dans un endroit frais et sec.

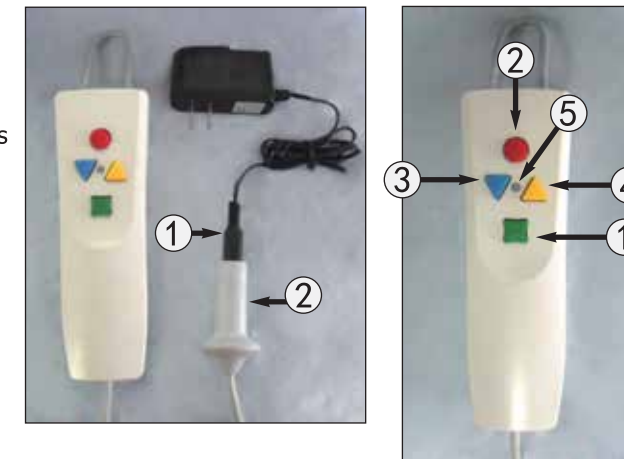

- Bouton de mise en marche
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Bouton pour descendre
- Bouton pour remonter
- Indicateur de puissance



Brancher le connecteur de la commande manuelle au dispositif derrière le dossier de la chaise. S'assurer que le câble est bien fixé à la douille de jack. Le connecteur doit être placé sur la position marquée rouge.

5. Mettre en place ou retirer l'élevateur de siège de baignoire.

- Mettre en place la base de l'élevateur de siège dans la baignoire.
- Mise en garde :** Le dossier ne doit pas heurter la baignoire. En cas de choc, le siège et la base doivent être réajustés.
- Le siège doit être élevé à une hauteur adéquate avant de l'utiliser.
- Pour retirer l'élevateur de siège de baignoire, rétracter l'actionneur à sa position la plus basse et pousser le dossier de 45° vers l'avant et tirer.
- Ramener chaque ventouse séparément au talon pour la dégager.
- Note :** Essuyer l'élevateur de siège de baignoire après l'usage et le ranger dans un endroit frais et sec.



6. Utiliser le siège coulissant

- S'asseoir sur le siège souple.
- Effectuer une rotation du siège souple et mettre vos jambes dans la baignoire.
- Glisser le siège souple au centre du siège.



Spécifications : Poids (incluant la commande manuelle) : 27,55 lb (12,5 kg). Capacité maximale : 287 lb (130 kg). Tension fonctionnelle : 12 V. Classe d'étanchéité : IPX7. Entrée de l'adaptateur de courant : CA100 – 240 V.

GARANTIE LIMITÉE À VIE