



1. Ouvrir l'appliqueur de gouttes ophtalmiques. Dévisser le bouchon de la bouteille sans le retirer complètement.
2. Placer l'encoche en trou de serrure autour de la base du cou de la bouteille. Retirer le bouchon de la bouteille.
3. Fermer l'appliqueur. Ne pas forcer la pointe avant de la bouteille dans l'appliqueur; l'appliqueur devrait se fermer aisément.
4. Maintenir en place la paupière inférieure. Mettre en place l'appliqueur sur l'œil, la lèvre de l'appliqueur sur la joue.
5. Pencher la tête en arrière, regarder à travers le trou d'épingle vers la lumière.
6. Presser délicatement la bouteille pour permettre aux gouttes prescrites de tomber dans l'œil.
7. Ouvrir l'appliqueur et remettre le bouchon sur la bouteille de gouttes ophtalmiques.
8. Pour nettoyer, retirer la bouteille de gouttes ophtalmiques et laver l'appliqueur avec de l'eau savonneuse. Rincer et sécher à fond.

Nous recommandons que l'appliqueur de gouttes ophtalmiques soit utilisé pendant toute la durée du traitement du trouble oculaire. Quand une bouteille de gouttes ophtalmiques doit être mise au rebut, retirer l'appliqueur et le nettoyer à fond avant d'insérer une nouvelle bouteille. Si vous souffrez plus d'une affection oculaire, nous vous recommandons d'utiliser un autre applicateur pour chaque type de gouttes.

Pour les cliniques et les hôpitaux : L'appliqueur de gouttes ophtalmiques peut être passé à l'autoclave à une faible pression pendant 30 minutes. Libérer la pince à ressort pour permettre à l'humidité de s'évaporer. L'appliqueur de gouttes ophtalmiques peut être nettoyé dans un liquide stérilisé. Rincer et sécher à fond.

Garantie limitée d'un an