

BIOS living

Table pont

LF844

Caractéristiques techniques

- Dimensions de la table : 30,25 x 15 po / 77 x 38 cm
- Poids : 9 kg
- Hauteur maximale : 30 à 47,25 po / 76 à 120 cm
- Matériaux : Acier à base d'époxy, colonne chromée, table en bois de hêtre stratifié clair

AVERTISSEMENT!

La table-pont n'est pas conçue pour supporter des choses pesantes.

NE PAS VOUS APPUYER sur la table pour vous soutenir en vous levant d'une position assise.

Capacité maximale : 22 lb / 10 kg

Instructions d'assemblage

- Retirez la pellicule protectrice sur votre table et sur les 4 roues.
- Placez le montant dans la fente à la base de la table en utilisant les 6 vis de 20 mm (**Figure 1**).
- Fixez le montant à la base en utilisant les 2 vis de 50 mm (**Figure 2**) en utilisant aussi les renforcements (**Figure 3**) et les rondelles.
- Dévissez la goupille de sécurité en vue de dévisser la colonne (**Figure 4**). Réglez la hauteur de la table à la position désirée.

Éléments inclus

- 1 table
- 1 montant réglable
- 1 base en acier et 4 roues (avec freins)
- 2 vis de 50 mm
- 2 renforcements pour vis
- 2 rondelles
- 6 vis de 20 mm
- 1 tournevis



Mode d'emploi

- **(Figure 5)** Montrez la table-pont entièrement assemblée. La hauteur de la table peut être réglée en serrant le levier à rochet vers le plateau de la table (Figure 6). À l'aide de l'autre main, soutenez l'autre extrémité du plateau de la table tout en réglant la hauteur.



Recommandation

- Veuillez mettre à l'essai la stabilité de votre table avant de l'utiliser la première fois.
- **Ne mettez pas** soudainement trop de pression sur votre table
- **Ne déposez pas** plus de 22 lb / 10 kg de pression sur votre table.

Entretien régulier

- Retirez et essuyez immédiatement tous aliments renversés en vue d'éviter tout gauchissement de la table.
- Utilisez de l'eau savonneuse pour retirer la pellicule et la saleté, puis bien assécher.
- **N'utilisez pas** de produits de nettoyage abrasifs comme du javellisant, lequel endommagerait votre table et causerait sa décoloration.
- Seul un technicien autorisé devrait faire toutes réparations et remplacer les pièces.

Garantie limitée d'un an

Cette table pont comporte une garantie d'un an contre les vices de matériaux et de main d'œuvre lors des applications normales par le propriétaire initial au cours de l'année. Si le produit devient inopérable en raison de défauts et requiert des réparations, retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d'achat à l'adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport / expédition. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi un mauvais usage, négligence, manipulation brutale ou des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

THERMOR LTD.

À l'attention de : Repair Department

16975 Leslie Street

Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com

Courriel : support@biosmedical.com

BIOS | Medical

MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :

THERMOR LTD.

16975 LESLIE STREET

NEWMARKET, ON L3Y 9A1

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

WWW.BIOSMEDICAL.COM