

**BARRE D'APPUI DE SÉCURITÉ
POUR BAIGNOIRE**

BIOS
Diagnostics^{MC}



**MANUEL
D'INSTRUCTIONS**

Barre d'appui de sécurité pour baignoire BD715

Cette barre d'appui est conçue pour les baignoires dont l'épaisseur du rebord varie entre 3 et 6 po / 7 et 15,2 cm.



Nous vous félicitons d'avoir acheté votre nouvelle barre d'appui de sécurité pour baignoire BIOS Diagnostics^{MD}. La barre d'appui de sécurité pour baignoire BIOS Diagnostics^{MD} procure stabilité et confort lors de l'entrée et de la sortie de la baignoire pour plus de sécurité lors des bains.

INSTALLATION

Consignes de sécurité

- La barre d'appui de sécurité pour baignoire est conçue à l'usage d'un particulier sur des baignoires standards dont l'épaisseur du rebord varie entre 3 et 6 po / 7 et 15,2 cm. Cette barre d'appui n'est pas destinée à des fins commerciales comme : hôpitaux, résidences pour personnes âgées, etc.
- Vous devez installer la barre d'appui de sécurité pour baignoire seulement sur le long côté droit de votre baignoire. La barre d'appui de sécurité pour baignoire ne doit jamais être utilisée sur des baignoires arrondies ou demi-circulaires.
- La barre d'appui de sécurité pour baignoire ne doit pas être utilisée simultanément par plusieurs personnes. La force de retenue maximale de la barre d'appui de sécurité pour baignoire est équivalente à 143 lb (65 kg).
- Ne modifiez en aucun cas ni apposez aucun autre élément à la barre d'appui de sécurité pour baignoire.
- Ne fixez pas la barre d'appui de sécurité pour baignoire à d'autre mobilier ou accessoires fixes (ex. : table, lit, douche, etc.).

Instructions pour une utilisation sans risque

- Bien sécher vos mains et la barre d'appui de sécurité pour baignoire avant de l'utiliser. Le savon ou l'huile de bain sur vos mains ou sur la barre d'appui de sécurité pour baignoire peut augmenter le risque de glisser.
- Vérifiez de temps en temps la barre d'appui de sécurité pour baignoire pour vous assurer qu'elle demeure solidement en place sur votre baignoire pour ainsi prévenir des lésions corporelles.
- N'utilisez pas la barre d'appui de sécurité pour baignoire pour ranger des accessoires de bain ou de douche (brosses, serviettes, etc.); ceux-ci peuvent réduire la force de retenue et/ou peuvent causer un danger de glisser.

Mise en place de la barre d'appui de sécurité pour baignoire

MISE EN GARDE

Assurez-vous avant la mise en place de la barre d'appui de sécurité pour baignoire que le rebord de la baignoire est propre, sec et sans débris, c'est-à-dire sans résidu de savon ou souillures.

L'espace doit être propre en vue de fixer solidement et correctement la barre d'appui de sécurité pour baignoire.

AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager votre baignoire, ne resserrez pas trop la barre d'appui de sécurité pour baignoire sur le rebord du bain.

AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager les carreaux et les miroirs, travailler avec circonspection pendant l'installation et le démontage de la barre d'appui de sécurité pour baignoire.

1ère étape


Desserrez la vis de fixation en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à ce que vous puissiez mettre le garde-corps sur le rebord de la baignoire. La vis de fixation doit faire face vers l'extérieur.

2e étape

Serrez la vis de fixation solidement et tournez-la dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.

3e étape

Assurez-vous que la barre d'appui de sécurité pour baignoire se maintient en place en faisant un essai de changement de position. Si un changement de position se produit, vous devez continuer à serrer la vis de fixation ou changer la position de la barre d'appui sur le rebord de la baignoire.

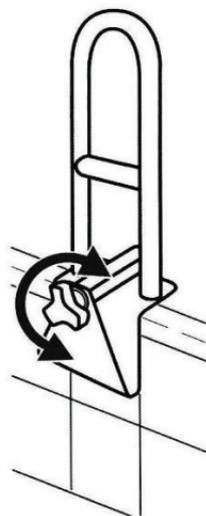

À l'extérieur de la baignoire

Pour retirer la barre d'appui de sécurité pour baignoire, desserrez la vis de fixation en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-la de bas en haut.

Soin et entretien

- Bien essuyer la barre d'appui de sécurité pour baignoire avant et après chaque usage.
- Retirez toute saleté avec un chiffon humide ou un agent nettoyant domestique doux et séchez complètement.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts - acides ou eau salée sur la barre d'appui de sécurité pour baignoire.
- Dans le cas où une contamination avec des matières infectieuses se produirait, la barre d'appui de sécurité pour baignoire peut être nettoyée avec des liquides de décontamination à base d'alcool type.

Entretien

- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre d'appui de sécurité pour baignoire. Si vous notez tout défaut, ne plus l'utiliser.
- Vérifiez l'état du coussin en caoutchouc et nettoyez-le régulièrement.

Élimination

Veillez jeter la barre d'appui de sécurité pour baignoire selon une méthode favorable à l'environnement. Vérifiez la réglementation de votre municipalité pour les directives de recyclage pour votre barre d'appui de sécurité pour baignoire.

Garantie à vie

Ce produit est garanti de tous défauts de fabrication ou de main-d'oeuvre à vie pour le propriétaire initial. Il sera réparé ou remplacé, sans frais, à la réception de l'unité prépayée et 5,00 \$ afin de couvrir les frais de manutention, d'emballage et de retour postal à l'adresse ci-dessous. Veuillez inclure vos nom et prénom, adresse et numéro de téléphone de jour ou adresse courriel. Cette garantie ne couvre pas un mauvais usage ou l'usure normale.



Thermor

16975 Leslie Street,
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosexactly.com
TH2763_064210