

Nous vous remercions pour l'achat du stéthoscope BIOS Diagnostics^{MC}. Veuillez lire très attentivement et de façon approfondie le mode d'emploi avant l'utilisation de ce produit.

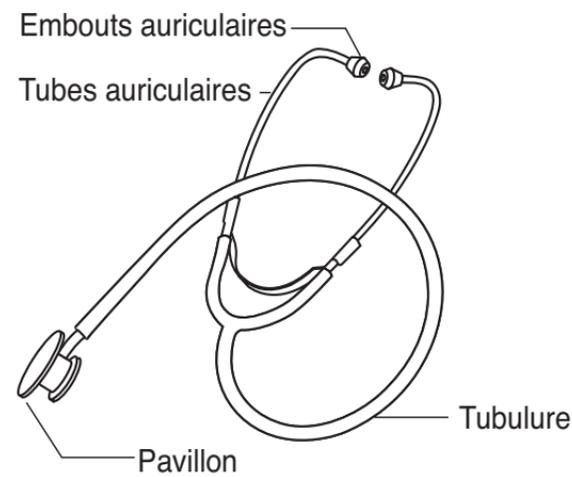


fig.1

Ce stéthoscope est doté d'un double pavillon pour entendre les sons des hautes et basses fréquences; pivotez simplement le pavillon de 180°.

⚠ Le pavillon du stéthoscope doit être placé sur la peau du corps à l'endroit désiré en maintenant seulement une pression raisonnable.

Assemblage et utilisation

1. Choisissez l'embout auriculaire qui vous convient. Le stéthoscope Sprague-Rappaport est doté d'embouts auriculaires pour une étanchéité maximale et un ajustement confortable. L'embout est de taille universelle et il est conçu pour s'adapter exactement au canal auditif de façon à bloquer les bruits ambiants. Les embouts auriculaires sont vissés sur les tubes auriculaires en assurant ainsi une fixation solide.

Note: Différentes tailles d'embouts auriculaires sont incluses. Retirez simplement les embouts auriculaires du stéthoscope et fixez les embouts d'une taille plus adéquate.

2. Pour ajuster l'angle des tubes auriculaires, tenez la tubulure dans une main et pivotez chaque tube auriculaire dans l'angle exact comme le démontre la figure 2.

3. Pour réduire la tension du ressort, saisissez chaque tube auriculaire à sa courbure et tirez délicatement vers l'extérieur comme le démontre la figure 3.

4. Pour augmenter la tension du ressort, croisez les tubes auriculaires comme le démontre la figure 4.

5. Lorsque les embouts auriculaires sont dans vos oreilles, les tubes auriculaires doivent être pointés vers l'avant comme le démontre la figure 5. Le stéthoscope porté de façon inappropriée peut atténuer la qualité des sons et dans certains cas bloquer complètement l'acoustique.

6. Seul un côté du double pavillon du stéthoscope fonctionne à la fois. Vous devez ouvrir ou fermer la cloche ou la membrane en pivotant le pavillon. Si la membrane est ouverte, la cloche sera fermée empêchant les sons de passer à travers celle-ci et inversement.



fig.2

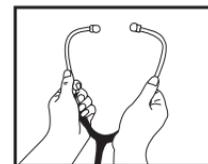


fig.3

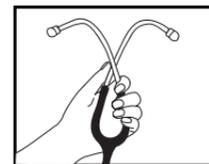


fig.4



fig.5

⚠ Dans le canal auditif, assurez-vous que les embouts auriculaires soient pointés légèrement vers l'arrière.

Pavillons de type cloche interchangeables

- Taille adulte : définit les sons de basses et moyennes fréquences et le souffle cardiaque perçus.
- Taille moyenne : se concentre sur les endroits étroits tels qu'entre les côtes pour détecter les sons de basses et moyennes fréquences et le souffle cardiaque perçus.
- Taille enfant : conçu pour entendre les sons de basses et moyennes fréquences et le souffle cardiaque perçus chez les enfants.

1. Pour changer le pavillon, dévissez-le simplement et attachez la taille désirée.

Nettoyage

En vue d'éviter une accumulation de saleté et de poussière, veuillez toujours ranger le stéthoscope dans son emballage. Le revêtement extérieur de l'instrument peut être nettoyé avec un chiffon humide, doux et antipelucheux. Pour la désinfection, le stéthoscope peut être nettoyé avec un chiffon humidifié d'alcool.

⚠ Ne pas utiliser une stérilisation thermique ou le trempage.

Avertissement

Ne jamais mettre en contact le stéthoscope avec un liquide et vous assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans le boîtier. Puisque le stéthoscope n'est pas conçu pour des interventions chirurgicales, un simple nettoyage et/ou une désinfection avec un désinfectant de surface à base d'alcool est suffisant.

⚠ Ne jamais utiliser un produit de nettoyage et de récurage!

Garantie de cinq ans

Si le produit démontre qu'il est défectueux pour cause de pièces ou de fabrication dans une période de cinq ans de la date d'achat, veuillez le retourner à l'adresse ci-dessous. La garantie est nulle si la défectuosité ou le mauvais fonctionnement de l'appareil a fait l'objet d'un usage excessif de la part de l'utilisateur, d'un mauvais usage, de modifications ou dommages pendant le transport. Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, dès la réception du produit prépayé et d'un montant de 5,00 \$ pour couvrir les frais de manutention, emballage et retour postal. Veuillez inclure une preuve d'achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone (de jour), ou adresse courriel.



Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosexactly.com
TH2588_506DI