

BIOS living

Siège de toilette surélevé 59013

Nous vous remercions pour l'achat du siège de toilette surélevé de BIOS Living. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'installation de votre siège de toilette surélevé.

Information de sécurité

- Capacité de poids : 300 lb/136 kg

⚠ AVERTISSEMENT!

- Assurez-vous que le siège est correctement verrouillé en place de façon sécuritaire avant de l'utiliser.
- Le bouton de réglage situé à l'avant du siège doit être serré en tout temps pour bien fixer le siège sur la toilette.
- Ce produit est conçu pour s'utiliser sur la plupart des modèles courants de toilette. Il ne s'adapte pas à tous les modèles de toilette. Si ce produit ne s'adapte pas adéquatement ou ne peut être fixé de façon sécuritaire à votre modèle de toilette, veuillez cesser son utilisation.

- Les appuie-bras rembourrés sont conçus pour aider la personne à S'ASSEOIR SUR et à se RELEVER DE la toilette – **N'UTILISEZ PAS** les appuie-bras rembourrés pour supporter tout votre poids pendant le déplacement, car vous pourriez vous blesser.

Installation

- Avant chaque usage, réglez les appuie-bras rembourrés selon vos besoins spécifiques. Lorsque la position désirée est atteinte, verrouillez les appuie-bras en alignant les boutons jusqu'à ce qu'ils « cliquent » dans leurs trous.
- Assurez-vous que les appuie-bras sont bien verrouillés en tirant délicatement sur eux.
- Relevez le siège et le couvercle de la toilette et placez la partie arrière du siège de toilette surélevé à l'intérieur de la lèvre de la cuvette (pour certaines toilettes, il peut être nécessaire de démonter le siège et le couvercle pour obtenir un meilleur ajustement).
- Assurez-vous que le support de réglage avant repose à l'intérieur de la cuvette en dégageant le rebord de la cuvette de la toilette.
- Avec le siège de toilette surélevé reposant correctement sur le rebord de la cuvette des toilettes, centrez le siège sur la cuvette de la toilette.

- Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le siège de toilette surélevé de façon sécuritaire à la cuvette. Serrer à la main uniquement – **n'utilisez** aucun outil et veillez à ne pas trop serrer pour ne pas endommager le support de réglage.
- Votre poids doit être centré sur le siège de toilette surélevé, pas trop loin en avant ou trop loin d'un côté, car le siège pourrait renverser.
- Assurez-vous que le siège de toilette surélevé est bien installé, s'adapte adéquatement et qu'il est stable avant de l'utiliser.

Garantie limitée à vie

Ce siège de toilette surélevé de BIOS Living comporte une garantie limitée à vie contre les vices de matériaux et de main-d'œuvre lors d'un usage normal par le propriétaire original. Si le produit devient inopérable en raison de défauts, retournez-le avec toutes ses pièces et une preuve d'achat à l'adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport/expédition. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi un mauvais usage, de la négligence, une manipulation brutale ou des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.

Attn : Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com

Courriel : support@biosmedical.com

BIOS | Medical

 MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :

THERMOR LTD.

16975 LESLIE STREET

NEWMARKET, ON L3Y 9A1

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

WWW.BIOSMEDICAL.COM

