

AMBULATEUR

Mode d'emploi



N° de modèle : BD749

BIOS living

L'ambulateur BIOS Living comprend un sac de rangement en nylon amovible, des freins d'immobilisation et un siège rembourré avec appui dorsal. Il se plie facilement si vous devez le ranger et le transporter; il est doté de verrous de sécurité antipliage afin d'éviter que l'ambulateur se plie accidentellement lorsqu'il est utilisé.

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'assembler ou d'utiliser cet ambulateur. Veuillez ranger ce manuel dans un endroit sûr.

NE PAS assembler ou utiliser cet équipement sans avoir préalablement lu et compris ce mode d'emploi.

Pour votre sécurité personnelle

- **Ne jamais** s'asseoir sur l'ambulateur pour l'utiliser comme fauteuil roulant ou moyen de transport, car l'ambulateur n'est pas conçu pour les déplacements en position assise.
- L'ambulateur peut servir d'appui à un individu pesant jusqu'à 136 kg (300 lb), incluant le poids du contenu du sac de rangement en nylon.
- La charge admissible maximale pour le panier en nylon sous le siège est de 10 kg (22 lb).
- **Ne vous tenez** jamais debout sur l'ambulateur ni l'utiliser comme un tabouret.
- **Ne déplacez jamais** une personne assise sur le siège de l'ambulateur.
- Agissez avec prudence lorsque vous soulevez et transportez l'ambulateur.
- Vérifiez les freins avant d'utiliser l'ambulateur. Il faut veiller à ce que

TOUS les réglages pour les mains et la hauteur sont sécuritaires et que les pièces mobiles sont en bon état de fonctionnement avant d'utiliser cet ambulateur ou tout autre aide à la locomotion.

- Assurez-vous que les freins sont en position de verrouillage avant de vous asseoir.
- **Ne vous assoyez jamais** sur l'ambulateur lorsqu'il est plié.
- Chaque individu devrait toujours consulter son médecin ou son thérapeute afin de déterminer le réglage adéquat lors de l'utilisation de l'ambulateur.
- Évitez une charge excessive dans le sac de l'ambulateur, l'ambulateur pourrait basculer.
- Les clients devraient chercher l'avis/les recommandations d'un professionnel de la santé pour déterminer si l'ambulateur est bien approprié pour leurs besoins.

Instructions d'assemblage

Veillez examiner l'ambulateur pour la présence de dommages subis pendant l'expédition.

Veillez consulter la section de la garantie pour plus d'informations.

1. Dépliez l'armature de l'ambulateur jusqu'à sa position la plus large (**Figure A**). Le verrou de sécurité se fixe automatiquement lorsque l'ambulateur est complètement déplié.

Utilisez vos mains pour déplier le sac de rangement en nylon et assurez-vous que toutes les agrafes sont sécurisées en place (**Figure B**).

Retirez la pellicule de plastique sur les roues.

2. Insérez les poignées dans l'armature des tubes (**Figure C**). Réglez l'ambulateur à la hauteur qui vous convient le mieux, idéalement, les poignées doivent être positionnées au niveau du poignet. Insérez les boutons triangulaires de réglage à vis à travers l'armature et les trous des poignées (**Figure D et E**). Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les poignées soient sécurisées.
3. Insérez le dossier courbé dans sa fente sur le côté droit de l'ambulateur. Assurez-vous qu'il est bien positionné (**Figure F**).
4. Basculez le siège vers l'avant.

Pliage de l'ambulateur

Pour plier l'ambulateur, vous devez tirer manuellement le verrou de sécurité

Figure A

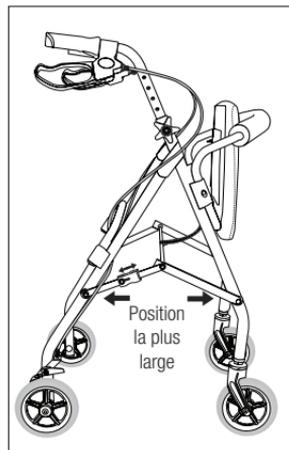


Figure B

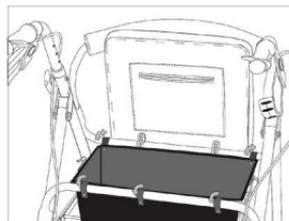


Figure C

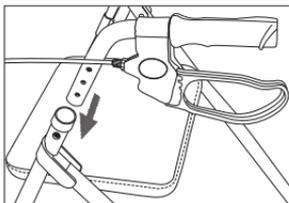


Figure D

Figure E


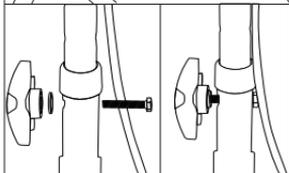


Figure F

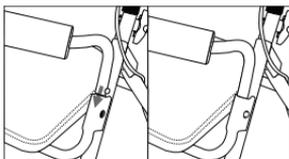

vers la gauche pour le dégager. Retirez la pellicule de plastique sur les roues.

Soulevez le siège et remontez la sangle noire qui est fixée à la barre de pliage stabilisatrice. Le panier en nylon de rangement se pliera dans l'ambulateur.



Fonctionnement des freins

Les freins peuvent être utilisés pour un freinage normal lorsque la personne marche ou se stationne pour s'asseoir sur le siège de l'ambulateur.

1. Pressez les poignées vers le haut pour un freinage normal.

Freins de stationnement

1. Abaissez les deux poignées vers le bas jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent avec un déclic pour activer le frein de stationnement. La poignée se verrouillera automatiquement et restera en place.
2. Pour relâcher le frein de stationnement, tirez la poignée vers le haut. La poignée retournera à sa position initiale.

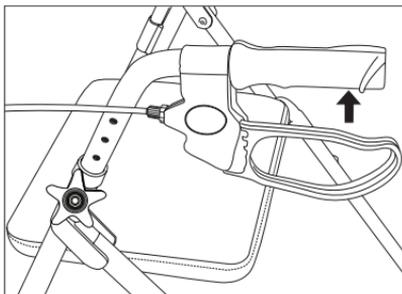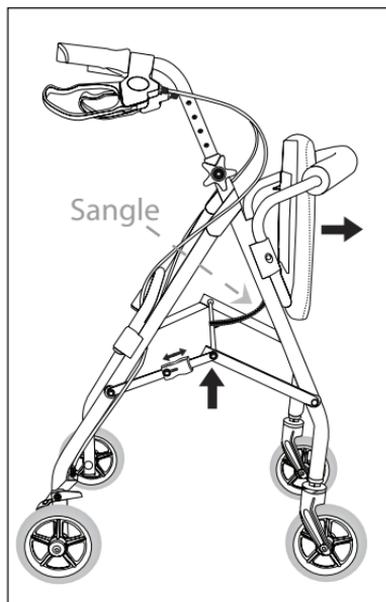

Réglage des freins manuels


Si la tension sur les freins des roues est trop lâche ou trop serrée, la régler en suivant ces étapes :

Note : Note : Les directions dans le sens ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sont déterminées en se tenant debout derrière l'ambulateur à partir de la position de l'utilisateur.


1. Assurez-vous que la poignée de frein n'est pas verrouillée.
2. **Pour desserrer la tension de la poignée de frein :** Soutenir le contre-écrou en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.

Note : Si le levier de frein frotte sur la roue arrière, la poignée de frein doit être desserrée.

3. Pour serrer la tension de la poignée de frein : Soutenir le contre-écrou en tournant la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Répétez les mêmes directives avec l'autre frein.

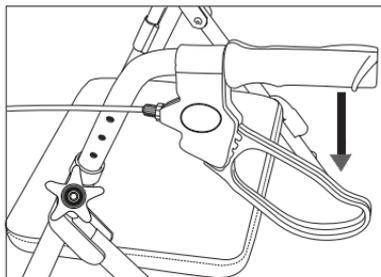

Frein de stationnement

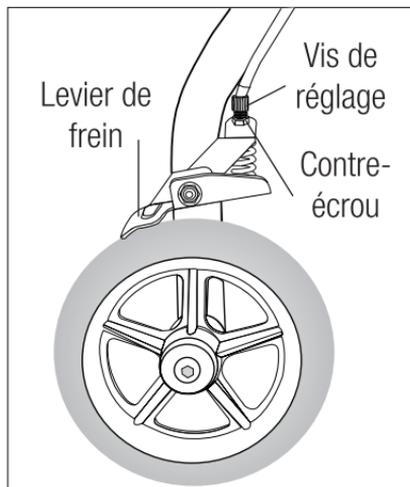

Soin et entretien

1. Assurez-vous que TOUTE la quincaillerie de fixation est sécurisée en tout temps.
2. Assurez-vous que le siège est bien fixé à l'ambulateur; serrez la vis si celle-ci est desserrée.
3. Remplacez immédiatement toutes pièces brisées, endommagées ou usées.
4. Pour nettoyer, essuyez avec un linge humide, utilisez seulement un savon doux, n'utilisez pas de détergents abrasifs

RÉGLAGE RECOMMANDÉ POUR LA HAUTEUR DES POIGNÉES

Hauteur des poignées	Taille approximative min/max de l'utilisateur
31,5 à 35 po / 80 à 88 cm	5 pi 4 po à 5 pi 10 po / 162 - 176 cm
Hauteur du siège	
21,7 po / 55 cm	

Garantie de un an

Cette ambulateur comporte une garantie d'un an contre les vices de matériaux et de main d'œuvre lors des applications normales par le propriétaire initial au cours de l'année. Si le produit devient inopérable en raison de défauts et requiert des réparations, retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d'achat à l'adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport / expédition. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi un mauvais usage, négligence, manipulation brutale ou des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.

À l'attention de : Repair Department

16975 Leslie Street

Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com

Courriel : support@biosmedical.com

BIOS | Medical

 MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :

THERMOR LTD.

16975 LESLIE STREET

NEWMARKET, ON L3Y 9A1

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

WWW.BIOSMEDICAL.COM