



INSTRUÇÕES DE USO e INSTRUÇÕES PARA LAVAR

Modelos: BZL-AB4F7, BZL-B01G, BZL-B15, BZL-B19, BZL-BNRZ, BZL-FBA, BZL-FBBA, BZL-FBCS, BZL-FBRS, BZL-FBS, BZL-FM100-A, BZL-FM100-B, BZL-FM100-C, BZL-FVOM, BZL-ISB, BZL-ISBX, BZL-LGA, BZL-MB, BZL-MV, BZL-SFBHM, BZL-SFBHRM, BZL-SFBHRS, BZL-SFBHS

Para mais informações, envie-nos um email para info@marenagroup.com

marena.com



INSTRUÇÕES PARA LAVAR



Para mais informações, envie-nos um email para info@marenagroup.com

marena.com

Declaração de uso pretendido

Os produtos de compressão da Marena® destinam-se a uso para apoio e compressão por tensão de uma área do corpo do paciente após os tipos de cirurgia mencionados a seguir.

1. Cirurgias nos seios, como:
 - a. Aumento de seio
 - b. Redução de seio
 - c. Reconstrução de seio
 - d. Mastectomia
 - e. Mastopexia (elevação do seio)
2. Lipoaspiração
3. Lipoplastia
4. Lipoinjeção
5. Braquioplastia
6. Abdominoplastia
7. Cirurgias abdominais, como:
 - a. Histerectomia
 - b. Apendicectomia
 - c. Cesariana
8. Ginecomastia
9. Cirurgias faciais e orais/maxilofaciais

Os produtos não são indicados para serem utilizados como imobilizadores.

Contraindicações:

Os produtos não devem ser usados se o paciente tiver sensibilidade a nylon Tactel® ou Lycra®.

Advertências e precauções gerais:

Siga as instruções do prestador de saúde quanto a medição, tamanho e uso. A compressão excessiva pode gerar necrose cutânea e ser um fator de contribuição para a ocorrência de trombose venosa profunda.

Descarte:

O produto pode ser descartado em lixo comum pelo próprio usuário.

Instruções de uso

A roupa é aplicada diretamente ao paciente após o procedimento cirúrgico. Geralmente, a roupa é utilizada de maneira contínua durante várias semanas, de acordo com orientação médica. Ainda que cada pessoa experimente a compressão de modo diferente, geralmente, a compressão não deve causar dor. Sua roupa deve se ajustar confortavelmente, mas você deve ser capaz de deslizar um dedo sob o tecido. Por razões de conforto e higiene, é recomendável que o paciente receba pelo menos duas peças de roupa.

As roupas da Marena Recovery são desenhadas para proporcionar conforto. Consulte as instruções a seguir:

- Tenha cuidado para não perfurar o tecido com as unhas.
- Posicione a roupa de modo que a etiqueta interna que informa o tamanho esteja situada no interior e na parte de trás da roupa.
- Abra o zíper e/ou os fechos e ajustes da parte frontal.
- Ajuste as alças até o ponto intermediário.
- Tecido 51% nylon Tactel® e 49% Lycra®

Se for uma peça de body, blusa ou legging, vista a roupa uma perna de cada vez. Levante a roupa delicadamente pelo corpo. Alinhe a abertura da virilha enquanto puxa e levanta a roupa. Feche os ganchos um a um e/ou levante o zíper até que a roupa esteja totalmente posicionada, conforme aplicável. O último passo é puxar e ajustar as alças.

Se for um sutiã ou colete, deslize cada braço para dentro das aberturas ou mangas. Feche o zíper e/ou fecho na parte da frente, e use a linha do meio ou o ajuste mais confortável para começar. Você pode ajustar para encontrar a posição mais confortável. Depois de ajustar a parte da frente, ajuste as alças até ficarem uniformes nos ombros e na posição mais confortável.

Se for uma máscara facial, coloque o queixo na base correspondente (localizada junto à costura vertical). Feche o fecho de ajustável de contato sobre a cabeça cerca de 5 cm atrás da testa. Feche o fecho de ajustável de contato atrás do pescoço.

Se for uma cobertura de braço ou panturrilha, abra a peça pela parte mais larga e puxe deslizando o pé ou a mão por seu interior. Puxe delicadamente o braço ou a panturrilha até que a peça esteja lisa e suavemente esticada sobre a parte do corpo.

Instruções para lavar:

Lave a peça do lado avesso e com roupas de cor semelhante. Não use amaciante nem alvejante. Não lave a seco nem use ferro de passar.

Armazenamento e transporte:

Evite exposição excessiva a calor, frio ou umidade. Guarde distante de contaminantes atmosféricos como gases provenientes de motores de combustão interna. Guarde protegido da luz solar. A faixa de temperatura de armazenamento recomendada é de 4–29 °C (40–85 °F).

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação

Importador:

Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Avenida Francisco Matarazzo, 1752 sala 502/503, Água Branca

CEP: 05001-200 - Cidade: São Paulo / UF: SP

CNPJ: 04.967.408/0001-98

BRAZILVIGILANCE@UL.COM

Responsável técnico: Luiz Levy Cruz Martins - CRF-SP: 42415

ANVISA nº 80117580785

Fabricante:

The Marena Group, LLC

1045 Progress Circle

Lawrenceville, GA 30043, USA

www.marena.com

Para consultar a política de devolução, acesse www.Marena.com ou ligue para +1-888-462-7362.

Data de emissão: 10 de fevereiro de 2023 (IFU-002.02)